

NovaPED sport tukipohjalliset

Klikkaa kuva isommaksi



Myymlähinta: 84.00€

Huippulaadukkaat valmistukipohjalliset urheiluun, liikuntaan ja aktiiviseen elämään. NovaPED sport -tukipohjalliset tukevat jalan pitkittäis- ja poikittaisia holvirakenteita, antavat iskunvaimennusta ja jakavat jalkapohjaan kohdistuvaa painetta tasaisemmin.

Käyttökohteet:

- > Urheilujalkineet, kävelykenkä / -lenkkari ja työjalkine

Käyttöaiheet:

- > Jalan pitkittäisholvin löysyys / madaltuma (lattajalka)
- > Jalan ylipronaatio
- > Poikittaisen jalkaholvin (jalkapöydän) löysyys / madaltuma
- > Päkiävaivat mm mortonin syndrooma
- > Plantaarifaskiitti
- > Akillesvaivat
- > Polvikipu (polven etuosan ongelmat)

Tuotenumero: 39987620035 | 79.00 €

Ilmainen toimitusmahdollisuus

sis. arvonlisäveron (Myymlähinta: 84.00)

m

Varastotuote, toimitusaika noin 2-5 työpäivää

Lisätiedot

Koko- ja tilaustiedot

Ominaisuudet:

- > Tukee jalkaa ja jalkaterää (jalan pitkittäis- ja poikittaisjalkaholveja)
- > Jakaa painetta jalkapohjassa tasaisemmin ja antaa lisäpehmustetta kantapäälle ja päkiälle (metatarsaaliluiden päät)
- > Pohjallisissa on kolme vahvuutta riippuen kengän koosta
- > Saatavana myös kapeana mallina (tilaus@turuntukikohta.fi)

Sovitus:

Mikäli pohjallinen on liian suuri kenkääsi, tee seuraavasti:

1. Aseta tukipohjallinen ja kengän oma pohjallinen tarkasti päällekkäin. Pohjallisten kantapäättä pitää olla tarkasti päälletysten.
2. Käytä kengän oman pohjallisen kärkeä mallina ja merkkää kynällä viiva tukipohjalliseen sen mukaisesti.
3. Leikkaa tukipohjallisen kärjestä ja sivuilta ylimääräinen pituus ja leveys pois.



Tuotemerkki:

Schein / Össur