



MALLEODYN S3 -NILKKATUKI



151,00 €

- Laadukas nilkkavamman kuntoutus:
 - Nilkan venähdys / nyrjähdys
 - Nilkan nivelsidevammat
 - Trauman jälkitila
 - Urheiluvammat ja -käyttö
 - Uusien nilkkavammojen ennaltaehkäisy
- Nilkan kiputilat
- Nilkan instabiliteetti (=löysyys, epävakaus)

SKU: 3507841

Tuote: Kuntoutuksen mukaisesti kevennettävä malli

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määräytyy kengän koon mukaan. Vasen ja oikea puoli erikseen.

Koko	Kengän koko
Koko 1	35-40
Koko 2	41-47



Lisätiedot:

Edut ja ominaisuudet:

- Tuen suljettu rakenne estää monelle tuelle tyypillisen "ikkuna"-turvotuksen syntymisen
- Tuki mahdollistaa nilkan optimaalisen kuntoutuksen 3-vaiheisen kuntoutusohjelman mukaisesti sekä kylmähoidon. Yhdellä tuella kolmen eri nilkkatuen tehtävät!
- Tuen keventäminen vaiheittain on erittäin helppoa
- Korkealaatuinen ja miellyttävä materiaali: anatominen 3D-tukirakenne ja bi-elastinen kangasmateriaali. Kangas on hengittävää ja kosteutta siirtävää
- Sisäpehmuste antibakteerisesta materiaalista
- Kahdella pikakiinnittimellä tuki on kiinnitettävissä nopeasti
- Kantapään leveys säädettävissä yksilöllisesti
- Tuen rakenne ohut -> sopii hyvin jalkineisiin

Käyttöohje nilkan nyrjähdysten jälkeen:

1. **2-3 viikkoa vahvin tukitaso** – oranssi sivuvahvike mukana. Lisäksi kylmäpussia 2-4 päivää, useita kertoja päivässä n.15min.
2. **2-3 viikkoa keskivahva tukitaso** – oranssi sivuvahvike poistettuna
3. **1-2 viikkoa kevein tukitaso** – 8-lisäremmit poistettuna.
4. **Tämän jälkeen ennaltaehkäisevä käyttö** urheillessa ja liikunnassa keveimmällä tukitasolla kunnes nilkka on vakaa ja nopea reagoimaan.

Ohjeistuksen ajat riippuvat jonkin verran vamman vakavuudesta.

Katso tuen pukemis- ja tuen keventämisohjeet [TÄSTÄ](#).

Tuotemerkki: Sporlastic

Myymälähinta: 151

Toimitusaika: varastotuote

KUVAT

