

## MEDI BUTLER



**54,00 €**

Medi Butler helpottaa umpikärkisten tukisukkien pukemista. Apuväline tulee kyseeseen esimerkiksi silloin, jos tukisukkien käyttäjällä on heikot käsivoimat tai käyttäjä ei yllä varpasiin. Apuvälineen kahvat ovat 32 cm pitkät.

**SKU:** 18900-7

**Tuote:** Umpikärkisten tukisukkien pukemisen apuväline

**Koko- ja tilaustiedot:**

**Lisätiedot:**



### **Käyttöohjeet:**

1. Pujota umpikärkinen tukisukka kehikon ympärille niin, että kehikon ulkopuolelle jäävä osuus on nurin päin.
2. Tee sukan taitos niin pitkälle, että kantapääosa tulee kehikon reunalle.
3. Pujota jalka kehikon välistä sukan jalkateräosaan.
4. Vedä kehikkoa ylöspäin pidemmistä kahvoista.
5. Ota apuväline pois jalasta ja viimeistele tukisukkien pukeminen käsin

Englanninkielisen video-ohjeen voit katsoa [tästä](#).

**Myymälähinta:** 54

**Toimitusaika:** varastotuote