



MEDI BUTLER



55,00 €

Medi Butler helpottaa umpikärkisten tukisukkien pukemista. Apuväline tulee kyseeseen esimerkiksi silloin, jos tukisukkien käyttäjällä on heikot käsivoimat tai käyttäjä ei yllä varpasiin. Apuvälineen kahvat ovat 32 cm pitkät.

SKU: 186900041

Tuote: Umpikärkisten tukisukkien pukemisen apuväline

Koko- ja tilaustiedot:

Lisätiedot:



Käyttöohjeet:

1. Pujota umpikärkinen tukisukka kehikon ympärille niin, että kehikon ulkopuolelle jäävä osuus on nurin päin.
2. Tee sukan taitos niin pitkälle, että kantapääosa tulee kehikon reunalle.
3. Pujota jalka kehikon välistä sukan jalkateräosaan.
4. Vedä kehikkoa ylöspäin pidemmistä kahvoista.
5. Ota apuväline pois jalasta ja viimeistele tukisukkien pukeminen käsin

Englanninkielisen video-ohjeen voit katsoa [tästä](#).

Myymälähinta: 55

Toimitusaika: varastotuote