



## NOVAPED SPORT -VALMISTUKIPOHJALLISET



**91,00 €**

### Käyttökohteet:

- Urheilujalkineet, kävelykenkä / -lenkkari ja työjalkine

### Käyttöaiheet:

- Jalan pitkittäisholvin löysyys / madaltuma (lattajalka)
- Jalan ylipronaatio
- Poikittaisen jalkaholvin (jalkapöydän) löysyys / madaltuma
- Päkiävaivat mm mortonin syndrooma
- Plantaarifaskiitti
- Akillesvaivat
- Polvikipu (polven etuosan ongelmat)

**SKU:** 399876200

**Tuote:** Laadukas valmistukipohjallinen, pari

### Koko- ja tilaustiedot:

Valitse koko kengän koon mukaan.

- Varastossa koot 35-47
- Tilaamalla koot 48-53 ([tilaus@turuntukikohta.fi](mailto:tilaus@turuntukikohta.fi))

### Lisätiedot:

### Ominaisuudet:





- Tukee jalkaa ja jalkaterää (jalan pitkittäis- ja poikittaisjalkaholveja)
- Jakaa painetta jalkapohjassa tasaisemmin ja antaa lisäpehmustetta kantapäälle ja päkiälle (metatarsaaliluiden päät)
- Pohjallisissa on kolme vahvuutta riippuen kengän koosta
- Saatavana myös kapeana mallina ([tilaus@turuntukikohta.fi](mailto:tilaus@turuntukikohta.fi))

### **Sovitus:**

Mikäli pohjallinen on liian suuri kenkääsi, tee seuraavasti:

1. Aseta tukipohjallinen ja kengän oma pohjallinen tarkasti päällekkäin. Pohjallisten kantapää on tarkasti päällystyksen.
2. Käytä kengän oman pohjallisen kärkeä mallina ja merkkää kynällä viiva tukipohjalliseen sen mukaisesti.
3. Leikkaa tukipohjallisen kärjestä ja sivuilta ylimääräinen pituus ja leveys pois.

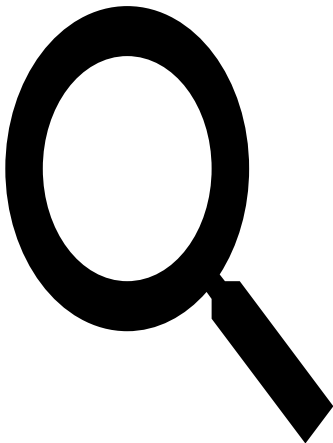

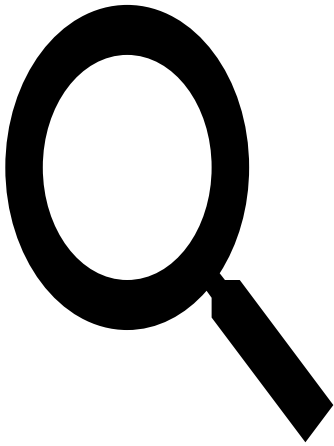

**Tuotemerkki:** Schein / Össur

**Myymälähinta:** 91

**Toimitusaika:** varastotuote

## KUVAT

