

TONUS 405 -KÄDEN JA RANTEEN ANTISPASTILASTA



~~193,00 €~~
173,70 €

- Tuote on suunniteltu vähentämään lihasjänneyttä ja tukemaan käden asentoa potilailla, joilla esiintyy aivoverenkiertohäiriön, aivohalvauksen, multippeliskleroosin, selkäydinvamman tai muun syyn aiheuttamaa liiallista lihasjänneyttä eli spastisuutta.

SKU: 09TON405

Tuote: Lasta spastisuuden vähentämiseksi

Koko- ja tilaustiedot:

Mitta määritetty kämmenen leveydellä MCP-nivelten tasolta. Vasen ja oikea puoli erikseen.

Tuotekoodi	Koko	Kämmenen leveys
09TON405-P	Lapset/geriatria	45-90 mm
09TON405-S	Standardi	90-130 mm
09TON405-X	Extra Pitkä	90 -130 mm

Lisätiedot:**Edut ja ominaisuudet:****• Toimintaperiaate:**

- Mediroyalin Tonus-lasta pitää käden mahdollisimman hyvässä asennossa samalla, kun sen ilmalla täytettävä tyyny ojentaa rannetta dynaamisesti juuri potilaalle sopivalla tavalla.
- Tonus-lastalla haetaan hyvän asennon lisäksi pitkäaikaista submaksimaalista venytystä ranteen ja sormien kireille fleksori-jänteille (koukistavat jänteet)
- Tonus-lastan säädetään aina yksilöllisesti. Sopiva asento löytyy arvioimalla potilaan ranteen ja sormien maksimaalinen ojennus (ekstensio) ja säätämällä lastan asento ja ilmatyynyn täyttö niin, että tuki käyttökuntoon asennettuna luo ranteen ja sormien fleksoreille kevyen jatkuvan venytyksen.
 - Huomaa että maksimaalinen venytys ja ojennus yleensä pahentavat spastisuutta, joten hae potilaalle paras, submaksimaalinen venytysasento
- Tonus-lastan runko on alumiinia ja se on helppo muotoilla/taivuttaa pöydän reunaa vasten
- Kämmentä vasten tuleva ilmatyyny tukee rystysiä eli sormien tyviniveliä hyvään asentoon ja samalla ojentaa hellästi sormien keski- ja kärkiniveliä.
- Tonus-lastaa puetaan päälle ilmatyyny tyhjänä. Kun tuki on hyvin paikallaan, ilmatyynyä täytetään 2-3 pumppauksella mukana tulevan pumpun avulla
- Lue lisää [käyttöohjeista](#)

• Käyttöaika:

- Paras vaikutus saavutetaan, kun lastaa käytetään 1–2 tuntia kerrallaan. Käyttöaika on parempi jakaa 1–2 tunnin jaksoihin 2–3 kertaa päivässä kuin käyttää lastaa yhtäjaksoisesti 4–6 tunnin ajan.
- Lastan koko vaikutus näkyy 3–6 kuukauden jatkuvan käytön jälkeen.
- Yritä sovittaa käyttö potilaan normaaliin päivärytmiin, esimerkiksi aterioiden ja muiden päivittäisten toimien väliin. Tonus-lastaa sopii erityisen hyvin käytettäväksi silloin, kun potilas tekee jotakin, joka yleensä lisää spastisuutta, kuten kävelyharjoitteiden aikana.

• Vaikutus:

- Tonus-lastan teho perustuu koukistajajänteiden jatkuvaan, tasaiseen venytykseen ja sitä kautta saavutettavan, spastisuutta madaltavan, refleksikaaren yliherkkyyden vähenemiseen. Jatkuvan 3-6 kuukauden hoidon jälkeen keho ei enää reagoi yhtä helposti spastisuutta aiheuttaviin ärsykkeisiin.
- Samalla Tonus-lastaa pitää käden oikeassa asennossa ylläpitäen sen passiivista liikerataa ja estää paineen tunnetta.

• Ominaisuuksia:

- Hyvin pehmustettu runko
- Ilmatyynyn malli takaa hyvän peukalo-otteen (kuva 4)
- Päällinen on hengittävä, kosteutta säätelevä ja painetta tasaava
- Päällinen on konepestävä 60 asteessa

TONUS-käsilastaan on saatavilla myös lisäosia, kuten [sormierottelija](#). TONUS-käsilastaan on myös helppo lisätä yksilöllisiä ominaisuuksia [NRX Strapin](#) avulla.



Tuotemerkki: Mediroyal

Myymälähinta: 193

Toimitusaika: varastotuote

KUVAT

