



ULNARIS KYYNÄRORTOOSI, MUSTA



117,00 €

Käyttöaiheet:

- Kynärhermon pinnetila ts. Ulnaris-hermon ahtauma
- Cubital tunnel -syndrooma
- Murtuman jälkeinen hoito

SKU: 09MR02250

Tuote: Kynärortoosi erityisesti kynärhermopinteen (nervus ulnaris) hoitoon

Koko- ja tilaustiedot:

Koko määräytyy kyynärpään ympärysmitan mukaan.

Koko	Kyynärpään ympäryys
XS	16-20 cm
S/M	20-25 cm
L/XL	25-31 cm



XXL	31-38 cm
-----	----------

HUOM! Osa tuotepaketeista sisältää vanhan mittataulukon (S-L).

Lisätiedot:

Edut ja ominaisuudet:

- Kaksi eri kyynärnivelen fleksiota estävää lastavaihtoehtoa:
 - alumiinilasta
 - lämpömuovattava muovilasta
- Materiaalina hengittävä TriTex-materiaali ja kyynärtaipeessa pehmeyttä tuova Soft-Tex materiaali
- Pesuohje: konepesu 40 asteessa
- Väri: musta
- Puolieroton

Tuotemerkki: Mediroyal

Käyttöohjeet:

1. Valitse sopiva koko kokotaulukon perusteella
2. Valitse tilanteeseen paremmin sopiva lastavaihtoehto: muovi- tai alumiinilastallinen tuki
 - Alumiinilasta: taivuta lasta sopivaan asentoon ja pujota se tuessa olevaan taskuun. Varmista, että lasta on kokonaan taskussa.
 - Muovilasta: lämmitä muovia kuumalla vedellä (75-80 astetta). Muovin pehmenee yleensä alle minuutissa. Kohdista muovilasta kyynärpään sisäpuolelle ja muotoile se sopivaksi. Anna lastan jäähtyä ja pujota se takaisin tuessa olevaan taskuun.
3. Avaa tukisiteen tarrat
4. Laita side kyynärpään ympäri ja sulje tarranauhat. Mikäli käytät tukea yöllä, jätä tarranauhoja hieman löysälle

Myymälähinta: 117

Toimitusaika: varastotuote