

## ULNARIS KYYNÄRORTTOOSI, MUSTA



~~116,00 €~~  
**104,40 €**

### Käyttöaiheet:

- Kyynärhermon pinnetila ts. Ulnaris-hermon ahtauma
- Cubital tunnel -syndrooma
- Murtuman jälkeinen hoito

**SKU:** 09MR02250

**Tuote:** Kyynärortoosi erityisesti kyynärhermopinteen (nervus ulnaris) hoitoon

### Koko- ja tilaustiedot:

Koko määräytyy kyynärpään ympärysmittan mukaan.

Koko	Kyynärpään ympäryys
XS	16-20 cm
S/M	20-25 cm
L/XL	25-31 cm



XXL	31-38 cm
-----	----------

### Lisätiedot:

### Edut ja ominaisuudet:

- Kaksi eri kyynärnivelen fleksiota estävää lastavaihtoehtoa:
  - alumiinilasta
  - lämpömuovattava muovilasta
- Materiaalina hengittävä TriTex-materiaali ja kyynärtaipeessa pehmeyttä tuova Soft-Tex materiaali
- Pesuohje: konepesu 40 asteessa
- Väri: musta
- Puolieroton

**Tuotemerkki:** Mediroyal

### Käyttöohjeet:

1. Valitse sopiva koko kokotaulukon perusteella
2. Valitse tilanteeseen paremmin sopiva lastavaihtoehto: muovi- tai alumiinilastallinen tuki
  - Alumiinilasta: taivuta lasta sopivaan asentoon ja pujota se tuessa olevaan taskuun. Varmista, että lasta on kokonaan taskussa.
  - Muovilasta: lämmitä muovia kuumalla vedellä (75-80 astetta). Muovin pehmenee yleensä alle minuutissa. Kohdista muovilasta kyynärpäähän sisäpuolelle ja muotoile se sopivaksi. Anna lastan jäähtyä ja pujota se takaisin tuessa olevaan taskuun.
3. Avaa tukisiteen tarrat
4. Laita side kyynärpäähän ympäri ja sulje tarranauhat. Mikäli käytät tukea yöllä, jätä tarranauhoja hieman löysälle

**Myymälähinta:** 116

**Toimitusaika:** varastotuote