

1180 Soft Collar - Pehmeä niskatuki

Pehmeä pehmustettu niskatuki

Indikaatiot

Niskaongelmat (degeneratiiviset tai posttraumaattiset) niskanikaman tyrä, niskarangan jännitystilat tai krampit, jännityspäänsärky.

Toimintamekanismi

Tukee niska-alueen pehmytkudoksia, lämmittää ja parantaa asentotuntoa, rajoittaa hieman niskan liikettä kaikkiin suuntiin.

Ominaisuudet

Hengittävää mikrokuitumateriaalia, jämääkkä vaahtomuovipehmuste

Käyttöohjeet

Aseta tuki kaulan ympärille anatomisesti. Kiinnitä tarranauhat. Tarkista että tuki ei paina ihoa mistään kohdasta eikä aiheuta kipua.

Noudata tuen määränneen ammattihenkilön ohjeita hoitoajasta ja -tavoista.

Tärkeää tietoa

Tätä tukea tulee käyttää vain lääkärin, fysioterapeutin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen määräyksestä. Jos olet allerginen jollekin tuotteen etiketissä mainitulle valmistusmateriaalille kysy neuvoa hoidon määränneeltä ammattilaiselta. Tätä tuotetta tulee käyttää vain tarkoitettuun hoitomuotoon. Älä käytä sitä muuhun hoitoon, koska väärä käyttö voi huonontaa tuotteen tarkoitettua toimintaa. Jos tuotteen käytössä on ongelmia tai kysyttävää, käänny hoidon määränneen ammattilaisen puoleen.

1180 Soft Collar

Mjukt cervikalt nackstöd av skumgummi

Indikationer

Cervikalt syndrom (degenerativt, postraumatiskt), cervikalt diskbråck, nackspärr, luxation och distorsion av leder och ligament i hals och halskotpelare, spänningshuvudvärk.

Funktion

Stödjer cervikalt mjukvävnad, värmar upp och påverkar det proprioceptiva systemet, begränsar något cervikala rörelser i alla riktningar.

Egenskaper

Luftgenomsläppande tyg av microfiber, skumgummi av hög täthet.

Bruksanvisning

Sätt nackstödet runt halsen anatomiskt. Knäpp samtliga kardborrband. Verifiera att det inte finns några tryckpunkter som kan förorsaka smärta.

Rådgör med din ordinator gällande vårdperioden och omständigheter.

Viktig information

Denna produkt skall förskrivas av en legitimerad läkare, fysioterapeut eller annan övrigt utbildad hälsovårdspersonal. Om du är allergisk mot material som produkten innehåller (se märkning på produkten), rådgör med din ordinator. Denna produkt skall användas endast till föreslagna indikationer. Undvik att använda produkten till annat för att inte påverka effekten av produkten. Har du problem med användning av produkten, rådgör med din ordinator.