



Hyvä asiakkaamme,

Kiitos että valitsit Dorsolite ryhmittuen. Tuessa on vain yksi kokoluokka, joten sen yksilöllinen istuvuus vaatii hieman alkuasetuksia. Tässä lyhyet ohjeet siihen:

1. Avaa hartiaremmit selkäosan kaksipuolisesta tarrasta ja lyhennä ne saksilla niin, että hartiapehmusteet osuvat hyvin hartioiden eteen kainalon yläpuolella.
2. Pue tuki paikalleen niin että hartiaremmit ovat oikeilla kohdilla. Kiinnitä vatsaremmit kiinni edestä pikaklipsillä.
3. Kiristä vatsaremmit sopivalle kireydelle. Sopiva kireys löytyy, kun haet itsellesi hyvän ryhdin ja kiristät remmit siinä ihonmyötäisesti, mutta ei kireälle. Näin tuki alkaa antamaan tukea silloin kun ryhti alkaa ”pettää”
4. Lyhennä vatsaremmit sivuilta avaamalla kaksipuoleinen tarra ja leikkaamalla ne sopivan mittaiseksi.

Kysy tarvittaessa apua sovitukseen Tukikohdasta!

Turun Tukikohta Oy
Puutarhakatu 17
20100 TURKU

Puh: 020 761 9030
info@turuntukikohta.fi
www.turuntukikohta.fi