


# VACOped tyhjiöortoosin käyttöohje

## 1 Jalan asettaminen ortoosiin

Avaa tyhjiöelementin venttiili (katso venttiilin toiminnot).

Aseta jalka tekstiilipäällysteiseen tukipehmusteeseen. Sulje pehmuste tarranauhoilla. Laita jalka ortoosin runkosaan.

Laita ortoosin etuosa paikalleen ja kiinnitä tarranauhat kuvan osoittamassa järjestyksessä.

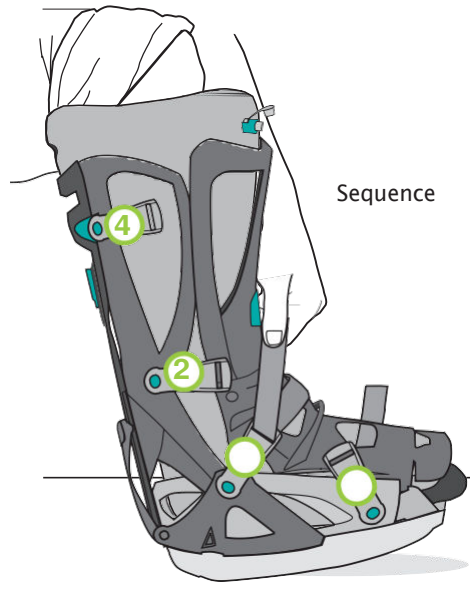

## 2 Tukipehmusteen jäykistäminen

Paina käsipumpun suulake tiukasti venttiiliputken päähän. Paina käsipumppua kunnes se jää

60MMWLLLOLNML

