




Pukeminen
+
Riisuminen

Monikäyttöinen apuväline avokärkisten kompressiosukkien- ja sukkahousujen pukemiseen ja riisumiseen.

Ainutlaatuisen liukumisominaisuuden ansiosta Arion Sim-Slide® tekee kompressiotuotteiden käytöstä helpompaa vähentäen päivittäistä stressiä, jota kompressiotuotteiden pukeminen ja riisuminen saattavat aiheuttaa. Tutkimus* osoittaa, että Arionin apuvälineitä käytettäessä käyttäjien tyytyväisyys kasvaa, kun lääkinällisten kompressiotuotteiden pukeminen ja riisuminen onnistuvat paremmin. Tämä edistää käyttäjien positiivista käyttökokemusta ja parantaa siten hoidon tehokkuutta..

*K. Sippel, B. Seifert, J. Hafner, 2014 - Elderly people with severe chronic venous insufficiency

Ennen kuin aloitat:

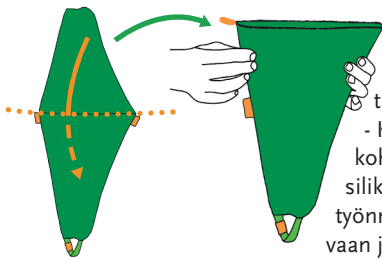


Varmista, että tuote on valmis käytettäväksi:

- Taita ylimääräinen materiaali "vihreään taskuun"
- Kohdista taitoksen raja oranssin merkkien kohdalle Mikäli kompressiotuotteessasi on silikonireunus, taita se ulospäin. Tärkeää! Älä työnnä jalkaa Arion Sim-Sliden® pätyyn asti, vaan jätä päähän 2-3 sormen levyinen tila.







Tärkeää! Älä työnnä jalkaa Magnide® pätyyn asti, jätä päähän hieman tilaa









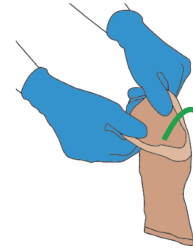


Mikäli kompressiotuotteessasi on silikonireuna, käännä se ulospäin

Pukemisohteet

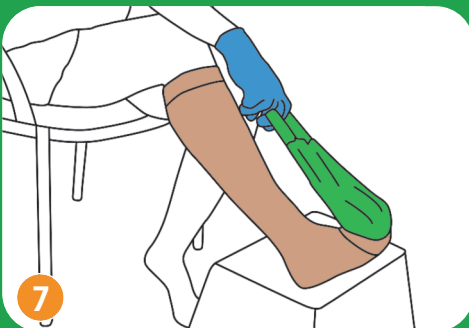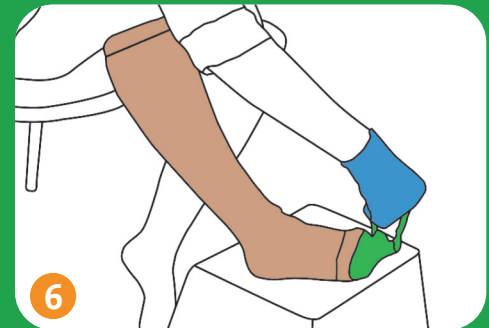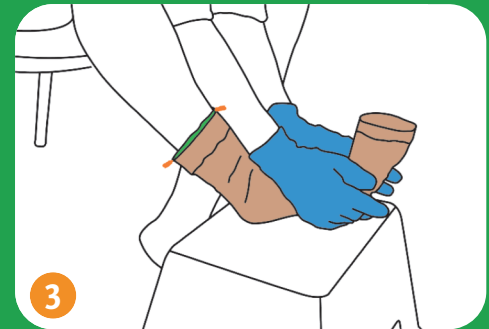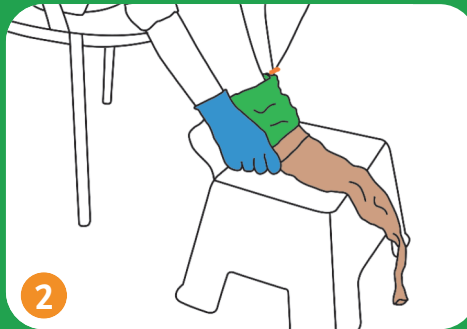

Riisumisen ohjeet

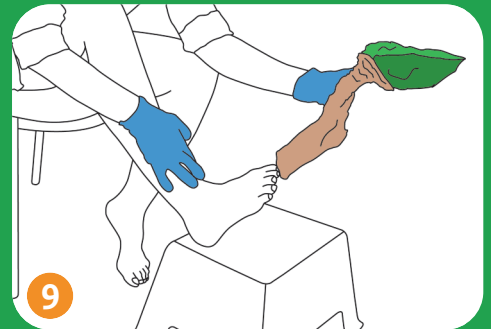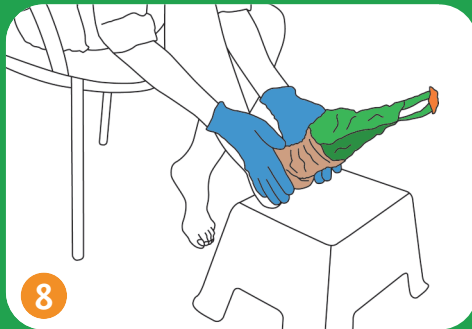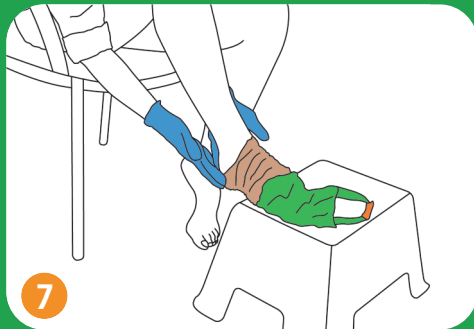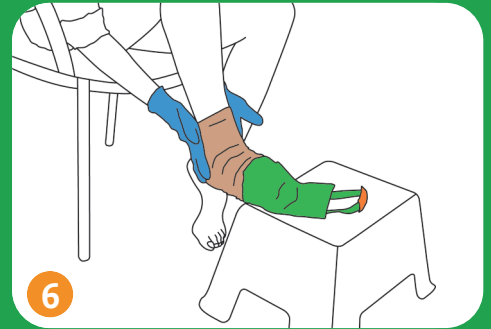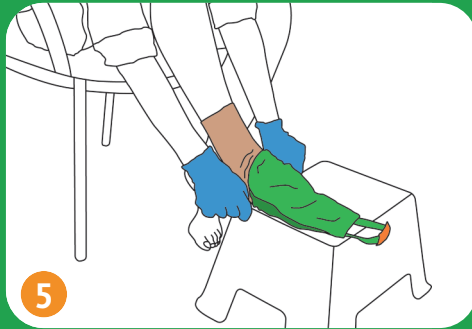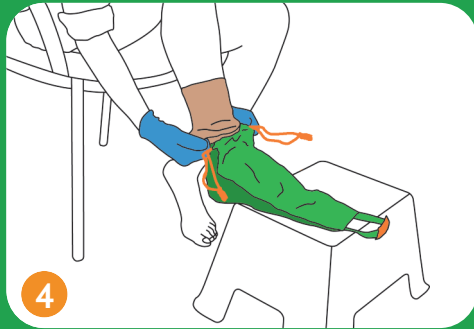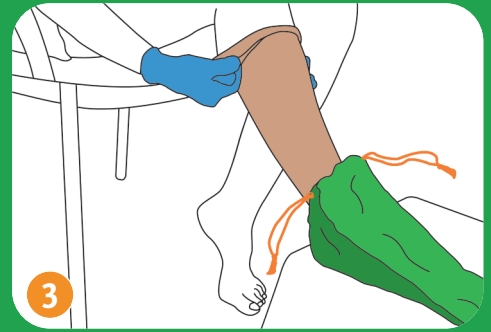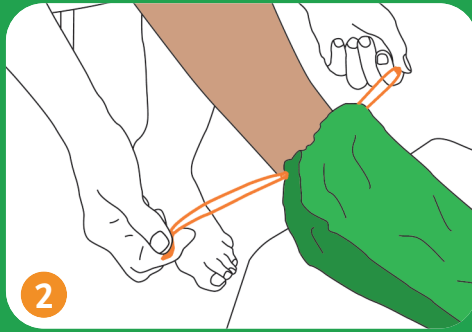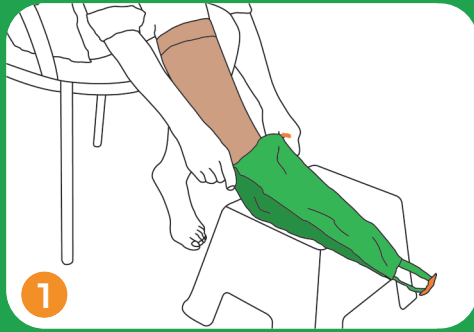

Kompressioterapia on tehty helpommaksi

Arionin apuvälineet kompressiotuotteiden pukemiseen ja riisumiseen

Helppo käyttää

- Minimoi kitkan kompressiotuotteen ja ihon väliltä
- Vähentää kompressiotuotteiden käyttäjän ja hänen apuna olevan henkilön fyysistä rasitusta
- Parantaa kompressiotuotteita käyttävän henkilön itsenäisyyttä

Turvallista käyttää

- Vähentää iho-ongelmien riskiä; erityisen hyödyllinen herkkäihoisilla ja jalkahaavojen yhteydessä
- Edistää kompressiotuotteiden käyttöikää suojaamalla sukkaa kynsiltä ja sormilta
- Auttaa säilyttämään sukan kompression pidempään ja ehkäisee kompressiotuotteen liialliselta venymiseltä

Yksinkertaiset ratkaisut

- Apuväline kaikenikäisille kompressiotuotteille: sukille, sukkahousuille, hihoille ja hanskoille
- Suunniteltu erimuotoisille ja -kokoisille raajoille
- Tukee kompressiohoidon sujuvuutta

Arion Sim-Slide®

Koot

Tuote- koodi	Koko	Kengän koko	Kengän koko	
			Naiset	Miehet
EoSLo1	Small	≤ 34 - 36	≤ 1,5-3,5	≤ 2,5-4
EoSLo2	Medium	37 - 38,5	4 - 5,5	4,5 - 6
EoSLo3	Large	39 - 41	6 - 7	6,5 - 7,5
EoSLo4	X-Large	≥ 42	≥ 7,5	≥ 8

Mikäli tarvitset muita kokoja, Arion pystyy yksilöimään tuotteita tarpeidesi mukaan.