

Easy-Slide ARM

Skannaa QR-koodi
katsoaksesi ohjevideon
(Englanninkielinen teksti)




Pukeminen




Käyttäjäturvallinen apuväline lääkinällisten kompressiohihojen pukemiseen

Arion Easy-Slide Arm helpottaa ja nopeuttaa kompressiohihojen pukemista ainutlaatuisen liukumisominaisuuden ansiosta. Tämä yksinkertainen pukemistyyli vaatii erittäin vähän fyysistä ponnistelua kompressiohihan käyttäjältä tai hänen avustajaltaan. Yksinkertaisuudessaan: laita apuväline käteen ja liu'uta kompressiohihasi käsivarren päälle apuvälineen yli. Arion Easy-Slide Arm auttaa kompressiohihan käyttäjää nauttimaan kompressiohihan käytöstä, kun pukeminen onnistuu itsenäisesti.

Ennen kuin aloitat:



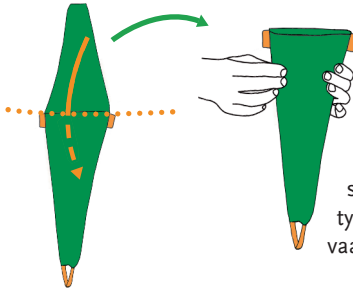


Varmista, että tuote on valmis käytettäväksi:
- Taita ylimääräinen materiaali "vihreään taskuun"
- Kohdista taitoksen raja oranssien merkkien kohdalle Mikäli kompressiotuotteessasi on silikonireunus, taita se ulospäin. Tärkeää! Älä työnnä jalkaa Arion Sim-Sliden® päätyyn asti, vaan jätä päähän 2-3 sormen levyinen tila.

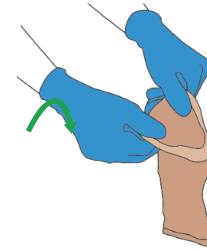

Mikäli kompressiotuotteessasi on silikonireuna, käännä se ulospäin

Pukemishjeet

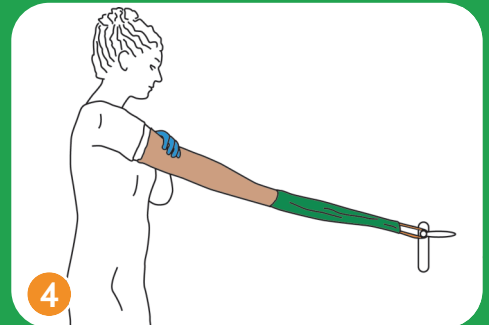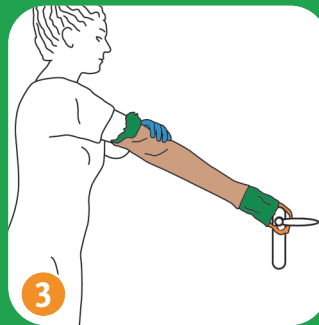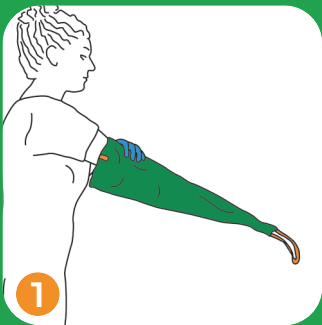

Ovenkahvan avulla Easy-Slide Arm on helpompi vetää kompressio hihan alta pois

Kompressioterapia on tehty helpommaksi

Arionin apuvälineet kompressiotuotteiden pukemiseen ja riisumiseen

Helppo käyttää

- Minimoi kitkan kompressiotuotteen ja ihon väliltä
- Vähentää kompressiotuotteiden käyttäjän ja hänen apuna olevan henkilön fyysistä rasitusta
- Parantaa kompressiotuotteita käyttävän henkilön itsenäisyyttä

Turvallista käyttää

- Vähentää iho-ongelmien riskiä; erityisen hyödyllinen herkkäihoisilla ja jalkahaavojen yhteydessä
- Edistää kompressiotuotteiden käyttöä suojaamalla sukkaa kynsiltä ja sormilta
- Auttaa säilyttämään sukan kompression pidempään ja ehkäisee kompressiotuotteen liialliselta venymiseltä

Yksinkertaiset ratkaisut

- Apuväline kaikenikäisille kompressiotuotteille: sukille, sukkahousuille, hihoille ja hanskoille
- Suunniteltu erimuotoisille ja -kokoisille raajoille
- Tukee kompressiohoidon sujuvuutta

Arion Easy-Slide Arm

Koot

Tuote-koodi	Koko	Pituus EU	Pituus UK
E01505	Small	55.5 cm	22 inch
E01506	Medium	62.5 cm	25 inch

Mikäli tarvitset muita kokoja, Arion pystyy yksilöimään tuotteita tarpeidesi mukaan.