




Pukeminen




## Umpikärkisille lääkinnällisille tukisukille tarkoitettu pukemisen apuväline, jossa on ainutlaatuinen magneettinen kiinnitysmekanismi

Arion Magnide® tarjoaa helpon, turvallisen ja yksinkertaisen ratkaisun kaikille umpikärkisten lääkinnällisten tukisukkien käyttäjille ja heidän apuna oleville. Tuotteen ainutlaatuisen liukuominaisuuden ja magneettisen kiinnitysmekanismin ansiosta voit nyt pukea ja riisua umpikärkiset kompressiotuotteet helposti. Arion Magnide® on laaja kokovalikoima, josta löytyy sopiva koko erikokoisiin jalkoihin. Tämä on erityisen tärkeää niille potilaille, jotka kärsivät alaraajojen turvotuksesta.

### Ennen pukemisen aloittamista:






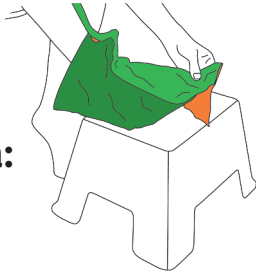


Tärkeää! Älä työnnä jalkaa Magnide® päätyn asti, jätä päähän hieman tilaa

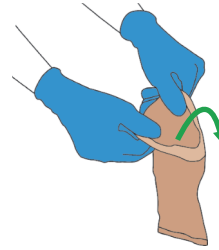


Mikäli kompressiotuotteessasi on silikonireuna, käännä se ulospäin


### Pukemishjeet

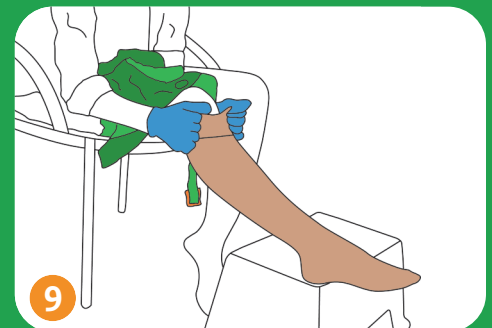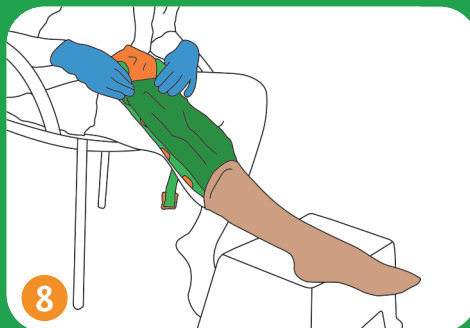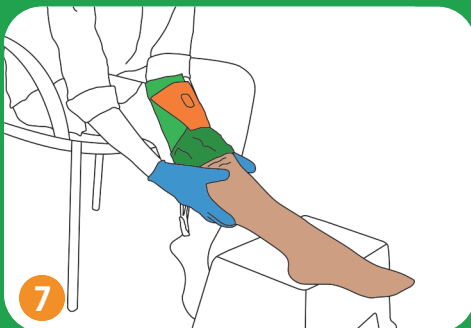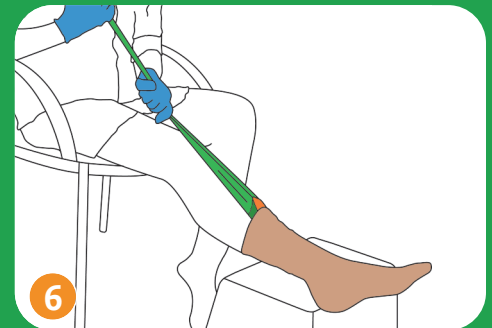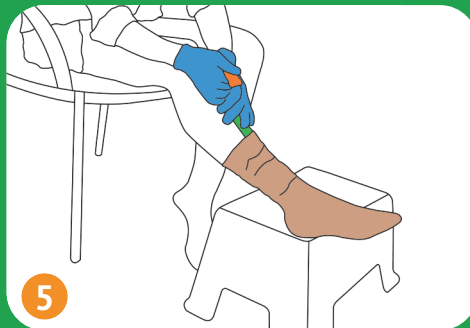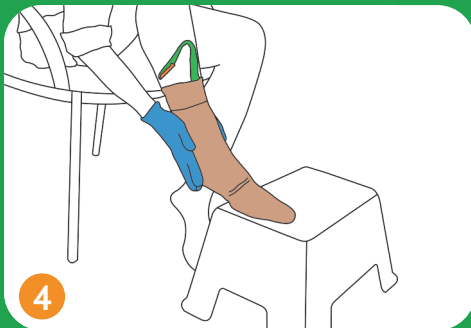

1 Kiinnitä lenkin yläosa Magnide® yläosaan magneetin avulla

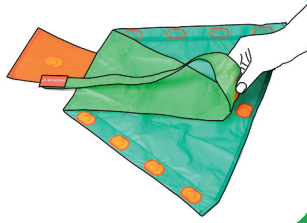


2 Käännä Magnide® ja aseta se tasaiselle alustalle

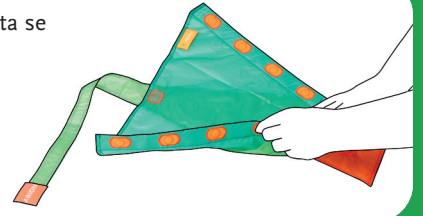

3 Taita molemmat vihreät sivut keskelle. Oranssien magneettien tulee olla kohdakkain ja osua toisiinsa.



4 Sulje oranssi läppä (lähellä varpaita) Magnide® yli siten, että magneetit osuvat yhteen

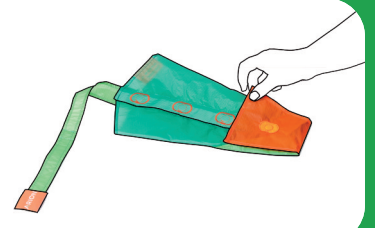

## Kompressioterapia on tehty helpommaksi

### Arionin apuvälineet kompressiotuotteiden pukemiseen ja riisumiseen

#### Helppo käyttää

- Minimoi kitkan kompressiotuotteen ja ihon väliltä
- Vähentää kompressiotuotteiden käyttäjän ja hänen apuna olevan henkilön fyysistä rasitusta
- Parantaa kompressiotuotteita käyttävän henkilön itsenäisyyttä

#### Turvallista käyttää

- Vähentää iho-ongelmien riskiä; erityisen hyödyllinen herkkäihoisilla ja jalkahaavojen yhteydessä
- Edistää kompressiotuotteiden käyttöikää suojaamalla sukkaa kynsiltä ja sormilta
- Auttaa säilyttämään sukan kompression pidempään ja ehkäisee kompressiotuotteen liialliselta venymiseltä

#### Yksinkertaiset ratkaisut

- Apuväline kaikenikäisille kompressiotuotteille: sukille, sukkahousuille, hihoille ja hanskoille
- Suunniteltu erimuotoisille ja -kokoisille raajoille
- Tukee kompressiohoidon sujuvuutta

### Arion Magnide®

#### Koot

Tuote-koodi	Koko	Kengän koko	Kengän koko	
			Naiset	Miehet
E01513	Medium	≤ 38	≤ 5,5	≤ 6
E01514	Large	39 - 43	6 - 8	6,5 - 9
E01515	X-Large	≥ 44	≥ 9	≥ 9,5

XL-koko sopii myös erityisleveään jalkaan (ympärysmitta 28cm asti)



Mikäli tarvitset muita kokoja, Arion pystyy yksilöimään tuotteita tarpeidesi mukaan.