



Pukeminen

Skannaa QR-koodi katsoaksesi ohjevideon
(Englanninkielinen teksti)



(Reisimittaiset
tukisukat)




(Polvimittaiset
tukisukat)

Ainutlaatuinen lisäapuväline lääkinnällisten tukisukkien ja -sukkahousujen pukemiseen ja riisumiseen. Suojaa jalkaa ja vähentää kitkaa nilkan yläpuolella.


Arion SlideX tarjoaa helpon, turvallisen ja yksinkertaisen ratkaisun kompressiotuotteiden pukemiseen ja riisumiseen esimerkiksi herkän ihon, avoimien haavojen, säärihaavojen tai säären keskimääräistä suuremman koon (esim. lymfedeeman takia) yhteydessä.

Pukemisen ja riisumisen aikana Arion SlideX vähentää kitkaa ja kipua nilkasta polveen (reisimittaisen sukien yhteydessä myös polven yläpuolelta). Arion SlideX on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä muiden Arion-tuotteiden kanssa kuten Easy-Slide, Sim-Slide®, Magnide® ja Magnide® 2in1:n.

Ennen kuin aloitat:





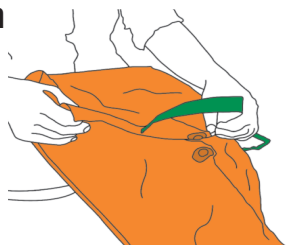


Luo kaksinkertainen kerros taivuttamalla SlideX:n yläosa ja kiinnittämällä se magneeteilla

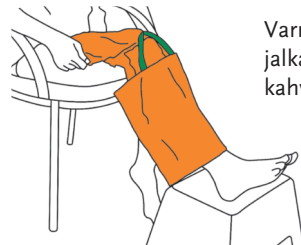


Varmista, että SlideX on asetettu jalkaan taitettu pää alaspäin ja kahva ylöspäin.


Pukemishjeet (esitetty yhdessä Magnide® kanssa)

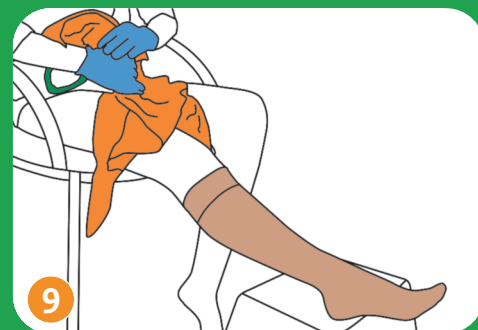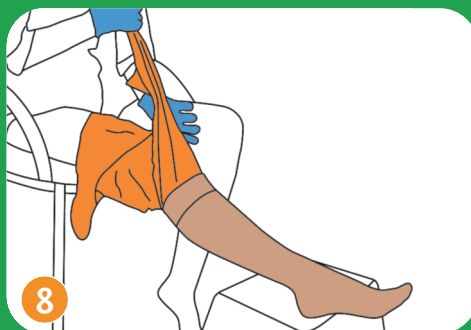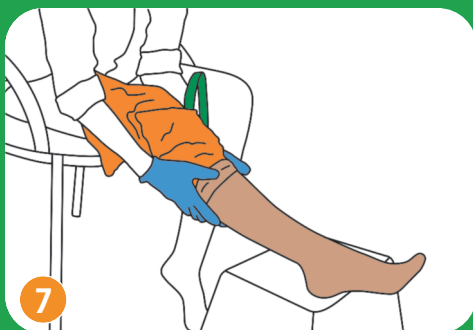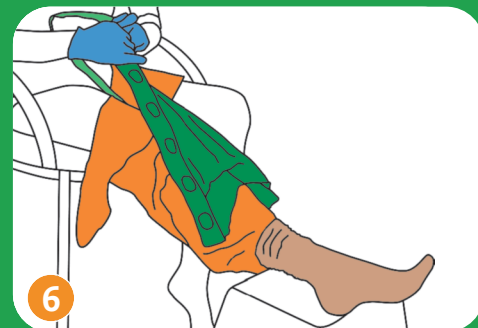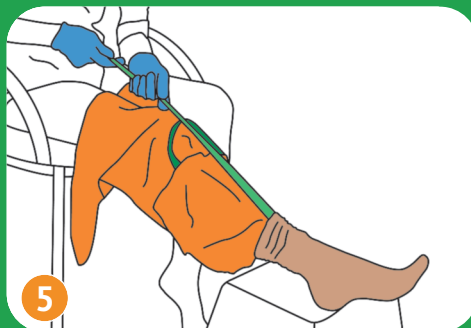

varpaille








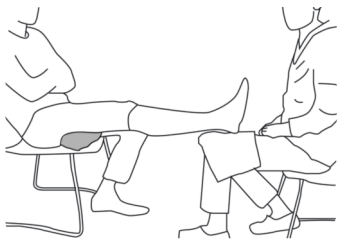


Varmista, että istut potilaan edessä siten, että potilaan jalka on reitesesi päällä

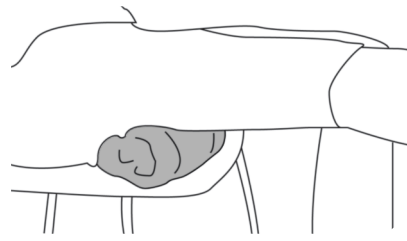

Vältäksesi ylimääräistä painetta, aseta pyyherulla potilaan reiden alle

Pukemisohjeet (esitetty yhdessä Easy-Slide kanssa)

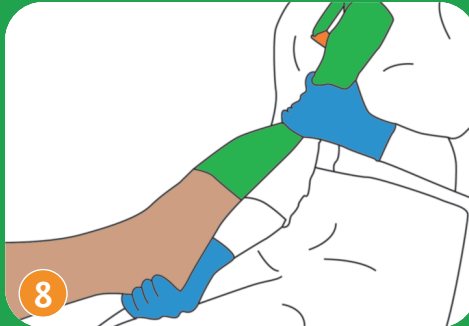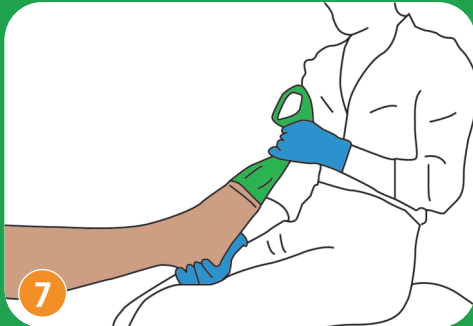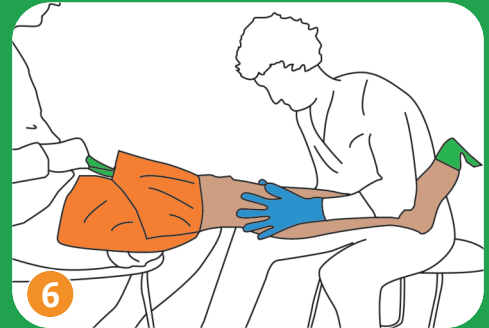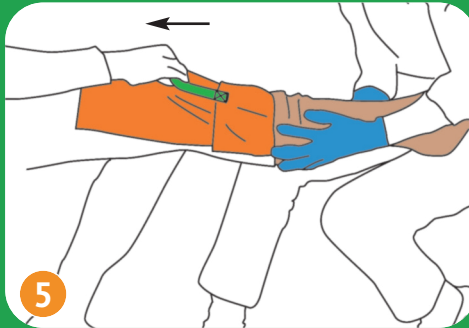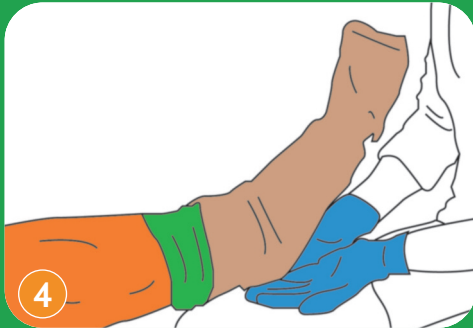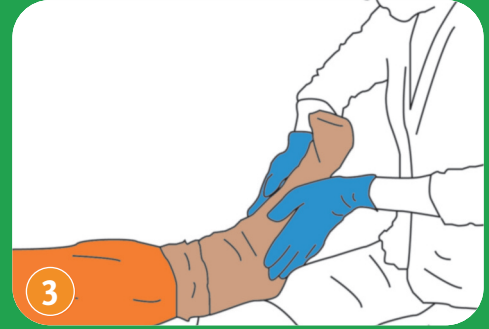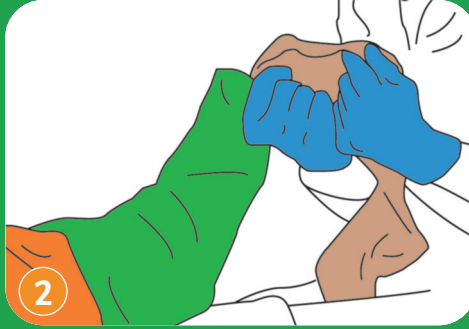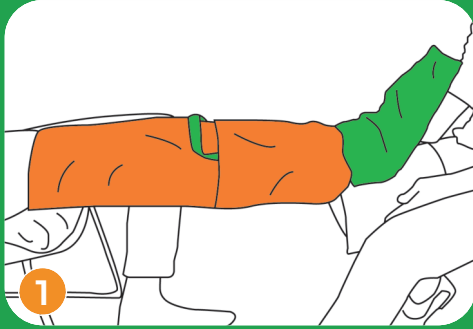

Arionin apuvälineet kompressiotuotteiden pukemiseen ja riisumiseen

Helppo käyttää

- Minimoi kitkan kompressiotuotteen ja ihon väliltä
- Vähentää kompressiotuotteiden käyttäjän ja hänen apuna olevan henkilön fyysistä rasitusta
- Parantaa kompressiotuotteita käyttävän henkilön itsenäisyyttä

Turvallista käyttää

- Vähentää iho-ongelmien riskiä; erityisen hyödyllinen herkkäihoisilla ja jalkahaavojen yhteydessä
- Edistää kompressiotuotteiden käyttöä suojaamalla sukkaa kynsiltä ja sormilta
- Auttaa säilyttämään sukan kompression pidempään ja ehkäisee kompressiotuotteen liialliselta venymiseltä

Yksinkertaiset ratkaisut

- Apuväline kaikenlaisille kompressiotuotteille: sukille, sukkahousuille, hihoille ja hanskoille
- Suunniteltu erimuotoisille ja -kokoisille raajoille
- Tukee kompressiohoidon sujuvuutta

Arion SlideX

Koot

Tuote-koodi	Koko	Tuotenumero Alaraajan ympärysmitta
E01520	Medium	≤ 40
E01521	Large	≤ 60
E01522	Extra large	≤ 100

*Koot L ja XL ovat pidempiä ja suojaavat jalkaa polven yläpuolelta: ne ovat sopiva vaihtoehto reisimittaiten tukisukkien ja tukisukkahousujen kanssa.