


Hallux Valgus Combo - pukemishoje



	Seite / Side	Größe / Size
	L/R	universal

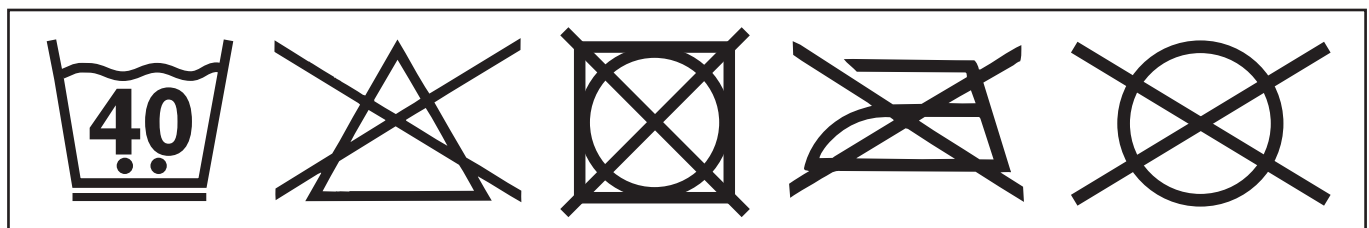

Material	PA, PES, EA, PUR, PCM
----------	-----------------------

Hallux Valgus Combo

- > Avaa kaikki tukisiteen tarrakiinnikkeet.
- > Potilas istuu tuolin etureunalla.

- 1) Vedä lenkki isovarpaan päälle (katso Kuva 1).
- 2) Vedä pidempi hihna viistoon jalkaterän alle ulkoreunaan päin ja vie se kantapään yli (katso Kuva 2).
- 3) Vie pidempi hihna kerran sääriluun ympäri (katso Kuva 3).
- 4) Vedä pidempi hihna isovarpaan suuntaan ja kiinnitä se tarrahihnalla lyhyeen hihnaan.
- 5) **Vaihtoehtoisesti:** lyhennä hihna halutun pituiseksi (katso Kuva 4).

4.2 Puhdistus

- 1) Sulje kaikki tarrakiinnikkeet.
- 2) Suositus: käytä pyykinpesupussia tai -verkkoa.
- 3) Pese tukiside **40 °C:n** lämpöisessä vedessä käyttäen tavallista kaupasta saatavissa olevaa hienopesuainetta. Älä käytä huuhteluainetta. Huuhtele hyvin.
- 4) Ripusta kuivumaan. Vältä suoraa lämpövaikutusta (esim. auringonsäteilyä, uunin tai lämpöpatterin lämpöä).