



mediroyal

Orthoses are our passion

# PROXI® DIP/PIP-sormilasta

DIP



PIP



## MR2701 · Proxi® DIP/PIP-sormilasta

Sormivammat ovat usein varsin ongelmallisia, sillä immobilisaatio häiritsee sormen toimintaa, mutta saattaa olla välttämätöntä paranemisprosessin kannalta. Uusi Mediroyal Proxi® DIP/PIP-sormilasta tarjoaa hyvän kompromissin matalaprofiilisuutta, tukea, tuentaa ja kompressiota. Sitä voidaan käyttää sekä sormien DIP- että PIP-nivelten tuentaan.

Proxi® DIP/PIP lasta on valmistettu laminoitusta molekyyli-modifioitusta lämpömuovista, joka voidaan muotoilla ilman kuumennusta. Lämpömuovi on laminoitu Neptune™-tekstiilimateriaalille, joka on ihoystävällistä ja hengittävää. Tuen yläpinta on laminoitua lenkkikangasta, johon tarra kiinnittyy kauttaaltaan. Tuen silmukkamuoto tekee tuen pukemisesta helppoa ja varmaa.

Tukea on saatavana kahdessa koossa ja pituudessa. Sormen ympäröimistä on säädettävissä.

**Käyttöaiheet:** DIP/PIP-nivelen trauman jälkeen, trigger finger, instabiliteetti, nivelen turvotus, sijoiltaanmenon tai reumaattisten tulehdusprosessien jälkeen.

Malli on suojattu seuraavilla rekisteröidyillä EU:n yhteisömalleilla; 009059181-0001 ja 009059181-0002

## Mittataulukko

Koko	1	2	
Ympärysmitta DIP/PIP	40–55 mm Ø	50–65 mm Ø	
Lastan pituus	30 mm	38 mm	

MR2702 · Proxi® Trigger Splint

Proxi® on Mediroyal Sweden AB:n tavaramerkki

**Tukikohta**  
Palveleva apuvälineliike

Mediroyal Nordic AB  
Box 7052 · Staffans väg 6B · SE-192 07 Sollentuna · Sweden · info@mediroyal.se · www.mediroyal.se

Turun Tukikohta Oy · www.turuntukikohta.fi · tilaus@turuntukikohta.fi · p.0207619030



mediroyal

Orthoses are our passion

# PROXI® Trigger Splint

– *Matalaprofilinen, säädettävä tuki*

## MR2702 · Proxi® Trigger Splint


Trigger Finger voi olla missä sormessa tahansa, mutta tyypillisin se on nimettömässä sormessa ja peukalossa. Vammassa sormi voi lukkiutua täysin koukistukseen. Kämmenalueella sormen tyvessä, voi tuntua arkuutta. Kipualueella tuntuu usein jänteessä kyhmy, joka vaikeuttaa jänteen liukumista jännetuppitunnelin sisällä. Tämä aiheuttaa sormen lukkiutumisen.

Osana hoitoa voidaan käyttää kipuja aiheuttavien liikkeiden välttämistä ja kortisoniruisketta. Tuesta voi olla apua jänteen kuormituksen vähentämisessä sekä karhentuneen jänteen osan pitämisessä tunnelissa.

Mediroyal Proxi® Trigger Splint on valmistettu molekyyli-modifioitun lämpömuovin yhdistelmästä, joka mahdollistaa muotoilun lämmittämättä sitä. Lämpömuovi on vahvistettu muovattavalla alumiiniosalla, joka mahdollistaa halutun muodon pysymisen tuotteen käytön aikana. Molemmat materiaalit on laminoitu Neptune™ tekstiiliin. Neptune on materiaalina hengittävä ja erittäin mukava käyttäjälle. Tuen ulkopinta on laminoitua kangasta, johon tarra kiinnittyy. Tuen silmukkamuoto helpottaa tuotteen pukemista. Lastaa pitää paikallaan NRX®-Strap PLUS-hihna, joka on materiaalina joustamaton ja sen sisäpinnalla on kitkapinta.

### Mittataulukko

Koko	S	M	L
Alustan pituus	60 mm	70 mm	75 mm

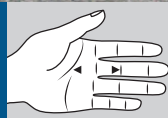

– Huomaa, että alustan pituus tulee mitata 5 mm PIP-liitoksen alapuolelta volaan.



Tuotetta voidaan myös muotoilla uudelleen käyttäen kuumaa vettä. Uudelleen muotoilu on erityisen hyödyllistä, kun tukea käytetään peukaloille. Haluttu fleksio saadaan taivuttamalla metalliosaa, avaamalla tarranauha ja upottamalla koko tuki kuumaan veteen 75–80 °C asteeseen. Kun tuki on pehmeä, nosta se pyyhkeen päälle, jolloin ylimääräinen vesi imeytyy siihen. Sulje tarranauha ja aseta tuki peukalon tai sormen päälle. Voit tarvittaessa muokata tuotetta ja metallilastaa. Anna tuotteen jäähtyä kunnolla.



Tukea on saatavana kolmena eri kokona ja pituutena. Sormen ympäröimä on säädettävissä.

**Indikaatiot:** Trigger finger sormille 2–5, kuumalla vedellä muotoiltuna voi käyttää myös peukalolle.

Proxi® on Mediroyal Sweden AB:n tavaramerkki

MR2701 · Proxi® DIP/PIP-sormilasta