

## **PODIFER 60 tukipohjallisen KÄYTTÖOHJE**

### **ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA**

1. Poista alkuperäinen pohjallinen asiakkaan kengästä.
2. Aseta pohjallinen kenkään tarkastaen, että se on oikeassa asennossa, ja pyydä asiakasta kokeilemaan sitä.
3. Pohjalliseen voidaan tehdä muutoksia yksilöllisten tarpeiden mukaan. Etuosa voidaan muotoilla saksilla (käytä asiakkaan kengässä aikaisemmin olleita pohjallisia vertailuna). Pitkittäiskaarta tukevat kaarevat yksityiskohdat voidaan viilata vähitellen matalammaksi, samoin kuin pohjallisen ulkoreunalla olevia tuentoja. Ennen muutoksia on kuitenkin suositeltavaa pitää pohjallisia muutamien tuntien ajan seuraillen, tottuuko jalka tukimuotoihin.
4. Suosittelemme poistamaan pohjallisen kengästä käytön jälkeen, jotta se voi tuulettua.

### **JATKUVA KÄYTTÖ**

1. Aseta pohjallinen kenkään ja varmista, että se on oikeassa asennossa.
2. Suosittelemme poistamaan pohjallisen kengästä käytön jälkeen, jotta se voi kuivua.

### **VASTA-AIHEET**

Ei tunnettuja vasta-aiheita.

### **YHDENMUKAISUUSILMOITUS**

Valmistajana ORTHOSERVICE AG vakuuttaa, että tämä on luokan I lääkinnällinen laite, joka on valmistettu ja arvioitu Euroopan unionin asetuksen 2017/745 (MDR) mukaisesti. Nämä ohjeet on laadittu edellä mainitun asetuksen soveltamiseksi. Niiden tarkoituksena on varmistaa lääkinnällisen laitteen asianmukainen ja turvallinen käyttö.

### **HUOLTO**

Pesuohjeet: Pese käsin enintään 30 °C lämpötilassa neutraalilla saippualla; anna kuivua kaukana lämmönlähteistä. Älä hävitä tuotetta tai sen osia ympäristöön.

### **TURVALLISUUSOHJEET**

Suosittelimme, että laitteen aiheuttama paine ei kohdistu kehon osiin, joissa on haavoja, turvotusta tai paukumia. Jos olet epävarma siitä, miten laitetta käytetään, ota yhteys lääkäriin, fysioterapeuttiin tai apuvälineteknikkoon. Lue tuotetiedot etiketistä huolellisesti. Suosittelemme olemaan käyttämättä laitetta avotulen läheisyydessä. Älä käytä suorassa kosketuksessa avoimien haavojen kanssa.

### **VAROITUKSET**

On suositeltavaa, että laite, joka on suunniteltu alla olevien erityisten ohjeiden mukaisesti, määrätään lääkärin tai fysioterapeutin toimesta ja sovelletaan potilaan erityistarpeiden mukaisesti. Tehokkuuden, siedettävyyden ja oikean toiminnan varmistamiseksi sovellus on toteutettava suurimmalla huolellisuudella. Älä koskaan muuta lääkärin/fysioterapeutin/apuvälineteknikon tekemää säätöä. Valmistajan vastuu raukeaa

epäasianmukaisessa käytössä. Ortoosi on tehty ja tarkoitettu käytettäväksi vain yhden potilaan toimesta. Jos ortoosia käytetään epäasianmukaisesti, valmistaja ei ota vastuuta. Yliherkillä yksilöillä suora kosketus ihoon saattaa aiheuttaa punoitusta ja ärsytystä. Jos ilmenee kipua, turvotusta, paukumia tai muita haittavaikutuksia, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, ja erityisen vakavan haittatapahtuman sattuessa ilmoita tapahtumasta valmistajalle. Ortopedisen tuotteen tehokkuus taataan vain, kun kaikkia osia käytetään oikein.

Lisätietoja pohjallisen käytöstä voit kysyä:

**Turun Tukikohta OY**

[www.turuntukikohta.fi](http://www.turuntukikohta.fi)

puh: 0207619030

