



Arion Magnide®

Pukemisen apuväline lääkinällisille kompressiosukille, joissa on suljettu varvasosa

Tärkeitä tietoja luettavaksi ennen tuotteen käytön aloittamista:

- A.** Hyödyllisiä vinkkejä:
 - Käytä erityisiä luistamattomia käsineitä tuotetta käyttäessäsi. Näin saat parhaan mahdollisen otteen sukasta ja tarvitset vähemmän fyysistä voimaa.
 - Jos kompressiosukassa on silikonireuna, varmista, että käännät sen ulospäin.
- B.** Jos sinun on vaikea yltää varpaisi, aseta jalkasi matalan tuolin päälle, jotta et joudu kumartamaan liikaa.
- C.** Tärkeää! Älä työnnä jalkaa aivan Magnide® -apuvälineen päähän, vaan jätä kahden tai kolmen sormen verran tilaa varpaiden eteen.



Pukeminen

Pukemisohteet:

1. Laita Magnide® jalkaan (varmista, että varpaiden lähellä oleva oranssi läppä on taitettu hyvin taakse, jotta magneetit tarttuvat toisiinsa).
2. Vedä sukka Magnide® -apuvälineen päälle.
3. Liu'uta sukka jalan päälle ja varmista, että sukan kantapää on oikeassa paikassa.
4. Varmista, että vaaleanvihreä silmukka tulee ulos sukan yläosasta, jotta saat tartuttua siihen.
5. Poista Magnide® sukasta vetämällä vaaleanvihreästä silmukasta.

Katso video-ohjeemme osoitteesta uqr.to/MgnEN

Valmistelut Magnide® -tuotteen uudelleenkäyttöä varten:

- I Kiinnitä silmukan yläosa tuotteen yläosaan magneetilla.
- II Käännä tuote ympäri ja aseta se tasaiselle pinnalle.
- III Käännä molemmat magneeteilla varustetut sivut keskelle, jotta magneetit tarttuvat toisiinsa. Oranssi ommel näkyy nyt ulkopuolella.
- IV Sulje oranssi läppä tuotteen päältä, jotta magneetit tarttuvat toisiinsa.

KOOT

REF	Koko	Kengän koko EU	Kengän koko UK naiset	Kengän koko UK miehet	Kengän koko US naiset	Kengän koko US miehet
E01513	Medium	≤ 38	≤ 5 1/2	≤ 6	≤ 7 1/2	≤ 6
E01514	Large	39 - 43	6 - 8	6 1/2 - 9	8 1/2 - 11	6 1/2 - 10
E01515	Extra large	≥ 44	≥ 9	≥ 9 1/2	--	≥ 11

XL soveltuu myös erittäin leveälle jalalle (jalan ympärysmitta enintään 28 cm / 11")



Katso ohjevideomme tästä: uqr.to/MgnEN tai skannaa tämä QR-koodi:

Lisätietoja on osoitteessa www.slide-solutions.com



Yrityksen Arion Slide Solutions Magnide® -apuvälineen ainutlaatuiset liukuominaisuudet vähentävät kompressiosukan ja ihon välistä kitkaa. Nämä ominaisuudet ovat tuotteen valmistukseen käytetyn erikoismateriaalin ja tuotteen pinnoitteen ansiota. Kitkan vähentämisestä on hyötyä erityisesti liu'utettaessa sukka yli kantapääalueen, joka on jalan leivin osa.

HELPPOKÄYTTÖINEN, TURVALLINEN JA YKSINKERTAINEN RATKAISU

- Vähentää sekä kompressiovaatteiden käyttäjien että hoitajien fyysistä rasitusta.
- Voi auttaa pidentämään vaateen käyttöikää ja ylläpitämään alkuperäistä kompressiota kauemmin estämällä sormien tai kynsien aiheuttamia vaurioita sekä liiallista venyttämistä ja vääntämistä.
- Edistää kompressiovaatteiden käyttäjien itsenäisyyttä ja tukee hoitomyönteisyyttä.

KOOSTUMUS

- Tuote: Polyamidi 67 %, polyesteri 15 %, polypropeeni 10 %, magneetit 5 %, polyuretaani 2 %, silikoni 1 %
- Pakkaus: Polypropeeni (PP)

VASTA-AIHEET

- Älä käytä tuotetta, jos olet allerginen jollekin sen ainesosalle (ks. koostumus).
- Avohaavat tulisi peittää sopivalla siteellä ennen tuotteen käyttämistä.

VAROITUKSET

- **Magnide® sisältää useita magneetteja.** Pidä tämä tuote loitolla sydämentahdistimista ja defibrillaattoreista. Magneetikenttä voi häiritä tämän välineen asianmukaista toimintaa (vähimmäisetäisyys = 30 cm / 11.8").
- **Tukehtumisvaara:** Pidä tuote vauvojen, lasten ja lemmikkieläimien ulottumattomissa.
- **Liukastumisvaara:** Älä astu tuotteen päälle. Erittäin liukas materiaali.
- **Vain ulkoiseen käyttöön /** tarkoitettu ihokosketukseen. Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee ärsytystä.

TÄRKEÄÄ

- Lue käyttöohjeet huolellisesti. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi.
- Säilytä pakkaus ja käyttöohjeet niin kauan kuin käytät tuotetta.
- Kaikista tuotteen käytön aikana esiintyvistä vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle ja toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.
- Tuotetta käytettäessä on tärkeää valita oikeankokoinen tuote käyttäjälle. Väärän kokoista tuotetta käytettäessä tuote ei ehkä toimi oikein ja se voi vaurioitua tai kulua liian nopeasti. Oikea koko määräytyy kengännumerosi mukaan.
- Käytä tuotetta yhdellä henkilöllä. Jos tuotetta on käytettävä useammalla kuin yhdellä henkilöllä, desinfioi tuote ensin 70 %:n etanoliliuoksella.

SÄILYTYS

Pidä poissa suorasta auringonvalosta ja muista lämmönlähteistä.

HOITO-OHJEET

- Käsinpesu, enint. 30 °C / 86 °F.
- Ei saa valkaista.
- Ei saa kuivata kuivausrummussa. Tuotteen saa kuivata vain pyyhkeellä.
- Ei saa silittää.
- Ei saa kuivapestä.
- Desinfiointi mahdollista 70 %:n etanoliliuoksella.

TAKUU

Tälle tuotteelle annetaan kuuden kuukauden takuu ostopäivästä lukien viallisesta materiaalista tai rakenteesta aiheutuvia vikoja vastaan. Tuote vaihdetaan takuuajana veloituksetta, jos siinä on valmistus- ja/tai materiaalivikoja. Takuun mukainen vaihto tehdään vain, jos voidaan osoittaa ostokuitilla, että reklamaatio on tehty takuuajana. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu tuotteen epäasianmukaisesta käytöstä tai sen käyttämisestä useilla potilailla. Sinun on otettava yhteyttä toimittajaasi voidaksesi käyttää tätä palvelua. Sinua pyydetään palauttamaan tuote pestynä ja noudattamaan hoito-ohjeita.

KÄYTTÖSUOSITUS

Valmistaja suosittelee vaihtamaan tuotteen kuuden kuukauden kuluttua ensimmäisestä käyttökerrasta lukien, jos tuotetta käytetään säännöllisesti. Voit kirjoittaa ensimmäisen käyttöpäivän tämän asiakirjan taakse.