

Tuet ja ortoosit

TUOTEKUVASTO

Kaula

Olka • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lastentuet



Tukikohta



ARION
Care for construction

Aspen
MEDICAL PRODUCTS

BREG

CAMP
SCANDINAVIA

GASTROCK
— STÖCKE SEIT 1868 —

enovis

G&M

KLAVENESS

ORLIMAN
Advancing Care with Aids

ORTHOSERVICE
ROTEF

MEDAVID

mediroyal

new feet
MEDICAL FOOTWEAR

O.P.O.

ORTHOMERICA

ottobock

RCAT
Restorative Care of America
— EST. 1985 —

SPORLASTIC
— 1988 —

THUASNE
BEGAT

Tyke
APOVALINEET

ÖSSUR

Valmiit ja yksilölliset tukiratkaisumme auttavat liikkumisessa, kuntoutumisessa, kivunhoidossa sekä uusien vammojen välttämisessä.

Valikoiman parhaat valmistuet

Tukivalmistajaverkostomme on laaja ja valikoimamme monipuolinen. Valitsemme huolella vain kaikkein laadukkaimmat ja toimintavarmimmat tuotteet.

Yksilöllisesti räätälöidyt apuvälineet

Valmistamme yksilölliset apuvälineet omassa pajassamme, käsityönä ja parhaista materiaaleista. Tuotteissamme näkyy apuvälineteknikon, fysioterapeutin, ortopedisuutarin ja jalkaterapeutin ammattitaito. Ortopedisten jalkineiden suutarityön toteuttaa kokenut ja luotettava yhteistyökumppanimme.

Hyödynnämme alan uusimpia ratkaisuja ja viimeisintä tutkimustietoa, ja yhdistämme ne pitkään kokemukseemme. Vahvuuksiamme ovat erityisesti yksilölliset ortopediset jalkineet, tukipohjalliset, ortoosit ja tukisukat. Innostumme myös harvinaisempien tukihaasteiden ratkaisemisesta.

Verkkokaupan tuotteet nopeasti

Toimitamme tuotteet nopeasti, sillä ne kaikki löytyvät verkkokaupпамme varastosta. Tarvittaessa verkkosivujemme chat-palvelu auttaa löytämään sinulle sopivan tuotteen. Verkkosivustollamme on myös oma osio terveydenhuollon ammattilaisille.

- 6** Kaulatuet
- 14** Olka- ja kyynärtuet
- 30** Ranne- ja käsituet
- 68** Selkätuet
- 90** Lonkkatuet
- 94** Polvituet
- 120** Nilkka- ja jalkatuet
- 154** Lastentuet
- 166** Yksilölliset tuet ja ortoosit



[TurunTukikohta.fi](https://www.turun-tukikohta.fi)



Turun Tukikohta on erikoistunut tukien ja ortoosien myyntiin ja valmistukseen vuodesta 1988. Myymälämme sijaitsevat Turussa, Porissa ja Oulussa. Asiakkaitamme ovat kuluttajat sekä julkisen ja yksityisen terveydenhuollon sektorin toimijat ympäri Suomen.



6

Kaulatuuet



14

Olka- ja
kyynärtuet




30

Ranne- ja käsituet



68

Selkätuet

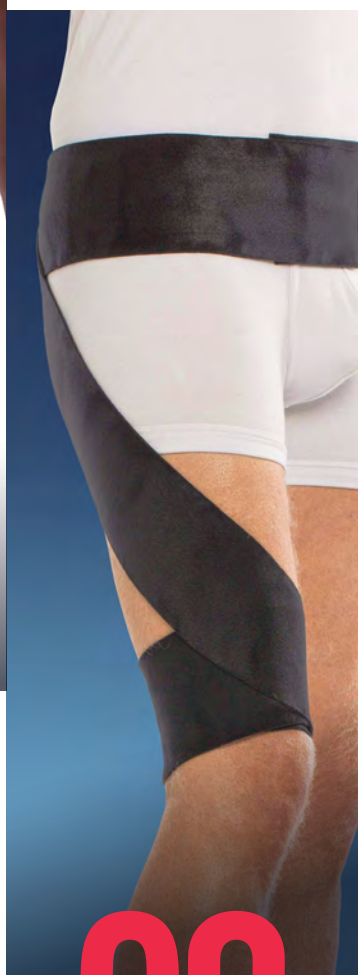

90

Lonkkatuet



94

Polvituet



120

Nilkka- ja jalkatuet



154

Lastentuet

Kaulatuet

Jäykät kaulatuet

- 7** Vista CTO4
Vista MP
- 8** Miami J Select
- 9** Miami J
- 10** One Piece Cervical Collar
Philadelphia Tracheotomy Collar

Pehmeät kaulatuet

- 11** Soft Collar
Cervilight Soft
- 12** Form Fit Cervical Collar
Cervilastic
- 13** Cervi-HiT
Mediroyal Foam Collar





Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi	Kuvaus	Koko
984550	Vista CTO	1 koko
984520	Pehmustesetti	1 koko

ASPEN | 984550

Vista CT04

Kaulan ja rintarangan yhdistelmäortoosi

Käyttöaiheet

- Kaula- ja rintarangan tuenta tasoilla C1-T2
- Akuutit vammat
- Postoperatiivinen tuenta
- Degeneratiiviset muutokset

Ominaisuudet

- Säädettyvä etuosa, 6 eri korkeutta
- Säädettyvä MultiPost-takaosa, 3 eri kulmaa
- Säädettyvä ja irrotettava rinta- ja selkäosa
- MRI-yhteensopiva
- Ekstensio-, fleksio- ja rotaatiotuenta
- Erillinen etu- ja takaosa
- Pehmustemateriaalit vaahtomuovi ja puuvilla, pitävät ihon kuivana
- Iso trachea-aukko
- Voidaan keventää kuntoutuksen edetessä CTO2 tai Vista MP -malleihin
- Pestävä ja pehmusteet vaihdettavissa



ASPEN | 984200

Vista MP

Edistysellinen säädettyvä kaulatuki

Käyttöaiheet

- Kaularangan tuenta välillä C1-C7
- Akuutit vammat
- Postoperatiivinen tuenta
- Degeneratiiviset muutokset

Ominaisuudet

- Säädettyvä etuosa, 6 eri korkeutta
- Säädettyvä MultiPost-takaosa, 3 eri kulmaa
- Vaihdettavat, ilmavat pehmusteet (vaahtomuovi, puuvilla)
- Tuen muotoilu tasaa paineen ja ehkäisee painehaavoilta
- Tuen voi yhdistää rintarangan yläosaa tukeviin Vista CTO ja Vista CTO4 -malleihin
- Trachea-aukko

Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi	Kuvaus	Koko
984200	Vista MP	1 koko
984220	Pehmustesetti	1 koko

Kaula

Olkä • Kynnär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset

Kaulatuet

Jäykät kaulatuet



ÖSSUR | MJS-101

Miami J® Select

Säädettävä, yhden koon kaulatuki

Käyttöaiheet

- Kaularangan pre- ja postoperatiivinen hoito
- Kaularangan immobilisointi trauman jälkeen

Ominaisuudet

- Yhden koon tuki
- Helppo korkeussäätö, joka saadaan lukittua
- Anti-bakteeriset ja hygieniset Sorbatex™-pehmusteet
- Muotoilussa huomioitu laadukas immobilisaatio ja korkea käyttömukavuus
- 7-portainen korkeussäätö
- Anatominen muotoilu ja Flex Edge -reunus vähentävät takaraivon painetta
- Helppo pukea ja riisua
- Potilaan kosketuspisteet merkitty sinisellä värillä (Blue is You)
- Rintalastalla helppo Sternal-Relief Dial -säätö
- Suuri trakeotomia-aukko, hyvä toimivuus myös teho-osastopotilailla
- Voidaan käyttää röntgen-, CT- ja MRI-kuvauksen aikana
- Yhteensopiva Occian Back ja Miami JTO -lisäosien kanssa

Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi	Kuvaus	Koko
MJS-101	Miami J Select	1 koko
MJSR-101	Miami J Select + varapehmustesarja	1 koko
MJSP-101	Pehmustesarja	1 koko
MJST-101	Vaihtotarranauhat 10 kpl	1 koko



ÖSSUR | MJ-200 – MJ-500

Miami J®

Säädettävä kaulatuki

Käyttöaiheet

- Posttraumaattinen hoito
- Stabiilit kaularangan murtumat
- Kaularangan spondyliitti ja spondyloosi
- Kaularangan nivelreuma ja osteoartrroosi
- Välilevytyrä
- Postoperatiivinen hoito
- Liikehermosolusairaudet

Ominaisuuudet

- Antibakteerinen Sorbatex™-pehmuste lisää tuen käyttömukavuutta
- Suunniteltu minimoimaan painekohdat niille alttiilla alueilla: takaraivo, leuka, epäkäs ja solisluu
- Säädettävissä painikkeiden avulla miellyttävästi takaraivoa vasten
- Sternaalituki voidaan poistaa tarvittaessa
- Läpinäkyvä röntgen-, MR- ja CT-kuvissa

Koko- ja tilaustiedot

Koko valitaan vartalotyyppin ja kaulan mallin mukaan (ei henkilön koon). Alla 6 vartalotyyppiin perustuvaa kokoa.

Miami J:n etu- ja taka-kappaleita voi yhdistää vapaasti.

Koko valitaan potilaan kaulan pituuden mukaan (ei vartalon koon).

Koko	Tukisarja	Tuki	Takaosa	Etuosa
Super Short	MJR-200S	MJ-200S	MJ-400BK	MJ-200SFRT
Stout	MJR-200L	MJ-200L	MJ-200BK	MJ-200LFRT1
XS	MJR-250	MJ-250	MJ-250BK	MJ-250SFRT
Short	MJR-300	MJ-300	MJ-300BK	MJ-300FRT
Regular	MJR-400	MJ-400	MJ-400BK	MJ-400FRT
Tall	MJR-500	MJ-500	MJ-500BK	MJ-500FRT

Jokaisen tukisarjan mukana toimitetaan yksi ylimääräinen pehmustesarja.

200 S Super Short 10 %	200 L Stout 15 %	250 XS 5 %	300 Short 30 %	400 Regular 30 %	500 Tall 10 %
Onko potilaan kaula kyfoottinen (leuka kohti rintaa)?	Onko potilaan kaulan- ympäryys erittäin suuri?	Onko potilaan kaula erit- tään lyhyt, pieni?	Kaikki muut aikuiset?	Onko potilas nainen?	Onko potilaan kaula pitkä?
• Kyfoottinen • Leuka kohti rintaa • Geriatrinen • Osteoporoosi ja/tai selkärankareuma	• Erittäin suuri kaulan- ympäryys • Ylipainoinen/tukeva • "Kaulaton" • Hartekas	• Erittäin lyhyt, pieni kaula • Ensi sijassa naiset • Usein aasialaista syntype- rää olevat henkilöt • Harvinainen	• Vakiokoko aikuisille miehille • Naiset, joilla on lyhyt kaula	• Naiset • Vakiokoko aikuisille naisille • Hentorakenteiset aikuis- set miehet	• Pitkä kaula • "Joutsenkaula" • Nuoret naiset • Nuoret miehet

Kaulatuet

Jäykät kaulatuet



ENOVIS / PROCARE | 79-8313X

One Piece Cervical Collar

Yhtenä kappaleena ruiskuvalettu kaulus

Käyttöaiheet

- Akuutit kaularagan vammat

Ominaisuudet

- Valmistettu kestävästä suuri tiheyksisestä polyeteenistä
- Vuorattu pehmeällä solumuovilla
- Kokoluokat ovat säädettävissä usealle eri korkeudelle, sopivat useimmille aikuisille ja lapsille
- Suuren trakea-aukon ansiosta karotispulssi voidaan lukea nopeasti ja hätätilassa tehdä trakeotomia
- Menee litteänä pieneen tilaan
- Voidaan käyttää röntgen-, CT- ja MRI-kuvauksen aikana

Koko- ja tilaustiedot

Tuote-koodi	Korkeus, säätö	Kaulan ympärys	Koko
79-83130		20–46 cm	Lapset
79-83131	4,4–6,3–7,5–8,9 cm	28–58 cm	Aikuiset



ÖSSUR | PHP-XXX

Philadelphia® Tracheotomy Collar

Käyttöaiheet

Posttraumaattinen hoito, kaularangan spondyloosi, välilevyntyrä, liikehermosolusairaudet, kaularangan spondyliitti, kaularangan nivelreuma ja osteoartrioosi, postoperatiivinen hoito

Ominaisuudet

- Lateksiton ja hypoallergeeninen vaahtomuovimateriaali
- Anatomisesti muotoiltu, hyvin tukeva tuki, joka pitää kaularangan oikeassa asennossa
- Vettä hylkivä, voi käyttää myös vesiterapiassa

Kokoluokitus

Kaulan ympärysmitta, olkapäiden ja leuan välinen korkeus.

Philadelphia® Tracheotomy Collar

Koko	Kaulan ympärys	Olkapäiden ja leuan välinen korkeus					
		3 cm	4,5 cm	6 cm	8 cm	11 cm	13 cm
Infant	15–20 cm	PHP-TI					
Pediatric	20–28 cm	PHP-TP					
XS	> 25 cm	PHP-TP PHP-T2XS					
S	25–33 cm	PHP-T2S PHP-T3S PHP-T4S PHP-T5S					
M	33–41 cm	PHP-T2M PHP-T3M PHP-T4M PHP-T5M					
L	41–48 cm	PHP-T2L PHP-T3L PHP-T4L PHP-T5L					
XL	< 48 cm	PHP-T2XL PHP-T3XL PHP-T4XL PHP-T5XL					

Lisävarusteet

Philadelphia® Coolmax Cotton Liner		
Koko	Kaulan ympärys	Tuote-koodi
Infant	15–20 cm	PHP-LCI
XS	< 25 cm	PHP-LCXS
S	25–33 cm	PHP-LCS
M	33–41 cm	PHP-LCM
L	41–48 cm	PHP-LCL
XL	> 48 cm	PHP-LCXL

Koko	Stabilizer tuotekoodi	Halo tuotekoodi
Pediatric	PHP-OSP	PHP-OHP
Aikuinen	PHP-OS	PHP-OH



ORTHOCARE | 1180

Soft Collar

Anatominen pehmeä kaulatuki

Käyttöaiheet


- Kaularangan venähdys/revähdys
- Trauman jälkeiset ja degeneratiiviset vaivat kaularangassa
- Kaularangan alueen välilevyvaivat
- Spasmit
- Jännityspäänsärky

Ominaisuudet

- Hengittävä mikrokuitukangas
- Tukeva vaahtomuovi
- Tarranauhakiinnitys
- Lämmittävä vaikutus

Koko- ja tilaustiedot

Korkeus mitataan rintalastan kuopasta leukaan.

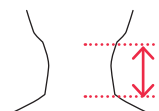

Tuotekoodi	Koko	Korkeus
1180-1	1	6 cm
1180-2	2	8 cm
1180-3	3	10 cm



ORTHOSERVICE | M8304

Cervilight Soft

Anatominen pehmeä kaulatuki

Käyttöaiheet


- Lievät rangan muutokset, esim. whiplash-vammat
- Niskan jäykkyys
- Niskasta johtuva asentohuimaus
- Kaularangan artroosi

Ominaisuudet

- Korkeusvaihtoehdot: 6–8–10–12 cm, pituusvaihtoehdot S–L
- Valmistettu keskitiheyksisestä vaahtomuovista
- Neulottu päällinen
- Tarranauhakiinnitys niskassa

Koko- ja tilaustiedot

Korkeus mitataan rintalastan kuopasta leukaan.

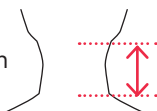

Tuote- koodi	M8304- 6CM-S	M8304- 8CM-S	M8304- 10CM-S	M8304- 12CM-S	M8304- 6CM-M	M8304- 8CM-M	M8304- 10CM-M	M8304- 12CM-M	M8304- 6CM-L	M8304- 8CM-L	M8304- 10CM-L	M8304- 12CM-L
Koko	S	S	S	S	M	M	M	M	L	L	L	L
Kaulan ympäryys	28–34 cm	29–35	30–36	31–37	30–36	31–37	32–38	33–39	36–44	37–46	39–49	39–49
Tuen pituus	47 cm	49	50	52	50	52	54	56	58	60	62	64
Tuen korkeus	6 cm	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset

Kaulatuet

Pehmeät kaulatuet



Koko- ja tilaustiedot

Korkeus mitataan solisluun
yläreunasta leukaan.

ENOVIS / PROCARE | 79-830XX

Form Fit Cervical Collar

Anatominen pehmeä kaulatuki

Käyttöaiheet

- Kaularangan lievät venähdykset
- Leikkauksen jälkeinen kuntoutus
- Kaularangan artroosi

Ominaisuudet

- Korkeusvaihtoehdot: 5–8–10–11 cm, pituusvaihtoehdot XXS–XXL
- Ydin valmistettu solumuovista, vaihtoehdot keskitiheä tai kova
- Neulottu päällinen
- Tarranauhakiinnitys niskassa

Tuote- koodi	79- 83011	79- 83012	79- 83013	79- 83014	79- 83015	79- 83016	79- 83017	79- 83018	79- 83019	79- 83003	79- 83004	79- 83005	79- 83006	79- 83007	79- 83008	79- 83009
Tiheys	Keski- tiheä	Keski- tiheä	Keski- tiheä	Keski- tiheä	Keski- tiheä	Keski- tiheä	Keski- tiheä	Keski- tiheä	Keski- tiheä	Kova	Kova	Kova	Kova	Kova	Kova	Kova
Kaulan ympärys	18–31 cm	23–33	28–41	38–51	33–46	41–53	38–51	41–51	43–56	28–41	38–51	33–46	41–53	38–51	41–51	43–56
Tuen pituus	36 cm	42	47	56	51	58	57	61	61	47	56	51	58	57	61	61
Tuen korkeus	5 cm	5	8	8	10	10	11	11	5	8	8	10	10	11	11	5
Koko	XXS	XS	S	S- long	M	M- long	L	XL	Long/ Nar	S	S- long	M	M- long	L	XL	Long/ Nar



SPORLASTIC | 0273X

Cervilastic

Anatominen pehmeä kaulatuki

Käyttöaiheet


- Kaularangan venähdys/revähdys
- Trauman jälkeiset ja degeneratiiviset vaivat kaularangassa
- Kaularangan alueen välilevyvaivat
- Spasmit
- Jännityspäänsärky

Ominaisuudet

- Tukee kaularankaa ja rentouttaa lihaksia
- Lämmittävä vaikutus
- Anatominen muotoilu
- Laadukas ja miellyttävän pehmeä materiaali
- Tarranauhakiinnitys

Koko- ja tilaustiedot

Korkeus mitataan rintalastan
kuopasta leukaan.

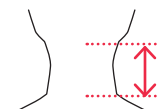

Tuotekoodi	Korkeus	Kaulan ympärys
02734-0-9000-0	4,5 cm	33–56 cm
02735-0-9000-0	6,5 cm	33–56 cm
02736-0-9000-0	7,5 cm	33–56 cm
02737-0-9000-0	9 cm	33–56 cm
02738-0-9000-0	11 cm	33–56 cm




SPORLASTIC | 0271X

Cervi-HiT

Pehmeä kaularangantuki jäykistävällä muovivahvisteella vahvempaan tuentaan. Muuten sama kuin Cervilastic (edellä).

Koko- ja tilaustiedot

Korkeus mitataan rintalastan kuopasta leukaan.

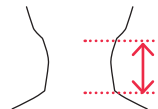

Tuotekoodi	Korkeus	Kaulan ympäryys
02716-0-9000-0	7,5 cm	33–56 cm
02717-0-9000-0	9 cm	33–56 cm
02718-0-9000-0	11 cm	33–56 cm



MR515

MEDIROYAL | MR515, MR516

Mediroyal Foam Collar

Anatomisesti muotoiltu, pehmeä kaulatuki

Käyttöaiheet


Kaulan lihasten kuormituksen keventäminen

Ominaisuudet


- Anatominen muotoilu
- Tarranauhakiinnitys
- Tukeva, keskitiheä vaahtomuovimateriaali
- Päällystetty kaksinkertaisella puuvillaneuloksella
- Väri musta ja harmaa

Koko- ja tilaustiedot

Korkeus mitataan rintalastan kuopasta leukaan.

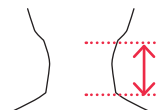

Tuotekoodi harmaa	Tuotekoodi musta	Korkeus*
MR515-06	MR516-06	6 cm
MR515-08	MR516-08	8 cm
MR515-10	MR516-10	10 cm
MR515-12	MR516-12	12 cm

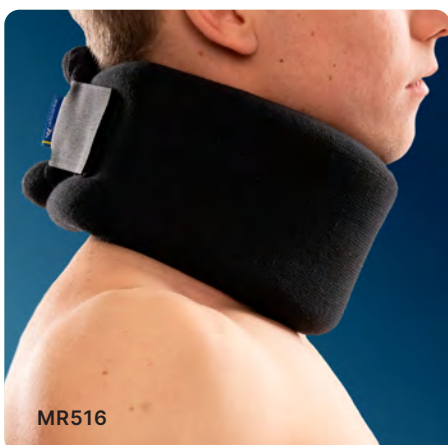

MR516

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilikka • Jalka

Lapset

Olka- ja kyynärtuet

Abduktiotyynylliset olkatuet

- 15** Softab 45°/70°
Extra-S 15°/30°
- 16** Should Top II
UltraSling Pro

Kantoliinat

- 17** Shouldfix II
Armsling Velcro
- 18** Clinical Shoulder Immobilizer
Deluxe Arm Sling
- 19** Acromion 2.0
Humerux-murtumaortoosi

Toiminnalliset olkatuet

- 20** Neuro-Lux II
- 21** ErixThree Neuro
- 22** BoaFit 2- ja 3-pistejärjestelmät
- 23** Shouldercross
- 24** SRX Olkatuki X
SRX Olkatuki

Kyynärtuet

- 25** Elbo Pro
- 26** Ulnaris-kyynärortoosi
ARX Ulnar-Flex
- 27** Epidyn Stabil
Epidyn Aktiv
- 28** SRX-kyynärtuki
Cubidyn
- 29** Epicare Brace
Epicare



ORTHOSERVICE | M84500, M84501

Softab 45°/70°

Olkapäätuuki 45° tai 70° abduktiolla

Käyttöaiheet

- Postoperatiivinen tuenta rotator cuff -operaation jälkeen
- Hermovammojen hoito
- Tuberculum majus fraktuurat pienellä dislokaatiolla
- Postoperatiivisesti endo- ja arthroprosetia hoidon jälkeen

Ominaisuudet

- Tukeva tukityyny
- Tukityynyn ja vartaloremmin pintamateriaali nylonia, johon tarrat kiinnittyvät helposti
- Abduktiotyyny asennettavissa 45° tai 70° kulmaan
- Tuen mukana kannattaa tilata ranne-/tukilasta (M84500/A)

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetty henkilön pituuden mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Henkilön pituus	Ranne-/tukilasta
M84500	Normaali	< 185 cm	M84500/A
M84501	XL	> 185 cm	M84500/A



ORTHOSERVICE | ME113-ME116

Extra-S 15°/30°

Olkapään ulkorotaatiotyyny 15° tai 30° ulkorotaatiolla

Käyttöaiheet

- Postoperatiivinen tuenta ulkorotaatiolla rotator cuff -, glenoid labrum -, nivelkapselin kiristys- ja pehmytkudosoperaatioissa
- Alkuvaiheen konservatiivinen hoito olkapään luksaatioissa

Ominaisuudet

- Kaksi mallia: 15° ja 30° tukityynillä
- Tukityyny valmistettu tukevasta vaahtomuovista, pinta-materiaalissa hopeaa ihoystävällisyyden takaamiseksi
- Tukityyny etu- ja takatuennalla optimaalisen tuennan saavuttamiseksi
- Käsipussi hengittävää materiaalia
- Klipsikiinnitys ja hihnojen pituus tarroilla säädettävissä
- Peukaloremmin ja terapiapallo kädelle
- Vasen ja oikea puoli erikseen

Koko- ja tilaustiedot

Kyynärvarren pituus mitataan kyynärpästä sormien tyveen.

Tuotekoodi	Koko	Kyynärvarren pituus
ME113-ME116*	S	< 34 cm
ME113-ME116*	M	35-39 cm
ME113-ME116*	L	> 40 cm

* ME113: 15° tukityyny oikea
ME114: 15° tukityyny vasen
ME115: 30° tukityyny oikea
ME116: 30° tukityyny vasen

Kaula

Olka • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset

Olka- ja kyynärtuet

Abduktiotyynylliset olkatuet



Koko- ja tilaustiedot

Kyynärvarren pituus mitataan kyynärpäätä sormien tyveen ulottuvalla mitalla.

ORTHOSERVICE | ME111 / ME211

Should Top II

Olkapäätuuki 10° tai 15° abduktiopalalla

Käyttöaiheet

Postoperatiivinen tuenta rotator cuff -, glenoid labrum -, nivelkapselin kiristys- ja pehmytkudosoperaatioissa

Ominaisuudet

- Tukityyny valmistettu tukevasta vaahtomuovista, pinta-
materiaalissa hopeaa ihoystävällisyyden takaamiseksi
- Tukityyny etu- ja takatuennalla optimaalisen
tuennan saavuttamiseksi
- Käsipussi tehty hengittävistä materiaalista
- Klipsikiinnitys ja hihnojen pituus tarroilla säädettävissä
- Peukaloremmei ja terapiapallo kädelle
- Abduktio 10 tai 15 astetta
- Puolieroton

Tuotekoodi	Abduktio	Koko	Kyynärvarren pituus
ME111-S	10°	S	< 38 cm
ME111-L	10°	L	> 39 cm
ME211-S	15°	S	< 38 cm
ME211-L	15°	L	> 39 cm



ENOVIS | 11-0447-9

UltraSling® Pro

Käyttöaiheet

- Kiertäjäkalvosimen korjausleikkauksen jälkeen
- Bankartin leikkauksen jälkeen
- Nivelkapselin avaus
- Olkanivelen täydellinen/osittainen sijoiltaanmeno
- Pehmytkudoksen venähdykset/korjausleikkaukset

Ominaisuudet

- Profiililtaan matala, säädettävät rengashihna on
miellyttävä terveen olkapään ympärillä. Se jakaa
painon tasaisesti ja keventää niskan kuormitusta.
- Helppo pukea ja säätää yhdellä kädellä
- Vain yksi koko
- Hengittävä materiaali
- Kevennettävissä kuntoutumisen myötä

Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi	Kuvaus
11-0447-9	UltraSling Pro
25-0447	Vaihtoremmei 71 cm



Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi	Koko
M8412	Universaali

ORTHOSERVICE | M8412

Shouldfix II

Tukeva kantoside olkapään ja käden tuentaan

Käyttöaiheet

- Humeruksen murtumat
- Olkapään sijoiltaanmenot ja venähdykset
- Postoperatiivinen tuenta humerusmurtuman tai sijoiltaanmenon jälkeen
- Postoperatiivinen tuenta bicepsin pitkän pään jännerepeämin korjausleikkauksen jälkeen

Ominaisuudet

- Pehmustettu, miellyttävä käsivarren pussin ja vartaloremmin materiaali
- Irrallinen kyynärpään tuki
- 1 kokoluokka
- Puolieroton



ORTHOCARE | 3510

Armsling Velcro

Laadukas ja tukeva vartaloremmin kantoside olkapään ja käden tuentaan

Käyttöaiheet

- Olkapään, humeruksen ja kyynärpään postoperatiivinen ja -traumaattinen tuenta
- Olkapään sijoiltaanmenot ja venähdykset

Ominaisuudet

- Tukeva ja miellyttävä materiaali
- Helppo tarrakiinnitys
- Voidaan käyttää vartaloremmillä (tukevampi tuenta) tai ilman
- Peukalolenkki estämään kantositeen liukumisen
- Hartiapehmuste

Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi	Kuvaus	Koko
3510-XS	25–30 cm	XS
3510-S	30–36 cm	S
3510-M	36–42 cm	M
3510-L	42–48 cm	L
3510-XL	48–54 cm	XL

Kaula

Olka • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilikka • Jalka

Lapset

Olka- ja kyynärtuet Kantoliinat



ENOVIS / PROCARE | 79-8401X

Clinical Shoulder Immobilizer

Kantoside vartaloremmillä olkapään vamman tai operaation jälkeiseen immobilisaatioon

Ominaisuudet

- Materiaali puuvillaa/polyesteriä, joustava hihna ja tarrakiinnitys
- Sopii sekä oikeaan että vasempaan käteen
- Pehmustettu olkapäähihna

Koko- ja tilaustiedot

Kokoluokka määritetään kyynärvarren pituudella kyynärpästä ranteeseen.

Tuotekoodi	Syvyys x pituus	Koko
79-84012	15 × 28 cm	XS
79-84013	18 × 33 cm	S
79-84015	20,5 × 38 cm	M
79-84017	23 × 46 cm	L
79-84018	25,5 × 51 cm	XL



ENOVIS / PROCARE | 79-8400X

Deluxe Arm Sling

Kantoside sijoiltaan menon hoitoon ja leikkauksen jälkeiseen immobilisaatioon

Käyttöaiheet

- Olka- ja kyynärnivelen tuenta vamman tai operaation jälkeen

Ominaisuudet

- Materiaali puuvillaa/polyesteriä, joustava hihna ja tarrakiinnitys
- Kantositeen siirtymisen estävä peukalosilmukka
- pehmustettu olkapäähihna

Koko- ja tilaustiedot

Kokoluokka määritetään kyynärvarren pituudella kyynärpästä ranteeseen.

Tuotekoodi	Syvyys x pituus	Koko
79-84001	16,5 × 21 cm	Ped / XXS
79-84002	18 × 28 cm	XS
79-84003	19 × 32 cm	S
79-84005	20,5 × 38 cm	M
79-84007	21,5 × 44,5 cm	L
79-84008	23 × 51 cm	XL



Koko- ja tilaustiedot

Yksi koko. Erikseen oikea ja vasen.

Tuotekoodi	Puoli	Koko
MS1063-R	oikea	1 koko
MS1063-L	vasen	1 koko



Kokoluokitus

Koko määrittäytyy olkavarren paksuimman kohdan ympärysmittan mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Ympärys	Pituus
621060011	S	18-26 cm	25 cm
621060012	M	26-34 cm	27 cm
621060013	L	34-42 cm	29 cm
621060014	XL	42-50 cm	32 cm
621070011	S	18-26 cm	30 cm
621070012	M	26-34 cm	32 cm
621070013	L	34-42 cm	34 cm
621070014	XL	42-50 cm	36 cm

ORTHOSERVICE | MS1063-X

Acromion 2.0

Laadukas ja miellyttävä tuki solisluun vammoihin

Käyttöaiheet

Konservatiivinen hoito akromioklavikulaarisen nivelen stabiloimiseksi ensimmäisen, toisen ja kolmannen asteen traumaattisten sijoiltaanmenojen jälkeen. Konservatiivinen hoito distaalisen solisluun murtuman jälkeen.

Ominaisuuudet

- Tuote suunniteltu siten, että solisluu työntyy alaspäin ja olkaluu ylöspäin kohdistuen acromionin ja solisluun vastakkain
- Anatomisesti muotoiltu vahvike hartian/solisluun päällä, jossa hyvä polyeteenivaahtopehmuste ja remmeissä kiertyvät liittimet
- Soljellisella lateraalihihnalla tuotteen voi irrottaa nopeasti
- Säädetty, miellyttävä kyynärpään ja kyynärvarren tuki, jonka polyeteenivaahtomuovinen puolijäykkä pehmuste mahdollistaa tuotteen helpon pukemisen
- Säädettyä kiinnityshihnan solki Velcro®-kiinnitysjärjestelmällä
- Takahihnoissa on sekä vakio- että esiasetettu kiristys
- Veluurihihnat, säädettyä koko

CAMP | 6210X

Humerux-murtumaortoosi

Humerusortoosi olkaluun murtuman hoitoon

Käyttöaiheet

Diafysiaalinen humerusmurtuma (luun keskiosan murtuma).

Ominaisuuudet

- Humerusortoosin toiminta perustuu tunnetun "Sarmiento-ortoosin" toimintaperiaatteelle, tiukkaan sirkulaariseen pehmytkudoskompressioon. Kolme ympärikulkevaa nauhaa kiristyvät toisistaan riippumatta.
- Ortoosin ankkurointi olan yli varmistaa hyvän paikallaan pysymisen ja estää alas liukumisen.
- Vastapuolen käsivarren alta kulkevan nauhan irrotettava pehmuste lisää käyttömukavuutta.
- Ortoosissa on kaksi muovilevyä, jotka voi tarvittaessa lämmittää ja muotoilla sekä leikata saksilla oikean kokoiseksi.
- Ortoosi sallii vapaan kyynärnivelen liikkuvuuden.
- Ortoosin mukana tulee ihoa vasten asetettava pehmustettu suojuus, jonka tarkoitus on lieventää herkkään ihon aiheuttamaa epämukavuutta ortoosin pukemisen ja sen käytön aikana.
- Hengittävää materiaalia, kangas on testattu Öko-tex standardi 100:n mukaisesti eikä sisällä lateksia.
- Pehmustettu suojuus on saatavana keskipitkinä ja pitkinä versiona.

Kaula

Olka • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset



SPORLASTIC | 07261

Neuro-Lux® II

Toiminnallinen ortoosi olkanivelen stabiloimiseksi ja uudelleen keskittämiseksi

Käyttöaiheet

Olkapään konservatiivinen hoito, olkapään subluksaatio, vammat joissa halutaan tukea olkaniveltä ja estää hermojen/jänteiden venyntyminen, kipu, heikkous ja/tai rajoittunut liikkuvuus olkanivelessä ja yläraajan lihaksissa liittyen hemiplegiaan plexus-vammaan, cranio-cerebraalinen traumaan, kaularangan traumaan, periferisen hermon vammaan

Ominaisuudet

- Tukee olkanivelen omalle paikalleen korjaten subluksaatiota ja sisäkiertoa
- Lievittää kipua
- Estää jänteiden ja hermojen sekundäärisiä venytysvammoja
- Tuessa kaksi olkanivelen yli kulkevaa, nostavaa hihnaa ohjaamaan/tukemaan olkanivelen asentoa
- Käsivarsiosa ulottuu kyynärvarren alueelle
- Säättöjen jälkeen käytettävissä yhdellä kädellä
- Valmistettu pehmeästä ja hengittävästä materialista

Koko- ja tilaustiedot

Koko määrittyy kyynärvarren paksuimman kohdan ympärysmittan ja rinnan (olkapää – vastakkainen kainalo) ympärysmittan mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Kyynärvarren ympärys	Olkapää-kainalomitta	Puoli
07261-2-9003-1	1	< 25 cm	< 90 cm	oikea
07261-2-9003-2	2	< 25 cm	90-105 cm	oikea
07261-2-9003-3	3	< 25 cm	105-125 cm	oikea
07261-2-9003-4	4	25-29 cm	< 90 cm	oikea
07261-2-9003-5	5	25-29 cm	90-105 cm	oikea
07261-2-9003-6	6	25-29 cm	105-125 cm	oikea
07261-2-9003-7	7	29-35 cm	< 90 cm	oikea
07261-2-9003-8	8	29-35 cm	90-105 cm	oikea
07261-2-9003-9	9	29-35 cm	105-125 cm	oikea
07261-1-9003-1	1	< 25 cm	< 90 cm	vasen
07261-1-9003-2	2	< 25 cm	90-105 cm	vasen
07261-1-9003-3	3	< 25 cm	105-125 cm	vasen
07261-1-9003-4	4	25-29 cm	< 90 cm	vasen
07261-1-9003-5	5	25-29 cm	90-105 cm	vasen
07261-1-9003-6	6	25-29 cm	105-125 cm	vasen
07261-1-9003-7	7	29-35 cm	< 90 cm	vasen
07261-1-9003-8	8	29-35 cm	90-105 cm	vasen
07261-1-9003-9	9	29-35 cm	105-125 cm	vasen

MEDIROYAL | NRX940

ErixThree® Neuro

Ainutlaatuinen olkatuki erityisesti neurologisille potilaille

Käyttöaiheet

- Olkapään instabiliteetti
- TIA/aivoinfarkti
- Niveltulehdus ja jäätynyt olkapää -syndrooma
- Lievä kiertäjäkalvosimen instabiliteetti
- AC-nivelen instabiliteetti

Ominaisuudet

- Tuki antaa olkapäälle dynaamisen, yksilöllisen tuen ja ohjauksen
- Tuessa ei ole kyynärmansettia vaan tuen nostava ja ohjaava tuki tehdään elastisten tarranauhojen avulla
- Elastisten tarranauhojen avulla olkapäähän voidaan kohdistaa halutut tuennat, esimerkiksi nostava efekti ja ulkorotaatio
- Tuen sisäpinta on kitkapintainen: proprioseptinen vaikutus, pitää ja nostaa olkapäätä paikalleen
- Materiaali on hengittävää ja elastista
- Tuen ulkopinta on kauttaaltaan tarrapitävää materiaalia
- Tuen etuosassa on kaksi alumiinivahviketta, joita voidaan muokata tarpeen vaatiessa. Ne tasoittavat solisluun alueen painetta.
- Lisäosana saatavilla kaksi erilaista Boa Fit -järjestelmää, joiden avulla mm. tuentaa voidaan lisätä ja pukemista helpottaa

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään olkavarren ympärysmittalla.

Erikseen oikea ja vasen puoli.

Tuotekoodi	Koko	Olkavarren ympäryys
NRX940-XXS	XXS	19–24 cm
NRX940-XS	XS	23–27 cm
NRX940-S	S	27–32 cm
NRX940-M	M	32–35 cm
NRX940-L	L	35–38 cm
NRX940-XL	XL	38–42 cm



Kaula

Olka • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilikka • Jalka

Lapset



MEDIROYAL | NRX945, NRX946

BoaFit 2- ja 3-pistejärjestelmät

Kaksi- ja kolmepisteiset BoaFit-järjestelmät
olkapään yksilölliseen tuentaan ja asetteluun
Erix Three Neuro -olkatuen kanssa

Käyttöaiheet

- Olkapään lisätuenta ErixThree Neuron käytön yhteydessä
- Tarve olkapään yksilölliselle dynaamiselle tuelle
- Tuen itsenäisen pukemisen helpottaminen

Ominaisuudet

- Kaksi- ja kolmepisteiset vaihtoehdot olkapään yksilölliseen tuentaan ja asetteluun
- Järjestelmään kuuluu Boa-kiristin sekä kaksi tai kolme tarrakiinnikettä
- Boa-kiristin ja tarrakiinnikkeet voidaan kiinnittää kaikkialle ErixThree Neuro -olkatuen ulkopinnalle
- Boa- ja tarrakiinnikkeet asetetaan yksilöllisesti parhaan dynaamisen tuen saavuttamiseksi ja mahdollisimman itsenäisen pukemisen aikaansaamiseksi
- Yksi koko

Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi	Malli	Lisätiedot
NRX945	BoaFit 2-pistejärjestelmä	Boa-kiristin + kaksi tarrakiinnikettä
NRX946	BoaFit 3-pistejärjestelmä	Boa-kiristin + kaksi tarrakiinnikettä

ORTHOSERVICE | M20726

ShoulderCross

Toiminnallinen olkatuki joustavilla lisäkivistintarroilla



Käyttöaiheet

- Glenohumeraalinivelen anteriorisen tai posteriorisen dislokaation konservatiivinen hoito
- Vammutuneen olkanivelen suojaus urheilussa tai työssä preoperatiivisesti tai stabilointioperaation jälkeen
- Käyttö olkapääkuntoutuksessa kivuliaan yliikkuvuuden tai toiminnallisen epävakauden yhteydessä
- Käytä kolme kuukautta rotator cuff -operaation jälkeen kun aloitat työt tai urheilun, myös rotator cuff -repeämien konservatiivisen kuntoutuksen yhteydessä

Ominaisuudet

- BreathSkill-kangasrakenne: pehmeä ja hengittävä 3D-kangas
- Materiaalin ulkopinta vahvaa verkkokangasta
- Olkanivelen yli ristiin kulkevat joustavat lisäkivistintarrat takaavat yksilöllisen ja optimaalisen nivelen vakauttamisen
- Vartaloremmi on osittain joustavasta materiaalista. Se on yksilöllisesti säädettävissä ja kainalon alla on pehmuste.
- Vartaloremmissä pikakiinnitys
- Oikea ja vasen puoli erikseen

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään hauksen paksuimman kohdan ympärysmittalla. Vasen ja oikea puoli erikseen.

Tuotekoodi	Koko	Hauksen ympäryys	Puoli
M20726R-S	S	22-26 cm	oikea
M20726R-M	M	26-30 cm	oikea
M20726R-L	L	30-35 cm	oikea
M20726R-XL	XL	35-40 cm	oikea
M20726L-S	S	22-26 cm	vasen
M20726L-M	M	26-30 cm	vasen
M20726L-L	L	30-35 cm	vasen
M20726L-XL	XL	35-40 cm	vasen

Kaula

Olka • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset



MEDIROYAL | SRX811

SRX® Olkatuki X

Toiminnallinen olkatuki lisäkirimillä

Käyttöaiheet

- Olkapään paikalliset tulehdukset, lievä instabiliteetti, lihasvammoista johtuva kipu

Ominaisuudet

- Olkatuki on tehty 3 mm ohuesta SRX®-materiaalista, joka antaa käyttäjälle tukea ja kompressiota sekä lämmittää paikallisesti
- Lämmittävän vaikutuksen hyödyt: parantaa nivelen verenkiertoa ja lihasten reagoitokykyä, vähentää tulehdusreaktiota, lievittää kipua mahdollistaen liikunnan lisäämisen
- Lisäkirimien avulla olkapäätä saadaan tuettua yksilöllisesti ja ohjattua kohti haluttua asentoa
- Olkavarren osan sisäpinnan kitkapintainen NRX®-materiaali yhdessä alareunan tarrakiinnityksen kanssa pitävät tuen hyvin paikoillaan
- Tuotetta voi käyttää sekä vasemmalla että oikealla muuttamalla remmin kiinnitystä

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään olkavarren ympärysmittan mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Olkavarren ympärys
SRX811-XS	XS	24-28 cm
SRX811-S	S	28-32 cm
SRX811-M	M	32-35 cm
SRX811-L	L	35-38 cm
SRX811-XL	XL	38-41 cm



MEDIROYAL | SRX810

SRX® Olkatuki

Kuten SRX Olkatuki X ilman lisäkirimisiä

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään olkavarren ympärysmittan mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Olkavarren ympärys
SRX810-XS	XS	24-28 cm
SRX810-S	S	28-32 cm
SRX810-M	M	32-35 cm
SRX810-L	L	35-38 cm
SRX810-XL	XL	38-41 cm

ORTHOSERVICE | M24017



Elbo Pro

Kyynärortoosi liikelaajuutta rajoittavalla nivelellä

Käyttöaiheet

- Kyynärpään, olkavarren alaosan ja kyynärvarren yläosan yhdistelmämurto
- Postoperatiivinen immobilisointi
- Kuntoutusvaiheen tuenta kyynärpäämurtumien jälkeen
- Kyynärpään subluksaatiot ja sijoiltaanmenot
- Krooniset kyynärpäävammat
- Kyynärpään yli liikkuvuus
- Posttraumaattinen hoito

Ominaisuudet

- Yksi koko sopii kaikille
- Kevyt rakenne
- Kiskossa helppokäyttöinen teleskooppisäätö
- Muokattavuus parantaa yksilöllistä istuvuutta
- Helppokäyttöinen nivelen rajoitus ekstensio-fleksio -suunnassa
- Fleksiosäätö mahdollista 10° välein -10°-120°
- Ekstensiosäätö mahdollista 10° välein -10°-120°
- Nivel voidaan lukita pikalukituksella 10° välein -10°-90° asentoihin
- Paketin mukana tulee tukikahva, jolla käden saa tarvittaessa tuettua neutraaliasentoon
- Pituussäädettävät remmit
- Tuotepakettiin kuuluu pituussäädettävä, pehmustettu hartiaremmi
- Lycrapinnoitettu pehmuste lisää käyttömukavuutta
- Vasen ja oikea puoli erikseen
- Koko universaali

Koko- ja tilaustiedot

Yhden koon tuki sopii kaikille.

Kiskojen pituutta voidaan säätää 36-46 cm:n välillä.

Erikseen oikea ja vasen puoli.

Kaula

Olka • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilikka • Jalka

Lapset



Koko- ja tilaustiedot

Koko määräytyy kyynärpään ympärysmittan mukaan.

MEDIROYAL | MR2250

Ulnaris-kyynärortoosi

Kyynärhermopinteen (n. ulnaris) hoitoon

Käyttöaiheet

- Kyynärhermon pinnetila (ulnaarihermo)
- Cubital tunnel -syndrooma
- Murtuman jälkeinen hoito

Ominaisuudet

- Kaksi eri kyynärnivelen fleksiota estävää lastavaihtoehtoa: alumiinilasta ja lämpömuovattava muovilasta
- Materiaalit: hengittävä TriTex ja kyynärtaiteessa pehmeyttä tuova SoftTex

Tuotekoodi	Koko	Kyynärpään ympäryys
MR02250001009	XS	16-20 cm
MR02250001109	S/M	20-25 cm
MR02250001209	L/XL	25-31 cm
MR02250001309	XXL	31-38 cm



MEDIROYAL | ARX288

ARX Ulnar-Flex®

Käyttöaiheet

- Kyynärhermon instabiliteetti
- Kyynärpääkanavan oireyhtymä
- Murtuman jälkeinen hoito aktiivisen kyynärpään fleksion estämiseksi

Ominaisuudet

- Estää tehokkaasti kyynärnivelen fleksion.
- Ortoosi on valmistettu hengittävästä ARX®-materiaalista, jonka pinnassa on silmukkakudosta. Neptune™-materiaali muodostaa ohuen ja hengittävän alueen käsivarren taittokohtaan yli.
- Kaksi alumiinista valmistettua tukea on sijoitettu ulkoisiin taskuihin. Ne voidaan muotoilla yksilöllisesti tehokkaan fleksiotuen aikaansaamiseksi.
- Kyynärtaiteen kohdalla olevaan taskuun voidaan asentaa vaahtomuovityyny, joka pehmentää ja tasaa painetta.

Koko- ja tilaustiedot

Koko määräytyy ympärysmittalla 5 cm kyynärnivelen alapuolelta.

Tuotekoodi	Koko	Ympäryys
ARX288-1	S/M	20-25 cm
ARX288-2	L/XL	25-31 cm
ARX288-3	XXL	31-38 cm



Tuotekoodi	Koko	Kyynärpään ympäryys
07517-0-9188-S	S	< 23 cm
07517-0-9188-M	M	24–26 cm
07517-0-9188-L	L	27–29 cm
07517-0-9188-XL	XL	30–32 cm
07517-0-9188-XXL	XXL	> 33 cm



Tuotekoodi	Koko	Kyynärpään ympäryys
07515-0-9188-S	S	< 26 cm
07515-0-9188-M	M	26–28 cm
07515-0-9188-L	L	28–30 cm
07515-0-9188-XL	XL	30–32 cm
07515-0-9188-XXL	XXL	> 32 cm

SPORLASTIC | 07517

Epidyn® Stabil

Puristetta antava elastinen kyynärnivelen tuki sivuvahvikkeilla

Käyttöaiheet

Postoperatiivinen ja konservatiivinen kuntoutus, kyynärpään sivusiteiden lievä epävakaussivutus/löysyys, tennis- tai golfkyynärpää (epicondylitis), lievä kyynärnivelen kuluma, reuma

Ominaisuudet

- Tukee kyynärniveltä ja vähentää painetta jänteiden kiinnitysalueilta
- Spiraaliset sivutuet antavat kyynärnivellelle hieman sivuttaistukea
- Silikoniset tukityyny kyynärvarren lihasten päällä lateraalisesti ja mediaalisesti parantavat aineenvaihduntaa ja vähentävät painetta lihasten kiinnitysalueilta
- Vähentää kipua
- Parantaa kyynärnivelen proprioseptiikkaa
- Korkealaatuinen, laakakudottu ja hengittävä materiaali takaa tehokkaan ja miellyttävän puristeen
- Puolieroton

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään kyynärpään ympärysmittaan mukaan.

SPORLASTIC | 07515

Epidyn® Aktiv

Puristetta antava elastinen kyynärnivelen tuki

Käyttöaiheet

- Kyynärnivelen tulehdus: krooninen (pitkittynyt tila), vamman jälkitila (venähdys, nivelsidelöysyys), leikkauksen jälkitila
- Tennis- tai golfkyynärpää (epicondylitis)
- Lievä kyynärnivelen kuluma, reuma
- Limapussin tulehdukset (bursitis)

Ominaisuudet

- Tukee kyynärniveltä ja vähentää painetta jänteiden kiinnitysalueilta
- Silikoninen tukityyny nystyröillä antaa mikrohierontaa ja parantaa aineenvaihduntaa
- Vähentää kipua
- Irrallinen, lisäpainetta antava elastinen tarraremmi kyynärvarren yläosaan asennettavaksi
- Korkealaatuinen, laakakudottu ja hengittävä materiaali tuottaa tehokkaan ja miellyttävän puristeen
- Puolieroton

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään kyynärpään ympärysmittaan mukaan.

Kaula

Olka • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset

Olka- ja kyynärtuet

Kyynärtuet



Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään kyynärnivelen ympärysmittan mukaan.

MEDIROYAL | SRX820

SRX®-kyynärtuki

Kevyt kompressiota ja lämpöä tuottava kyynärtuki

Käyttöaiheet

Kyynärpään alueen paikalliset tulehdukset ja kiputilat, lievä instabiliteetti, lihasrevähdykset

Ominaisuudet

- Antaa kevyttä tukea, puristetta ja kohdennettua lämpövaikutusta kyynärnivellelle
- Suunniteltu erityisesti tukemaan liikkumista ja liikunnallista arkea
- Neopreenipohjaisen, 3 mm ohuen SRX-materiaalin lämmittävä vaikutus parantaa verenkiertoa ja lihasten reagoitokykyä, vähentää tulehdusreaktiota ja lievittää kipua
- Neptune-vuorimateriaali pitää ihon pinnan kuivana
- Tuen ylä- ja alaosassa on tarrat, joiden avulla kireyden voi säätää yksilöllisesti sopivaksi

Tuotekoodi	Koko	Kyynärnivelen ympärys
SRX820-XS	XS	20-23 cm
SRX820-S	S	23-25 cm
SRX820-M	M	25-28 cm
SRX820-L	L	28-31 cm
SRX820-XL	XL	31-33 cm



Koko- ja tilaustiedot

Yksi koko. Sopii kaikille, joiden kyynärvarren paksuimman kohdan ympärysmitta on maksimissaan 37 cm.

SPORLASTIC | 07236

Cupidyn

Laadukas kyynärvarren epikondyliittituki silikonisella tukityynyllä

Käyttöaiheet

Mediaalinen tai lateraalinen epikondyliitti (tennis-/golfkyynärpää)

Ominaisuudet

- Irrotettava silikoninen tukityyny
- Tukityynyn avulla lihasmassan päälle kohdistettu paine vähentää kipua ja lihasten kiinnityskohtien painetta sekä parantaa proprioseptiikkaa
- Silikoninen tukityyny antaa mikrohierontaa parantaen aineenvaihduntaa
- Puolieroton
- Väri musta, saatavana myös beige

Tuotekoodi	Koko
07236	Yksi koko



ORTHOCARE | 3110

Epicare Brace

Laadukas kyynärvarren epikondyliittituki

Käyttöaiheet

- Mediaalinen tai lateraalinen epikondyliitti (tennis- ja golfkyynärpää)

Ominaisuudet

- Irrotettava tukityyny
- Tukityynyn avulla lihasmassan päälle kohdistetaan paine, joka vähentää kipua ja lihasten kiinnityskohtien painetta sekä parantaa proprioseptiikkaa
- Tuen napakka ja joustamaton mansettiosa sekä elastinen kiristysnauha luovat miellyttävän dynaamisen puristeen
- Puolieroton, käännä tukityyny puolen mukaisesti

Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi	Koko
3110	Yksi koko



ORTHOCARE | 3120

Epicare

Kyynärvarren epikondyliittituki tukipelotilla

Käyttöaiheet

- Mediaalinen tai lateraalinen epikondyliitti (tennis-/golfkyynärpää)

Ominaisuudet

- Tukee lihaksistoa ja vähentää painetta jänteiden kiinnitysalueelta
- Helppo tarrakiinnitys
- Irrotettava tukityyny

Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi	Koko
3120	Yksi koko

Kaula

Olka • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset

Ranne- ja käsituet

Lepo- ja asentohoitolastat

- 31** Resto Basic
- 32** Resto Plus
- 33** S.O.T lepo-ortoosi
- 34** Tonus 405
- 35** Tonus 406
Resto Dyfex
- 36** NRX Manex Radial 2.0

Rannetuet

- 37** Polfit 19 lyhyt
Polfit 21 pitkä
- 38** Ventus Lace-Up
Ventus Lace-Up lyhyt
- 39** Ventus Lace-Up Light lyhyt
Manex Ulnar
- 40** Manu-Hit
Manu-Hit Carpal
- 41** NRX Ulnarideviaatio -ortoosi
- 42** Origo Nova ja Beige
- 43** Origo Nova Plus
- 44** Origo Nova pitkä
- 46** Ventus lyhyt
- 47** Ventus pitkä
- 48** Manucare Stable
Manucare
- 49** NRX Tendens
Universal-rannetuki lyhyt ja pitkä
- 50** SRX Universal -rannetuki

Peukalorannetuet

- 50** SRX Universal
-peukalorannetuki
- 51** Polfit 22
Polfit 17
- 52** Ventus Lace-Up
-peukalorannetuki
- 53** Manu-Hit Pollex
- 54** Ventus-peukalorannetuki
- 55** Manucare Plus

Peukalotuet

- 56** Rhizo-Hit
Daumfix
- 57** Proxi Plus
Proxi Light
- 58** Proxi Ultra
Proxi UCL
- 59** Proxi DeQuervain
Proxi CMC
- 60** Thenacare
NRX C-GO
- 61** NRX 202
Rhizo-Ring Soft

Sormituet

- 62** Sormen ekstensiojousi pitkä
Sormen ekstensiojousi lyhyt
- 63** Proxi DC Splint
Proxi Trigger Finger
- 64** Proxi DIP/PIP
Multi Finger Splint
- 65** Exto-15
Oval-8
- 66** Mallet Splint
- 67** NRX Strap Kit -sisarlenkki
ARX Buddy Loops

MEDIROYAL | E25

Resto Basic

Lepo-ortoosi

Spastisen tai pareettisen käden asentohoitoon tarkoitettu lepo-ortoosi liikkuvuuden ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi.

Käyttöaiheet

- Halvauksen jälkeinen tuenta
- CP-vamma
- Reumaattinen artriitti
- Radiaalinen pareesi
- Lihasdystrofia
- Ödeema
- Plexus-vaurio

Ominaisuudet

- Pehmustettu alumiinilasta kämmenpuolella
- Lastaa voidaan muotoilla tilanteen ja potilaan toipumisen mukaan
- Tuettu peukalo
- Hengittävä ja kosteutta siirtävä Neptune-vuori
- Pehmustetut remmit
- Konepesu 40°
- Myös lasten koko
- Saatavilla myös tukevampi malli Resto Plus

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään kämmenen leveyden mukaan.
Erikseen oikea ja vasen puoli.

Tuotekoodi	Kämmenen leveys	Koko	Puoli
E25-XS	45–65 mm	XS	vas/oik
E25-S	60–75 mm	S	vas/oik
E25-M	70–85 mm	M	vas/oik
E25-L	85–95 mm	L	vas/oik
Lisäosa	Kuvaus	Koko	Puoli
TON812	Sormierottelija	1 koko	puolieroton



Kaula

Oika • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilikka • Jalka

Lapset

Ranne- ja käsituet

Lepo- ja asento-ortoosilastat



MEDIROYAL | E26

Resto Plus

Vahva lepolasta spastisuuden hoitoon

Vahva spastisen tai pareettisen käden asento- ja liikkuvuuden ylläpitoon tarkoitettu lepo-ortoosi vaihdettavalla sisävuorella.

Käyttöaiheet

- Halvauksen jälkeinen tuenta
- CP-vamma
- Reumaattinen artriitti
- Radiaalinen pareesi
- Lihasdystrofia
- Ödeema
- Plexus-vauriot

Ominaisuudet

- Hyvin pehmustettu alumiinilasta kämmenpuolella
- Lastaa voidaan muotoilla tilanteen ja toipumisen mukaan
- Tuettu peukalo
- Hengittävä ja kosteutta siirtävä Neptune-vuori
- Neptune-vuoren saa irrotettua lastasta itse itseensä kiinnittyvän ARX-pinnan avulla
- Vaihtopäällinen (Neptune-vuori) lisäosana 5 kpl/pkt
- Resto Basic -malliin verraten tuessa myös kämmenselän ja ranteen ylikulkeva lisäremmi ranteen fleksion kontrollointiin
- Koko ortoosin pesu 40°, vuoren pesu 60°

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään kämmenen leveyden mukaan.

Erikseen oikea ja vasen puoli.

Tuotekoodi	Kuvaus	Koko	Kämmenen leveys	Puoli
E26-R/S	Resto Plus	S	60–75 mm	oikea
E26-R/M	Resto Plus	M	70–85 mm	oikea
E26-R/L	Resto Plus	L	85–95 mm	oikea
E26-L/S	Resto Plus	S	60–75 mm	vasen
E26-L/M	Resto Plus	M	70–85 mm	vasen
E26-L/L	Resto Plus	L	85–95 mm	vasen
E26N-R/S	Vaihtopäällinen 5 kpl	S		oikea
E26N-R/M	Vaihtopäällinen 5 kpl	M		oikea
E26N-R/L	Vaihtopäällinen 5 kpl	L		oikea
E26N-L/S	Vaihtopäällinen 5 kpl	S		vasen
E26N-L/M	Vaihtopäällinen 5 kpl	M		vasen
E26N-L/L	Vaihtopäällinen 5 kpl	L		vasen
TON812	Sormierottelija	1 koko		puolieroton



CAMP | 28710

S.O.T lepo-ortoosi

S.O.T (Smart Orthotic Treatment) lepo-ortoosi on tarkoitettu spastisen tai pareettisen käden liikkuvuuden ylläpitämiseen tai lisäämiseen.

Käyttöaiheet

Halvaus, CP-vamma, reumaattinen artriitti, radiaalinen pareesi, lihasdystrofia, ödeema, plexus-vaurio

Ominaisuudet

- Modernin näköinen, rakenteeltaan linjakas ja kevyt
- Alumiininen runko, joka muotoiltavissa haluttuun asentoon
- Matalan profiilin ja materiaalin ansiosta se sopii hyvin vaatteiden alle
- Ranteen lisätukemisessa voidaan käyttää joustamatonta lisänauhaa
- Toimitetaan lepoasentoon asennettuna: helpottaa särkyä, rentouttaa kättä sekä antaa hyvän biomekanisen asennon ennaltaehkäisten sormien koukistajalihasen kontraktuuraa
- Voidaan muotoilla nk. kuntoutusasentoon
- Anatominen muotoilu tukee tärkeitä thenar-lihaksia sekä peukalon CMC- ja MCP-niveliä, mitkä ovat erityisen tärkeitä edellä mainituille kohderyhmille, sillä peukalolla on taipumus loitontaa CMC-niveltä ja yliojentaa MCP-niveltä

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään kämmenen leveyden ja pituuden mukaan.

Tuotekoodi	Puoli	Koko	Kämmenen leveys	Kämmenen pituus
287101008	vasen	XXXS	5,5 cm	< 12 cm
287101009	vasen	XXS	≤ 6,5 cm	≤ 14 cm
287101010	vasen	XS	≤ 7,5 cm	≤ 16 cm
287101011	vasen	S	≤ 7,5 cm	≤ 18,5 cm
287101012	vasen	M	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm
287101013	vasen	L	≤ 9 cm	≤ 21 cm
287102008	oikea	XXXS	5,5 cm	< 12 cm
287102009	oikea	XXS	≤ 6,5cm	≤ 14 cm
287102010	oikea	XS	≤ 7,5 cm	≤ 16 cm
287102011	oikea	S	≤ 7,5 cm	≤ 18,5 cm
287102012	oikea	M	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm
287102013	oikea	L	≤ 9 cm	≤ 21 cm

Lisäosat

Tuote-koodi	Kuvaus	Puoli	Koko	Väri
28711	MCP kiila	puolieroton	XXS-S-L	
28712	Sormien erottelija	puolieroton	Lasten-M-L	
28713	SOT lisänauha	puolieroton	XXXS/XS – S/L	
28714	Lisäsuojus	oik/vas	XXXS – L	
28726	SOT lisäkangas		35 × 35 cm	musta
28727	SOT tarranauha kova		10 × 30 cm	musta

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilikka • Jalka

Lapset

Ranne- ja käsituet

Lepo- ja asentohoitolastat



MEDIROYAL | TON405

Tonus 405

Lasta spastisuuden vähentämiseksi

Käyttöaiheet

- Lihasjänteiden - ja jäykkyyden vähentäminen

Ominaisuudet

- Anatomisesti muotoiltu rannelasta ilmatyynyllä ja peukalo-otteella
- Lasta pitää käden oikeassa asennossa ylläpitäen sen passiivista liikerataa ja estää paineen tunnetta
- Ilmalla täytettävä tyyny ojentaa rannetta dynaamisesti
- Haetaan pitkäaikaista submaksimaalista venytystä ranteen ja sormien kireille fleksori-jänteille (koukistavat jänteet) refleksikaaren yliherkkyyden vähentämiseksi
- Kämmentä vasten tuleva ilmatyyny tukee sormien tyviniveliä hyvään asentoon ja samalla ojentaa hellästi sormien keski- ja tyviniveliä
- Käyttöaika: 1–2 h, 2–3 krt/vrk
Vaikutus näkyy 3–6 kk käytön jälkeen
- Säädetään yksilöllisesti
- Runko alumiinia, helppo muotoilla/taivuttaa pöydän reunaa vasten
- Hyvin pehmustettu runko
- Päällinen on hengittävä, kosteutta säätelevä ja painetta tasaava
- Konepesu 60°
- Lisäosana Tonus-sormierottelija TON812

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään kämmenen leveyden mukaan.

Tuotekoodi	Puoli	Koko	Kämmenen leveys
TON405-CPL	vasen	Pediatric/Geriatric	45-90 mm
TON405-CSL	vasen	Standardi	90-130 mm
TON405-CXL	vasen	Extra Pitkä	90-130 mm
TON405-CPR	oikea	Pediatric/Geriatric	45-90 mm
TON405-CSR	oikea	Standardi	90-130 mm
TON405-CXR	oikea	Extra Pitkä	90-130 mm

Lisäosat

Tuotekoodi	Kuvaus	Puoli	Koko
TON405-C	Vaihtopäällinen	vas/oik	aikuiset, XL, lapset
TON812	Sormierottelija	puolieroton	1 koko



MEDIROYAL | TON406

Tonus 406

Antispastilasta ranteen ulnaari-radialisäädöllä

Kuten Tonus 405, mutta lisäksi ranteen rotaatioadapteeri, jolla ranteen ulnaari- ja radiaalideviaatiota voidaan säätää tarpeen mukaan.

Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi	Puoli	Koko	Kämmenen leveys
TON406-CPL	vasen	Pediatric/Geriatric	45-90 mm
TON406-CSL	vasen	Standardi	90-130 mm
TON406-CXL	vasen	Extra Pitkä	90 -130 mm
TON406-CPR	oikea	Pediatric/Geriatric	45-90 mm
TON406-CSR	oikea	Standardi	90-130 mm
TON406-CXR	oikea	Extra pitkä	90-130 mm

Lisäosat

Tuotekoodi	Kuvaus	Puoli	Koko
TON406-C	Vaihtopäällinen	vas/oik	aikuiset, XL, lapset
TON812	Sormierottelija	puolieroton	1 koko



MEDIROYAL | E28

Resto Dyfex®

Käyttöaiheet

Käden, sormien sekä ranteen toiminnallinen tuenta potilaille, joilla on kohtalainen tai voimakas spastisiteetti, esim. botulinum injektioiden yhteydessä. Mikäli potilaan ranteen kontraktuura on yli 45 astetta, saattaa tuen teho ranteen-/käden spastisuuteen heikentyä.

Ominaisuudet

- Resto Dyfex® Dynamic Finger Extension on uusi konsepti spastisen käden hoitoon, yhdistelmä staattisesta ja dynaamisesta ortoosista.
- Kaksi integroitua ilmakammiota mahdollistavat sormien asennon yksilöllisen säätämisen ja tuen, mikä on välttämätöntä sekä lihasjännityksen estämiseksi että kontraktuurien ehkäisemiseksi.
- Ilmatyyny täytetään potilaskohtaisesti mukana tulevalla pumpulla ja niiden täyttöastetta voidaan vaihdella aina tarpeen- ja tilanteen mukaan.
- Venttiilit sijaitsevat sormialustan ulnaari-puolella, jotta niihin on helppo päästä käsiksi.
- Runko päällystetty CR-vahtomuovilla, jolla on paineen siirtämisominaisuus.
- Päällisen materiaali mikrokuitua, joka tarjoaa sekä korkean mukavuuden että kosteuden siirtymisen. Mikrokuitu kiinnittyy koukuttomasti vuorikankaaseen, joten kansi on helppo laittaa paikoilleen ja poistaa ilman koukku- ja silmukkakiinnitystä.
- Vuori voidaan pestä pesukoneessa 60°, vaihtovuori tilattavissa

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään kämmenen leveyden mukaan.

Tuote-koodi	Puoli	Koko	Kämmenen leveys
E28-LS	vasen	S	60-75 mm
E28-LM	vasen	M	75-85 mm
E28-LL	vasen	L	85-95 mm
E28-RS	oikea	S	60-75 mm
E28-RM	oikea	M	75-85 mm
E28-RL	oikea	L	85-95 mm

Ranne- ja käsituet

Lepo- ja asentohoitolastat



MEDIROYAL | MR2285

NRX[®] Manex Radial 2.0

Ainutlaatuinen rannetuki erityisesti radialispareesin oireisiin

Käyttöaiheet

- Korvata ja tukea heikkoa lihasvoimaa, sekä mahdollistaa sormien toiminnallinen ote radialispareesi-potilaille
- Karpaalitunneli-syndrooma
- "Hiirikäsi" / vaikea epikondyliitti
- Post traumaattisesti esim. radiusmurtumat, sormien ulnaari-vammat
- MCP-nivelten subluksaatio esim. reumatoidin artriitin seurauksena

Ominaisuudet

- Ortoosi koostuu neljästä osasta: sormilenkit, peukalo-osa, vesihauteessa (n. 70°C) muovattava dorsaalilasta sekä pehmeä kämmennauha
- Ohut ja joustava NRX-materiaali
- Tukeva peukalo-osa

Koko- ja tilaustiedot

Koko määrittyy ranteen ympärysmittalla.

Tuotekoodi	Puoli	Koko	Ranteen ympärys
MR02285100309	vasen	XS	13-14 cm
MR02285100409	vasen	S	14-16 cm
MR02285100509	vasen	M	16-18 cm
MR02285100609	vasen	L	18-20 cm
MR02285100709	vasen	XL	20-22 cm
MR02285200309	oikea	XS	13-14 cm
MR02285200409	oikea	S	14-16 cm
MR02285200509	oikea	M	16-18 cm
MR02285200609	oikea	L	18-20 cm
MR02285200709	oikea	XL	20-22 cm



Tuotekoodi	Puoli	Koko	Ranteen ympärys
MP1119R-S	oikea	S	13–16 cm
MP1119R-M	oikea	M	16–18 cm
MP1119R-L	oikea	L	18–20 cm
MP1119R-XL	oikea	XL	20–23 cm
MP1119L-S	vasen	S	13–16 cm
MP1119L-M	vasen	M	16–18 cm
MP1119L-L	vasen	L	18–20 cm
MP1119L-XL	vasen	XL	20–23 cm



Tuotekoodi	Puoli	Koko	Ranteen ympärys
MP1121R-S	oikea	S	13–16 cm
MP1121R-M	oikea	M	16–18 cm
MP1121R-L	oikea	L	18–20 cm
MP1121R-XL	oikea	XL	20–23 cm
MP1121L-S	vasen	S	13–16 cm
MP1121L-M	vasen	M	16–18 cm
MP1121L-L	vasen	L	18–20 cm
MP1121L-XL	vasen	XL	20–23 cm

ORTHOSERVICE | MP1119

PolFIT 19 lyhyt

Tukeva rannetuki, pituus 20 cm

Käyttöaiheet

- Ranteen vammat ja jännetulehdukset
- Artriitti ja artroosi ranteessa
- Rannemurtuman hoito kipsihoidon jälkeen
- Murtumat radiuksessa tai ulnassa

Ominaisuudet

- Tuki avattavissa kokonaan tai pidettävissä umpinaisena
- Esimuotoiltu alumiinilasta kämmenpuolella
- Lasta muotoiltavissa käsin
- Hengittävä kangasmateriaali
- Dorsaalipuolella muoviset lastat antamassa lisätukea
- Tarranauhakiinnitys soljilla

Koko- ja tilaustiedot

Koko määrittyy ranteen ympäryksmitalla.

ORTHOSERVICE | MP1121

PolFIT 21 pitkä

Tukeva rannetuki, pituus 26 cm

Käyttöaiheet

- Radiuksen tai ulnan distaalinen vakaa murtuma
- Postoperatiivinen hoito radiuksen tai ulnan epävakaan murtuman leikkaushoidon jälkeen
- Karpaaliluiden murtumat, poislukien scaphoideumin murtuma
- Postoperatiivinen hoito metakarpaaliluiden murtumissa
- Reuman aiheuttamat komplikaatiot

Koko- ja tilaustiedot

Koko määrittyy ranteen ympäryksmitalla.

Kaula

Oika • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilikka • Jalka

Lapset

Ranne- ja käsituet

Rannetuet



Tuotekoodi	Puoli	Koko	Ranteen ympärys
MR02229100209	vas	XXS	12-13 cm
MR02229100309	vas	XS	13-14 cm
MR02229100409	vas	S	14-16 cm
MR02229100509	vas	M	16-18 cm
MR02229100609	vas	L	18-20 cm
MR02229100709	vas	XL	20-22 cm
MR02229100809	vas	XXL	22- cm
MR02229200209	oik	XXS	12-13 cm
MR02229200309	oik	XS	13-14 cm
MR02229200409	oik	S	14-16 cm
MR02229200509	oik	M	16-18 cm
MR02229200609	oik	L	18-20cm
MR02229200709	oik	XL	20-22 cm
MR02229200809	oik	XXL	22- cm



Tuotekoodi	Puoli	Koko	Ranteen ympärys
MR02279100309	vas	XS	13-14 cm
MR02279100409	vas	S	14-16 cm
MR02279100509	vas	M	16-18 cm
MR02279100609	vas	L	18-20 cm
MR02279100709	vas	XL	20-22 cm
MR02279100809	vas	XXL	22- cm
MR02279200309	oik	XS	13-14 cm
MR02279200409	oik	S	14-16 cm
MR02279200509	oik	M	16-18 cm
MR02279200609	oik	L	18-20 cm
MR02279200709	oik	XL	20-22 cm
MR02279200809	oik	XXL	22- cm

MEDIROYAL | MR2229

Ventus™ Lace-Up

Nyöriallinen rannetuki

Käyttöaiheet

Ranteen yli liikkuvuus, luunmurtumien ja leikkauksien jälkeen, jännetulehdus, rannekanavaoireyhtymä, reumaattiset vaivat (esim. niveltulehdus)

Ominaisuudet

- Nyöritys helpottaa ortoosin pukemista esim. potilailla, joilla sormien ote on rajoittunut.
- Nyörityksen ja iltin ansiosta ortoosin voi pukea kuin käsineen, säätää tuennan kireyden optimaaliseksi ja kiinnittää ortoosin toisella kädellä.
- Rannenivelen kohdalla on dynaaminen sauma, joka tarjoaa lastalle lisätuentaa kuormituksessa.
- Tuote on valmistettu Ventus™-materiaalista, jonka ulkopinta on silmukakuvioinen. Tämä mahdollistaa NRX®-koukun kiinnittämisen nauhoitusjärjestelmään mihin tahansa ortoosin pinnalle. Ventus™-materiaalissa on mikrofleecevuori, joka on mukava ja hengittävä.
- Kaksinkertainen nailonkangas takaa lastataskun kestävyys.
- Ortoosin peukalolenkki on säädettävä.
- Mukana tulee lyhyt vakiomallinen rannelasta.

Koko- ja tilaustiedot

Koko määrittyy ranteen ympärysmittaan mukaan.

Oikea ja vasen puoli erikseen.

MEDIROYAL | MR2279

Ventus™ Lace-Up lyhyt

Lyhyt nyöriallinen rannetuki

Käyttöaiheet

Ranteen instabiliteetti, jännetulehdus, tenniskyynärpää (epikondyliitti)

Ominaisuudet

- Helppo pukea nyörikiristyksen avulla.
- Miellyttävän lyhyt ja ohut malli.
- Lyhyestä pituudestaan huolimatta yllättävän vahva tuenta.
- Tarran voi kiinnittää mihin kohtaan tahansa tukea.
- Tuki on valmistettu Ventus™-materiaalista, joka on hengittävä ja ihoystävällinen materiaali, jota on mukava käyttää.
- Tuen tukevuutta parantaa kämmenpuolella oleva anatomisesti muotoiltu metallinen tukilasta.
- Tukilasta voi ottaa pois, mikäli tuennan määrää haluaa vähentää.

Koko- ja tilaustiedot

Koko määrittyy ranteen ympärysmittaan mukaan.

Oikea ja vasen puoli erikseen.



Tuotekoodi	Puoli	Koko	Ranteen ympärys
MR02279100309	vas	XS	13-14 cm
MR02279100409	vas	S	14-16 cm
MR02279100509	vas	M	16-18 cm
MR02279100609	vas	L	18-20 cm
MR02279100709	vas	XL	20-22 cm
MR02279100809	vas	XXL	22-24 cm
MR02278200309	oik	XS	13-14 cm
MR02278200409	oik	S	14-16 cm
MR02278200509	oik	M	16-18 cm
MR02278200609	oik	L	18-20 cm
MR02278200709	oik	XL	20-22 cm
MR02278200809	oik	XXL	22-24 cm



Tuotekoodi	Puoli	Koko	Ranteen ympärys
MR02241100309	vas	XS	12-14 cm
MR02241100409	vas	S	14-16 cm
MR02241100509	vas	M	16-18 cm
MR02241100609	vas	L	18-20 cm
MR02241100709	vas	XL	20-22 cm
MR02241200309	oik	XS	12-14 cm
MR02241200409	oik	S	14-16 cm
MR02241200509	oik	M	16-18 cm
MR02241200609	oik	L	18-20 cm
MR02241200709	oik	XL	20-22 cm

MEDIROYAL | MR2278

Ventus™ Lace-Up Light lyhyt

Lyhyt nyöriäinen rannetuki

Käyttöaiheet

Ranteen instabiliteetti, jännetulehdus, tenniskyynärpää (epikondyliitti)

Ominaisuudet

- Helppo pukea nyörikiristyksen avulla
- Miellyttävä, ohut malli
- Lyhyestä pituudestaan huolimatta vahva tuenta
- Tarran voi kiinnittää mihin kohtaan tahansa tukea
- Tuki on valmistettu Ventus™-materiaalista, joka on hengittävä ja ihoystävällinen materiaali, jota on mukava käyttää.

Koko- ja tilaustiedot

Koko määrittyy ranteen ympärysmittaan mukaan. Oikea ja vasen puoli erikseen.

MEDIROYAL | MR2241

Manex Ulnar

Ranne- ja sormituki ulnaarideviaation tuentaan

Käyttöaiheet

Ranteen ja sormien virheasennot, reumaattiset tulehdukset, MCP-nivelten tuenta ulnaarideviaatio-virheasennossa

Ominaisuudet

- Helppokäyttöinen
- Neljä keinoa tukea ulnaarideviaatiota: 1) Sormien MCP-nivelille omat säädettävät tukisiteet, joilla jokainen sormi voidaan tukea oikeaan asentoon. 2) Ulnaarisesti ranteen suuntainen tukilasta, joka on yksilöllisesti muotoiltavissa. Estää ranteen zig-zag-virheasentoa ja tukee MCP V:sta. 3) Kämmenten puolen tukilasta antaa yleistukea ja toimii yhdessä ulnaarisen lastan kanssa. Nyörikiinnityksellä tuentaa voidaan kohdentaa yksilöllisesti. 4) Tuen mukana tulee lisäkiristin ranteelle, jolla tuentaa voidaan lisätä.
- Nyörikiinnitys helpottaa pukemista ja riisumista sekä lisää istuvuutta
- Ulkopinnan materiaaliin voi kiinnittää tarran mihin kohtaan tahansa
- Hengittävä ja kosteutta siirtävä Neptune™-materiaali

Koko- ja tilaustiedot

Koko määrittyy ranteen ympärysmittaan mukaan. Oikea ja vasen puoli erikseen.

Kaula

Oika • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilikka • Jalka

Lapset

Ranne- ja käsituet

Rannetuet



Tuotekoodi	Puoli	Koko	Ranteen ympärys
07035-1-9188-XS	vas	XS	< 15 cm
07035-1-9188-S	vas	S	15-17 cm
07035-1-9188-M	vas	M	17-19 cm
07035-1-9188-L	vas	L	19-22 cm
07035-1-9188-XL	vas	XL	>22 cm
07035-2-9188-XS	oik	XS	<15 cm
07035-2-9188-S	oik	S	15-17 cm
07035-2-9188-M	oik	M	17-19 cm
07035-2-9188-L	oik	L	19-22 cm
07035-2-9188-XL	oik	XL	> 22 cm



Tuotekoodi	Puoli	Koko	Ranteen ympärys
07233-1-9008-XS	vas	XS	13-15 cm
07233-1-9188-S	vas	S	15-17 cm
07233-1-9188-M	vas	M	17-19 cm
07233-1-9188-L	vas	L	19-22 cm
07233-1-9188-XL	vas	XL	22-25 cm
07233-2-9188-XS	oik	XS	13-15 cm
07233-2-9188-S	oik	S	15-17 cm
07233-2-9188-M	oik	M	17-19 cm
07233-2-9188-L	oik	L	19-22 cm
07233-2-9188-XL	oik	XL	22-25 cm

SPORLASTIC | 07035

Manu-Hit®

Nykyaikainen laadukas rannetuki

Käyttöaiheet

Konservatiivinen tai postoperatiivinen hoito, jännetupen tulehdukset ranteen kuluma, ranteen rasitusvammat, kämmenen karpaaliluiden vammat, tuenta kipsihoidon jälkeen, reuma, veneluun vammat, rannekanavaoireyhtymä

Ominaisuudet

- Ranteen hyvä tuenta ja liikkeen vähentäminen
- Liikkeen ja rasituksen vähentäminen karpaaliluissa, nivelkapseleissa ja nivelsiteissä
- Hyvä ranteen ja kämmenen tuki, mutta vapaa peukalon ja sormien liike
- Anatomisesti muotoiltu rakenne takaa hyvän tuen ja istuvuuden
- Metalliset muotoillut tukilastat volaarisesti, dorsaalisesti ja peukalon ympärillä
- Helppo muotoilla yksilölliseen muotoon, volaariset tukilastat voi poistaa tuentaa keventäessä
- Väri harmaa, saatavana myös mustana

Koko- ja tilaustiedot

Koko määrittyy ranteen ympärysmittaan mukaan. Oikea ja vasen puoli erikseen.

SPORLASTIC | 07233

Manu-Hit® Carpal

Rannetuki rannekanavaoireyhtymän hoitoon

Käyttöaiheet

Rannekanavaoireyhtymä / Canalis Carpi, sormien ja käden kipu ulnaarihermon alueella, jännetulehdus, postoperatiivinen käyttö

Ominaisuudet

- Päivä- ja yökäyttöön
- Lasta ohjaa ranneniveltä neutraaliasentoon
- Alumiinisia tukilastoja voi tarvittaessa muotoilla
- Tuki vähentää painetta rannekanavalta (Lisäpelotti jättää rannekanavan alueen vapaaksi ja jakaa painetta tasaisemmin ranteen alueelle)
- Kolme remmiä mahdollistavat optimaalisen kireyden koko tuen alueelle
- Peukaloremmin kiinnityspaikkaa mahdollista säätää
- Väri harmaa, saatavana myös mustana

Koko- ja tilaustiedot

Koko määrittyy ranteen ympärysmittaan mukaan. Oikea ja vasen puoli erikseen.



MEDIROYAL | MR2202

NRX® Ulnarideviaatio -ortoosi

Ranne- ja sormituki ulnarideviaation tuentaan

Käyttöaiheet

- MCP-nivelten ongelmassa
- Reumaattiset tulehdukset
- Sormien erotteluun spastisessa kädessä

Ominaisuudet

- Tuen NRX-materiaali on painetta tasaavaa, helposti puhdistettavaa eikä se ime kosteutta
- Metalliydin on helposti muokattavissa käsin
- Voidaan käyttää päivisin tai öisin
- Tuki kuivuu nopeasti, joten sitä voidaan käyttää myös vedessä

Koko- ja tilaustiedot

Koko määrittyy kämmenen leveyden mukaan.

Tuotekoodi	Puoli	Koko	Kämmenen leveys
MR02202100409	vasen	S	55-70 mm
MR02202100509	vasen	M	70-85 mm
MR02202100609	vasen	L	85-100 mm
MR02202200409	oikea	S	55-70 mm
MR02202200509	oikea	M	70-85 mm
MR02202200609	oikea	L	85-100 mm

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset



MR2260



MR2210

MEDIROYAL | MR2260, MR2210

Origo™ Nova ja Beige

Miellyttävä, lastallinen rannetuki

Käyttöaiheet

- Ranteen yliliikkuvuus
- Luunmurtumien- ja leikkauksen jälkeen
- Nivel tulehdus
- Jännitustulehdus
- Rannekanavaoireyhtymä

Ominaisuudet

- Antaa hyvän tuennan ja tasaisen kompression.
- Puuvillapohjaiset ortoosit sisältävät myös nailon- ja elastaanikuituja. Ulkopinnan materiaali on kestävä ja sisäpuoli on pehmeä ja miellyttävä.
- Tuen kyynäröosan ympärillä ei ole reunusnauhaa, mikä tekee tuotteesta elastisemmän ja hyvin mukautuvan leveillekin kyynärvarsille.
- Stabiili rannelasta.
- Rannenivelen kohdalla on dynaaminen sauma, joka antaa lastalle lisätuentaa kuormituksessa.
- Mallissa ei ole kanttinauhaa, mikä tekee rakenteen alaosasta joustavamman.
- Säädettävä peukalolenkki
- Konepesu 40°

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään ranteen ympärysmittaan mukaan.
Oikea ja vasen. Tuen pituus 18 cm.

Origo Nova tuotekoodi	Origo Beige tuotekoodi	Puoli	Koko	Ranteen ympäryys
MR02260100209	MR02210100209	vasen	XXS	12-13 cm
MR02260100309	MR02210100309	vasen	XS	13-14 cm
MR02260100409	MR02210100409	vasen	S	14-16 cm
MR02260100509	MR02210100509	vasen	M	16-18 cm
MR02260100609	MR02210100609	vasen	L	18-20 cm
MR02260100709	MR02210100709	vasen	XL	20-22 cm
MR02260100809	MR02210100809	vasen	XXL	21-23 cm
MR02260200209	MR02210200209	oikea	XXS	12-13 cm
MR02260200309	MR02210200309	oikea	XS	13-14 cm
MR02260200409	MR02210200409	oikea	S	14-16 cm
MR02260200509	MR02210200509	oikea	M	16-18 cm
MR02260200609	MR02210200609	oikea	L	18-20 cm
MR02260200709	MR02210200709	oikea	XL	20-22 cm
MR02260200809	MR02210200809	oikea	XXL	21-23 cm



MEDIROYAL | MR2260P

Origo™ Nova Plus

Rannetuki leveällä proksimaaliosalla

Käyttöaiheet

- Ranteen yliliikkuvuus
- Luunmurtumien- ja leikkauksen jälkeen
- Nivel tulehdus
- Jännitulehdus
- Rannekanavaoireyhtymä

Ominaisuudet

- Origo-rannetuki PLUS-koossa.
- Tuen proksimaaliosa on noin 2-3 cm leveämpi kuin perusmallissa (Origo Nova), niin se sopii paremmin kartiomallisille käsivarsille.
- Mallissa ei ole kanttinauhaa, mikä tekee rakenteen alaosasta joustavamman.

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään ranteen ympärysmittaan mukaan. Oikea ja vasen. Tuen pituus 18 cm.

Tuotekoodi	Puoli	Koko	Ranteen ympäryys	Proksimaalimitta
MR02260P100409	vasen	S	14-16 cm	15-18,5 cm
MR02260P100509	vasen	M	16-18 cm	18-21,5 cm
MR02260P100609	vasen	L	18-20 cm	21-24,5 cm
MR02260P100709	vasen	XL	20-22 cm	24-27,5 cm
MR02260P200409	oikea	S	14-16 cm	15-18,5 cm
MR02260P200509	oikea	M	16-18 cm	18-21,5 cm
MR02260P200609	oikea	L	18-20 cm	21-24,5 cm
MR02260P200709	oikea	XL	20-22 cm	24-27,5 cm

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilikka • Jalka

Lapset



MEDIROYAL | MR2261

Origo™ Nova pitkä

Pitkä, tukeva rannetuki

Käyttöaiheet

- Ranteen yliliikkuvuus
- Luunmurtumien- ja leikkauksen jälkeen
- Nivel tulehdus
- Jännetulehdus
- Rannekanavaoireyhtymä

Ominaisuudet

- Origo Nova pitkä on 3 cm pidempi kuin mallin perusmalli Origo Nova (MR2260, MR2210).
- Tuki on valmistettu kolmesta osasta, jotta se istuu optimaalisesti ranteen ympärille.
- Ranteen nivelen päällä olevassa materiaalissa on puristusalue, joka antaa vahvan tuen yhdessä muovisen lastan kanssa.
- Mallissa ei ole kantinauhaa, mikä tekee rakenteen alaosa joustavamman.
- Lastatasku on valmistettu kaksinkertaisesti kudotusta nailonista, jotta se olisi mahdollisimman kestävä.
- Ranteen ympärille on sijoitettu 5 cm leveä joustava hihna, joka lisää vakautta.
- Säädettävä peukaloremmei.

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään ranteen ympärysmittaan mukaan.

Oikea ja vasen. Tuen pituus 21 cm.

Tuotekoodi	Puoli	Koko	Ranteen ympäryys
MR02261100209	vasen	XXS	12-13 cm
MR02261100309	vasen	XS	13-14 cm
MR02261100409	vasen	S	14-16 cm
MR02261100509	vasen	M	16-18 cm
MR02261100609	vasen	L	18-20 cm
MR02261100709	vasen	XL	20-22 cm
MR02261100809	vasen	XXL	21-23 cm
MR02261200209	oikea	XXS	12-13 cm
MR02261200309	oikea	XS	13-14 cm
MR02261200409	oikea	S	14-16 cm
MR02261200509	oikea	M	16-18 cm
MR02261200609	oikea	L	18-20 cm
MR02261200709	oikea	XL	20-22 cm
MR02261200809	oikea	XXL	21-23 cm

Ranne- ja käsituet
Rannetuet



MR2261
Origo™ Nova pitkä

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset



MR2220



MR2223

MEDIROYAL | MR2220

Ventus™ lyhyt

Hengittävä ja tukeva rannetuki

Käyttöaiheet

- Jännetulehdus
- Ranteen yli liikkuvuus
- Rannekanavaoireyhtymä
- Reumaattiset vaivat
- Luunmurtumien- ja leikkauksen jälkeen

Ominaisuudet

- Ulkopinta likaa hylkivää, kestävää lycraa
- Sisäpinta erittäin ihoystävällistä mikrofleece-materiaalia
- Sisä- ja ulkomateriaalin välissä on hengittävä kerros, joka parantaa ortoosin ilmanvaihtoa
- Ommeltu kolmesta osasta optimaalisen istuvuuden takaamiseksi
- Dynaaminen sauma rannenivelen kohdalla antaa tukilastalle lisätuentaa
- Saatavana myös beigenä MR2223

Koko- ja tilaustiedot

Koko määrittyy ranteen ympärysmittaan mukaan.

Tuotekoodi	Väri	Puoli	Koko	Ranteen ympäryys
MR02220100209	musta	vasen	XXS	12-13 cm
MR02220100309	musta	vasen	XS	13-14 cm
MR02220100409	musta	vasen	S	14-16 cm
MR02220100509	musta	vasen	M	16-18 cm
MR02220100609	musta	vasen	L	18-20 cm
MR02220100709	musta	vasen	XL	20-22 cm
MR02220100809	musta	vasen	XXL	21-23 cm
MR02220200209	musta	oikea	XXS	12-13 cm
MR02220200309	musta	oikea	XS	13-14 cm
MR02220200409	musta	oikea	S	14-16 cm
MR02220200509	musta	oikea	M	16-18 cm
MR02220200609	musta	oikea	L	18-20 cm
MR02220200709	musta	oikea	XL	20-22 cm
MR02220200809	musta	oikea	XXL	21-23 cm



MR2221



MR2224

MEDIROYAL | MR2221

Ventus™ pitkä

Hengittävä ja tukeva rannetuki

Käyttöaiheet

- Jännetulehdus
- Ranteen yliikkuvuus
- Rannekanavaoireyhtymä
- Reumaattiset vaivat
- Luunmurtumien- ja leikkauksen jälkeen

Ominaisuudet

- Ulkopinta likaa hylkivää, kestävää lycraa
- Sisäpinta erittäin ihoystävällistä mikrofleece-materiaalia
- Sisä- ja ulkomateriaalin välissä on hengittävä kerros, joka parantaa ortoosin ilmanvaihtoa
- Ommeltu kolmesta osasta optimaalisen istuvuuden takaamiseksi
- 5 cm leveä elastinen tarranauha antaa ranteelle lisätukea
- Saatava myös beigenä MR2224

Koko- ja tilaustiedot

Koko määrittyy ranteen ympärysmittan mukaan.

Tuotekoodi	Väri	Puoli	Koko	Ranteen ympärys
MR02221100309	musta	vasen	XS	13-14 cm
MR02221100409	musta	vasen	S	14-16 cm
MR02221100509	musta	vasen	M	16-18 cm
MR02221100609	musta	vasen	L	18-20 cm
MR02221100709	musta	vasen	XL	20-22 cm
MR02221100809	musta	vasen	XXL	21-23 cm
MR02221200309	musta	oikea	XS	13-14 cm
MR02221200409	musta	oikea	S	14-16 cm
MR02221200509	musta	oikea	M	16-18 cm
MR02221200609	musta	oikea	L	18-20 cm
MR02221200709	musta	oikea	XL	20-22 cm
MR02221200809	musta	oikea	XXL	21-23 cm

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset

Ranne- ja käsituet

Rannetuet



Käyttöaiheet

- Jännetupittulehdus
- Ranteen yli liikkuvuus
- Rannekanavaoireyhtymä
- Nivelsärky
- Ganglio-kipu
- Kipsauksen jälkihoito

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään ranteen ympärysmittaan mukaan.



Käyttöaiheet

- Ranteen venähdykset
- Ranteen yli liikkuvuus
- Jännetulehdukset
- Nivelsärky
- Postoperatiivinen käyttö
- Kipsauksen jälkihoito

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään ranteen ympärysmittaan mukaan.

ORTHOCARE | 4541

Manucare Stable

Pitkä rannetuki

Ominaisuudet

- Hengittävä ja napakka materiaali
- Irrotettava tukilasta
- Lisäremmi lisää tukevuutta

Tuotekoodi	Puoli	Koko	Ranteenympärys
4541-Left-XS	vasen	XS	14–15 cm
4541-Left-S	vasen	S	15–16,5 cm
4541-Left-M	vasen	M	16,5–18 cm
4541-Left-L	vasen	L	18–19,5 cm
4541-Left-XL	vasen	XL	19,5–21 cm
4541-Left-XXL	vasen	XXL	21–22,5 cm
4541-Right-XS	oikea	XS	14–15 cm
4541-Right-S	oikea	S	15–16,5 cm
4541-Right-M	oikea	M	16,5–18 cm
4541-Right-L	oikea	L	18–19,5 cm
4541-Right-XL	oikea	XL	19,5–21 cm
4541-Right-XXL	oikea	XXL	21–22,5 cm

ORTHOCARE | 4511

Manucare

Miellyttävä rannetuki

Ominaisuudet

- Miellyttävä, kosteutta siirtävä ja hengittävä materiaali
- Anatomisesti muotoiltu muovilasta kämmenpuolella
- Tarrakiinnitys, kiinteä peukalolenkki

Tuotekoodi	Puoli	Koko	Ranteenympärys
4511-Left-XS	vasen	XS	14–15 cm
4511-Left-S	vasen	S	15–16,5 cm
4511-Left-M	vasen	M	16,5–18 cm
4511-Left-L	vasen	L	18–19,5 cm
4511-Left-XL	vasen	XL	19,5–21 cm
4511-Left-XXL	vasen	XXL	21–22,5 cm
4511-Right-XS	oikea	XS	14–15 cm
4511-Right-S	oikea	S	15–16,5 cm
4511-Right-M	oikea	M	16,5–18 cm
4511-Right-L	oikea	L	18–19,5 cm
4511-Right-XL	oikea	XL	19,5–21 cm
4511-Right-XXL	oikea	XXL	21–22,5 cm



Tuotekoodi	Koko	Puoli	Ranteen ympärys
MR02255100409	S	vas	13-16 cm
MR02255100509	M	vas	16-18 cm
MR02255100609	L	vas	18-22 cm
MR02255200409	S	oik	13-16 cm
MR02255200509	M	oik	16-18 cm
MR02255200609	L	oik	18-22 cm

MEDIROYAL | MR2255

NRX® Tendens

Aktiivisen ihmisen rannetuki

Käyttöaiheet

Jännetulehdus, työperäiset rasitusvammat, hiirikäsi, tenniskyynärpää (epikondyliitti)

Ominaisuudet

- Tuki jättää kämmenen vapaaksi, mikä mahdollistaa aktiivisen otteen.
- Ranteen molemmin puolin on kaksi joustavaa teräksistä lastaa, avoimissa taskuissa.
- Lastoja voidaan säätää ja ne tarjoavat hyvän vakauden.
- Tuen dorsaalisen osan sisäpuolella on integroitu NRX® Strap -materiaali, joka yhdessä joustavan rannenauhan kanssa rajoittaa tehokkaasti ranteen dorsaalista ojennusta.
- Etenkin käsityöläisille sekä urheilijoille, jotka käyttävät lajissaan mailaa.

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään ranteen ympärysmittaan mukaan. Oikea ja vasen.



MEDIROYAL | UNI801, UNI802

Universal-rannetuki lyhyt ja pitkä

Käyttöaiheet

Jännetulehdus, rannekanavaoireyhtymä, ranteen instabiliteetti, nivelrikko, reuma

Ominaisuudet

- Sopivat sekä vasemmalle että oikealle kädelle.
- Tuet ovat yleiskokoisia, joten ne kattavat yleisimmät koot.
- Muotoilu on epäsymmetrinen ja siinä yhdistyvät NRX-materiaali, vakaa vaahtomuovilaminaatti ja lycra-hiha, joka helpottaa käyttöä.
- Kahden lastataskun ansiosta lastan vaihtaminen oikealle tai vasemmalle kädelle on helppoa.
- Voidaan käyttää NRX-hihnan pohjana.

Koko- ja tilaustiedot

Koko universaali, määritetään ranteen ympärysmittaan mukaan.

Tuotekoodi	Kuvaus	Tuen pituus	Ranteen ympärys
UNI801	Universal-rannetuki lyhyt	20 cm	12-24 cm
UNI802	Universal-rannetuki pitkä	24 cm	12-24 cm

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset



MEDIROYAL | SRX824

SRX® Universal -rannetuki

Yhden koon kevyt rannetuki

Käyttöaiheet

- Ranteen venähdykset
- Ranteen instabiliteetti
- Tenniskyynärpää (epikondyliitti)

Ominaisuudet

- Sopii molempiin käsiin
- Helppo säätää itselle sopivaksi tarrakiinnityksen ansiosta
- Tarjoaa ranteelle hyvän kompression
- Ulkopinnan SRX- ja sisäpinnan Neptune-materiaalit lämmittävät ranneniveltä, mutta siirtävät kosteutta pois iholta

Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi	Puoli	Koko	Ranteen ympärys
SRX824	puolieroton	1 koko	12–20 cm



MEDIROYAL | SRX825

SRX® Universal -peukalorannetuki

Yhden koon kevyt rannetuki peukalo-osalla

Käyttöaiheet

- Ranteen tulehdukset
- Ranteen ylikuormitus
- Venähdykset
- Lievä ranteen tai peukalon instabiliteetti

Ominaisuudet

- Sopii molempiin käsiin
- Helppo säätää itselle sopivaksi tarrakiinnityksen ansiosta
- Tarjoaa ranteelle hyvän kompression
- Ulkopinnan SRX- ja sisäpinnan Neptune-materiaalit lämmittävät ranneniveltä, mutta siirtävät kosteutta pois iholta

Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi	Puoli	Koko	Ranteen ympärys
SRX825	puolieroton	1 koko	12–20 cm



Tuotekoodi	Puoli	Koko	Ranteen ympärys
MP1122L-S	vas	S	13–16 cm
MP1122L-M	vas	M	16–18 cm
MP1122L-L	vas	L	18–20 cm
MP1122L-XL	vas	XL	20–23 cm
MP1122R-S	oik	S	13–16 cm
MP1122R-M	oik	M	16–18 cm
MP1122R-L	oik	L	18–20 cm
MP1122R-XL	oik	XL	20–23 cm



Tuotekoodi	Puoli	Koko	Ranteen ympärys
MP1117L-S	vas	S	13–16 cm
MP1117L-M	vas	M	16–18 cm
MP1117L-L	vas	L	18–20 cm
MP1117L-XL	vas	XL	20–23 cm
MP1117R-S	oik	S	13–16 cm
MP1117R-M	oik	M	16–18 cm
MP1117R-L	oik	L	18–20 cm
MP1117R-XL	oik	XL	20–23 cm

ORTHOSERVICE | MP1122

PolFIT 22

Pitkä rannetuki irrotettavalla peukalotukiosalla

Käyttöaiheet

- Peukalomurtuma
- Ranteen nivelsidevammat
- Veneluun murtuma

Ominaisuudet

- Kokonaan aukeava malli helpottaa pukemista
- Neljä remmiä mahdollistaa yksilöllisen säädön
- Vahva lasta dorsaalipuolella
- Täysin hengittävä 3D-materiaali
- Muotoiltavat, anatoimisesti muotoillut, alumiiniset tukilastat ranteen kämmenpuolella ja peukalossa

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään ranteen ympärysmittaan mukaan. Erikseen oikea ja vasen puoli.

ORTHOSERVICE | MP1117

PolFIT 17

Erittäin tukeva peukalo-rannetuki

Käyttöaiheet

- Ranteen venähdykset
- Ranteen jännetulehdukset
- Ranteen artriitti ja artroosi
- Rannemurtuman jälkihoito kipsihoidon jälkeen
- Peukalon nivelten artroosi
- Peukalon MCP-vammat

Ominaisuudet

- Lastat poistettavissa ja muotoiltavissa käsin
- Hengittävä kangasmateriaali
- Dorsaalipuolella muoviset lastat antamassa lisätukea
- Tarranauhakiinnitys soljilla
- Tuen pituus 20 cm

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään ranteen ympärysmittaan mukaan. Erikseen oikea ja vasen puoli.

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset



MEDIROYAL | MR2272

Ventus™ Lace-Up -peukalorannetuki

Peukalorannetuki kiristystä helpottavalla nyöriyksellä

Käyttöaiheet

- Peukalon ja ranteen instabiliteetti
- DeQuervain
- Tulehdukselliset sairaudet tai tendiniitti

Ominaisuudet

- Nyörikiinnitys helpottaa kiristystä
- Kiinnitystarrat voidaan kiinnittää mihin kohtaan tukea tahansa
- Hengittävä Ventus-materiaali
- Uusi, painetta vähentävä lasta kämmenpuolella
- Muotoiltava peukalo-osa
- Rakenteeltaan umpinainen, puetaan kuin hanska

Koko- ja tilaustiedot

Koko määrittyy ranteen ympäryksmitalla.

Erikseen oikea ja vasen puoli.

Tuotekoodi	Puoli	Koko	Ranteen ympärys
MR02272200309	oikea	XS	13-14 cm
MR02272200409	oikea	S	14-16 cm
MR02272200509	oikea	M	16-18 cm
MR02272200609	oikea	L	18-20 cm
MR02272200709	oikea	XL	20-22 cm
MR02272200809	oikea	XXL	21-23 cm
MR02272100309	vasen	XS	13-14 cm
MR02272100409	vasen	S	14-16 cm
MR02272100509	vasen	M	16-18 cm
MR02272100609	vasen	L	18-20 cm
MR02272100709	vasen	XL	20-22 cm
MR02272100809	vasen	XXL	21-23 cm



SPORLASTIC | 07645

Manu-Hit® Pollex

Nykyaikainen laadukas peukalorannetuki

Käyttöaiheet

- Konservatiivinen tai postoperatiivinen hoito
- Karpaaliluiden murtumat
- Carpuksen radiaalisten osien kulumat
- Peukalon tyven kuluma, venähdys, ucl-ligamentin venähdys
- Veneluun vammat
- Rannekanava oireyhtymä
- Ranteen radiaalinen yliliikkuvuus
- Periferinen radius hermon paralyysi, johon liittyy riippukäsi ja peukalon huono abduktio

Ominaisuudet

- Peukalon ja ranteen hyvä stabilointi ja osittainen immobilisointi
- Peukolaotteen säilyttäminen
- Liikkeen ja rasituksen vähentäminen karpaaliluissa, nivelkapseleissa ja nivelsiteissä
- Anatomisesti muotoiltu rakenne takaa hyvän tuen ja istuvuuden
- Metalliset muotoillut tukilastat volaarisesti, dorsaalisesti ja peukalon ympärillä. Helppo muotoilla yksilölliseen muotoon.
- Väri harmaa, saatavana myös mustana

Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi	Puoli	Koko	Ranteen ympäryys
07645-1-9188-XS	vasen	XS	< 15 cm
07645-1-9188-S	vasen	S	15-17 cm
07645-1-9188-M	vasen	M	17-19 cm
07645-1-9188-L	vasen	L	19-22 cm
07645-1-9188-XL	vasen	XL	> 22 cm
07645-2-9188-XS	oikea	XS	< 15 cm
07645-2-9188-S	oikea	S	15-17 cm
07645-2-9188-M	oikea	M	17-19 cm
07645-2-9188-L	oikea	L	19-22 cm
07645-2-9188-XL	oikea	XL	> 22 cm

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilikka • Jalka

Lapset



MEDIROYAL | MR2222

Ventus™-peukalorannetuki

Muotoonommeltu peukalorannetuki

Käyttöaiheet

- Ranteen ja peukalon ylliliikkuvuus
- Luunmurtumien ja leikkauksien jälkeen
- Jännetulehdus
- Reumaattiset vaivat (esim. niveltulehdus)

Ominaisuudet

- Muotoon ommeltu
- Rannenivelen kohdalla dynaaminen sauma, joka antaa lastalle lisätuentaa kuormituksessa
- Kaksinkertainen nailonkangas takaa lastataskujen kestävyys
- Peukalotuessa joustava teräslasta, rannelasta vakiomallinen

Koko- ja tilaustiedot

Koko määrittyy ranteen ympärysmittalla.

Tuotekoodi	Puoli	Koko	Ranteen ympäryys
MR02222100309	vasen	XS	13-14 cm
MR02222100409	vasen	S	14-16 cm
MR02222100509	vasen	M	16-18 cm
MR02222100609	vasen	L	18-20 cm
MR02222100709	vasen	XL	20-22 cm
MR02222100809	vasen	XXL	21-23 cm
MR02222200309	oikea	XS	13-14 cm
MR02222200409	oikea	S	14-16 cm
MR02222200509	oikea	M	16-18 cm
MR02222200609	oikea	L	18-20 cm
MR02222200709	oikea	XL	20-22 cm
MR02222200809	oikea	XXL	21-23 cm



ORTHOCARE | 4521

Manucare Plus

Anatomisesti muotoiltu peukalorannetuki

Käyttöaiheet

- MCP-nivelen ongelmat
- CMC-nivelen kuluma
- DeQuervain
- Rannekanavaoireyhtymän ja DeQuervainin yhdistelmä

Ominaisuudet

- Stabiloi rannetta ja peukaloa
- Erittäin mukava ja helppokäyttöinen
- Anatominen muotoilu
- Helppo kiristää sopivaksi usean remmin ansiosta
- Muotoiltava lasta kämmenpuolella

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään ranteen ympärysmittaan mukaan.

Tuotekoodi	Puoli	Koko	Ranteen ympärys
4521-Right-XS	oikea	XS	14–15 cm
4521-Right-S	oikea	S	15–16,5 cm
4521-Right-M	oikea	M	16,5–18 cm
4521-Right-L	oikea	L	18–19,5 cm
4521-Right-XL	oikea	XL	19,5–21 cm
4521-Right-XXL	oikea	XXL	21–22,5 cm
4521-Left-XS	vasen	XS	14–15 cm
4521-Left-S	vasen	S	15–16,5 cm
4521-Left-M	vasen	M	16,5–18 cm
4521-Left-L	vasen	L	18–19,5 cm
4521-Left-XL	vasen	XL	19,5–21 cm
4521-Left-XXL	vasen	XXL	21–22,5 cm

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset

Ranne- ja käsituet

Peukalotuet



Käyttöaiheet

- Konservatiivinen tai postoperatiivinen hoito
- Peukalon jänne- ja ligamenttivammat MCP ja CMC -niveltä alueella (esim. "hiihtäjän peukalo")
- Kuluma radiuksen distaalipäässä ja MCP-nivelessä
- Kohtalainen tai selvä rhizarthroosi
- De Quervain syndrooma
- Peukalon yliikkuvuus
- Murtuman hoito



Käyttöaiheet

- Peukalon venähdykset
- Postoperatiivinen hoito
- Peukalon tyvinivelen artroosi
- Peukalon tendiniitti
- De Quervainin tauti
- Bennetin murtuman hoito

SPORLASTIC | 07610

Rhizo-Hit®

Miellyttävä tukeva peukalotuki peukalon MCP- ja CMC-niveltä tuentaa

Ominaisuudet

- Tukee peukalon MCP ja CMC-niveliä ja rannetta
- Mahdollistaa peukalo-otteen
- Tuessa muotoiltava alumiinilasta
- Puolieroton

Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi	Väri	Koko	Ranteen ympärys
07610-0-9188-XS	harmaa	XS	< 15 cm
07610-0-9188-S	harmaa	S	15-17 cm
07610-0-9188-M	harmaa	M	17-19 cm
07610-0-9188-L	harmaa	L	> 19 cm
07610-0-9003-XS	musta	XS	< 15 cm
07610-0-9003-S	musta	S	15-17 cm
07610-0-9003-M	musta	M	17-19 cm
07610-0-9003-L	musta	L	> 19 cm

ORTHOSERVICE | M5006

Daumfix

Peukalo-ortoosi polypropyleenistä

Ominaisuudet

- Valmistettu polypropyleenistä
- Elastinen tarranauhakiinnitys
- Antibakteerinen sisäsuika ortoosin alla käytettäväksi

Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi	Puoli	Koko	Ranteen ympärys
M5006VBL-S	vas	S	13-17 cm
M5006VBL-M	vas	M	17-19 cm
M5006VBL-L	vas	L	19-23 cm
M5006VBL-XL	vas	XL	23-28 cm
M5006VBR-S	oik	S	13-17 cm
M5006VBR-M	oik	M	17-19 cm
M5006VBR-L	oik	L	19-23 cm
M5006VBR-XL	oik	XL	23-28 cm



Tuotekoodi	Puoli	Koko	Ranteen ympärys
MR02338200309	oik	XS	13-14 cm
MR02338200409	oik	S	14-16 cm
MR02338200509	oik	M	16-18 cm
MR02338200609	oik	L	18-20 cm
MR02338200709	oik	XL	20-22 cm
MR02338100309	vas	XS	13-14 cm
MR02338100409	vas	S	14-16 cm
MR02338100509	vas	M	16-18 cm
MR02338100609	vas	L	18-20 cm
MR02338100709	vas	XL	20-22 cm



Tuotekoodi	Puoli	Koko	Ranteen ympärys
MR02337200309	oik	XS	13-14 cm
MR02337200409	oik	S	14-16 cm
MR02337200509	oik	M	16-18 cm
MR02337200609	oik	L	18-20 cm
MR02337200709	oik	XL	20-22 cm
MR02337100309	vas	XS	13-14 cm
MR02337100409	vas	S	14-16 cm
MR02337100509	vas	M	16-18 cm
MR02337100609	vas	L	18-20 cm
MR02337100709	vas	XL	20-22 cm

MEDIROYAL | MR2338

Proxi® Plus

Ihonmyötäinen moderni peukalotuki

Käyttöaiheet

- Peukalon tyvi- ja keskinivelen yli liikkuvuus (CMC- ja MCP-nivelet)
- Peukalon kuluma
- Peukalon tyvi- ja keskinivelen tulehdukset
- Vamman jälkeinen tuenta kuntoutukseen työhön palaamisen yhteydessä

Ominaisuudet

- Miellyttävä ja joustava tuki antaa lisätukea peukaloa ympäröiviin rakenteisiin
- Vähentää rasitusta MCP- ja CMC-nivelissä
- 1,6 mm paksu lämpömuovivahvike, jota voidaan muokata ilman kuumentamista
- Lepoasennossa peukalo pysyy neutraaliasennossa rasittamatta niveliä ja lihaksia
- Tukea voidaan leikata yksilöllisten tarpeiden mukaan

Koko- ja tilaustiedot

Koko määrittyy ranteen ympäryksmitalla.

MEDIROYAL | MR2337

Proxi® Light

Ihonmyötäinen moderni peukalotuki

Käyttöaiheet

- Peukalon tyvi- ja keskinivelen yli liikkuvuus (CMC- ja MCP-nivelet)
- Peukalon kuluma
- Peukalon tyvi- ja keskinivelen tulehdukset
- Lievät peukalon venähdykset
- Reumaattiset tulehdukset

Ominaisuudet

- Miellyttävä ja hengittävä Neptune-materiaali
- Tukee CMC- ja MCP-niveliä ilman lastaa
- Mukautuu käden muodon mukaiseksi muutaman tunnin käytön jälkeen
- Ranteen ympäri menevän remmin voi kiinnittää mihin kohtaan tukea tahansa

Koko- ja tilaustiedot

Koko määrittyy ranteen ympäryksmitalla.

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset

Ranne- ja käsituet

Peukalotuet



Tuotekoodi	Puoli	Koko	Ranteen ympärys
MR02333100309	vas	XS	13-14 cm
MR02333100409	vas	S	14-16 cm
MR02333100509	vas	M	16-18 cm
MR02333100609	vas	L	18-20 cm
MR02333100709	vas	XL	20-22 cm
MR02333200309	oik	XS	13-14 cm
MR02333200409	oik	S	14-16 cm
MR02333200509	oik	M	16-18 cm
MR02333200609	oik	L	18-20 cm
MR02333200709	oik	XL	20-22 cm



Tuotekoodi	Puoli	Koko	Ranteen ympärys
MR02336200309	oik	XS	13-14 cm
MR02336200409	oik	S	14-16 cm
MR02336200509	oik	M	16-18 cm
MR02336200609	oik	L	18-20 cm
MR02336200709	oik	XL	20-22 cm
MR02336100309	vas	XS	13-14 cm
MR02336100409	vas	S	14-16 cm
MR02336100509	vas	M	16-18 cm
MR02336100609	vas	L	18-20 cm
MR02336100709	vas	XL	20-22 cm

MEDIROYAL | MR2333

Proxi® Ultra

Käyttöaiheet

CMC- ja MCP-nivelen ongelmat, pre- ja postoperatiivisesti, trauman jälkeen, reuma, nivelrikko, tulehdukset

Ominaisuudet

- Yhdistää vakauden, korkean mukavuuden ja toiminnallisuuden.
- Ortoosi on valmistettu Neptune™-kankaasta, joka on hengittävää ja nopeasti kuivuvaa.
- Tuen termoplastinen osa on valmistettu 2,2 mm:n molekyylimuunnellusta muovista, joka on erittäin vakaa pystysuunnassa mutta joustava vaakasuunnassa.
- Termoplast on muokattavissa käsin ilman kuumaa ilmaa tai vettä.
- Termoplast-materiaali ulottuu CMC-nivelen yli ja peittää Trapeziumin, mikä lisää vakautta ja tukea.
- Mallissa ei tarvita reunusnauhoja, joten sitä on helppo sovittaa ja säätää saksilla. Vältä leikkaamasta termoplastisen vahvistuksen ja tarranauhojen yli. Kaikki muut alueet voidaan leikata ongelmitta.

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään ranteen ympärysmittaan mukaan. Oikea sekä vasen.

MEDIROYAL | MR2336

Proxi® UCL

Peukalotuki ulnar collateral -nivelsiteen hoitoon

Käyttöaiheet

- Ulnar collateral -ligamentin vammat
- Radial collateral -ligamentin vammat
- Peukalon MCP-nivelen venähdykset
- Peukalon epävakaus

Ominaisuudet

- Lämpömuovin tuoma vakaus ja tekstiilin tuoma mukavuus
- 2,2 mm paksua lämpömuovivahviketta voidaan muokata ilman lämpöä
- Hieman normaalia pidempi peukalo-osa
- Tukea voidaan leikata yksilöllisesti sopivaksi
- Ranneremmin tarra kiinnittyy mihin kohtaan tukea tahansa
- Hengittävä Neptune-materiaali lisää käyttömukavuutta

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetty ranteen ympärysmittalla.



Tuotekoodi	Puoli	Koko	Ranteen ympärys
MR02339200309	oik	XS	13-14 cm
MR02339200409	oik	S	14-16 cm
MR02339200509	oik	M	16-18 cm
MR02339200609	oik	L	18-20 cm
MR02339200709	oik	XL	20-22 cm
MR02339100309	vas	XS	13-14 cm
MR02339100409	vas	S	14-16 cm
MR02339100509	vas	M	16-18 cm
MR02339100609	vas	L	18-20 cm
MR02339100709	vas	XL	20-22 cm



Tuotekoodi	Puoli	Koko	Ranteen ympärys
MR02381200309	oik	XS	13-14 cm
MR02381200409	oik	S	14-16 cm
MR02381200509	oik	M	16-18 cm
MR02381200609	oik	L	18-20 cm
MR02381200709	oik	XL	20-22 cm
MR02381100309	vas	XS	13-14 cm
MR02381100409	vas	S	14-16 cm
MR02381100509	vas	M	16-18 cm
MR02381100609	vas	L	18-20 cm
MR02381100709	vas	XL	20-22 cm

MEDIROYAL | MR2339

Proxi® DeQuervain

Peukalotuki ulnar collateral -nivelsiteen hoitoon

Käyttöaiheet

- DeQuervain (peukalon jännetupin tulehdus)
- Jännetulehdukset
- CMC-operaation jälkeen

Ominaisuudet

- Jännealueen kohta mahdollista leikata avoimeksi paineen vähentämiseksi
- Lämpömuovin tuoma vakaus ja tekstiilin tuoma mukavuus
- 2,2 mm paksua lämpömuovivahviketta voidaan muokata ilman lämpöä
- Tukea voidaan leikata yksilöllisesti sopivaksi
- Ranneremmin tarra kiinnittyy mihin kohtaan tukea tahansa
- Hengittävä Neptune-materiaali lisää käyttömukavuutta

Koko- ja tilaustiedot

Koko määrittyy ranteen ympärysmittalla.

MEDIROYAL | MR2381

Proxi® CMC

Peukalotuki peukalo tyvinivelen tuentaan

Käyttöaiheet

- Peukalon tyvinivelen ongelmat ja kiputilat
- Peukalon tyvinivelen nivelrikko

Ominaisuudet

- Esimuotoiltu termoplastinen volaarivahvike lisää tilaa CMC:n nivelraossa
- Puolielastinen tarranauha antaa peukalon tyvelle tukea ja avustaa peukalon abduktiota
- Volaarivahviketta voidaan muotoilla kuuman veden tai kuumailmapuhaltimen avulla
- Tukea voidaan leikata yksilöllisesti sopivaksi
- Hengittävä Neptune-materiaali lisää käyttömukavuutta

Koko- ja tilaustiedot

Koko määrittyy ranteen ympärysmittalla.

Erikseen oikea ja vasen puoli.

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilikka • Jalka

Lapset

Ranne- ja käsituet

Peukalotuet



Tuotekoodi	Puoli	Koko	Ranteen ympärys
4531-Right-XS	oik	XS	13–14 cm
4531-Right-S	oik	S	14–16 cm
4531-Right-M	oik	M	16–18 cm
4531-Right-L	oik	L	18–20 cm
4531-Right-XL	oik	XL	20–22 cm
4531-Left-XS	vas	XS	13–14 cm
4531-Left-S	vas	S	14–16 cm
4531-Left-M	vas	M	16–18 cm
4531-Left-L	vas	L	18–20 cm
4531-Left-XL	vas	XL	20–22 cm



Koko- ja tilaustiedot Koko määritetään ranteen ympärysmittan mukaan. Oikea sekä vasen.

ORTHOCARE | 4531

Thernarcare

Peukalotuki

Muovilasta ja kompressiota antava materiaali tukevat peukaloa ja sen ympärillä olevia kudoksia.

Käyttöaiheet

- Peukalon tyvinivelen kuluma ja instabiliteetti
- Posttraumaattisesti
- Reumatologiset sairaudet
- Kipu ja yllirasitusvammat

Ominaisuudet

- Tukee peukalon MCP- ja PIP-niveliä sekä kevyesti rannetta
- Materiaali on leikattu viistoon parhaan istuvuuden ja elastisuuden saavuttamiseksi
- Peukalon ympärys on avoin ja säädettävissä

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään ranteen ympärysmittan mukaan. Erikseen oikea ja vasen puoli.

MEDIROYAL | CGO208

NRX® C-GO

Pehmeä ja elastinen tuki peukalon keski- ja tyvinivelen vaivoihin

Käyttöaiheet

Peukalon nivelrikko (artroosi), tyvi- ja keskinivelen (CMC-nivel ja MCP-nivel) ongelmat ja kiputilat, peukalon alueen tulehdukset ja venähdykset, nivelreuma, epävakaa peukalo, peukalon ja ranteen yllirasitus

Ominaisuudet

- Pehmeä ja elastinen peukalo-ortoosi ilman kovia vahvikkeita.
- Tukee peukaloa neutraaliin lepoasentoon.
- Erillinen neptune- materiaalista valmistettu tarranauha, joka antaa lisätukea tyvinivelelle ja keskinivelelle.
- Ortoosin yksilöllinen muotoilu on tarvittaessa mahdollista saksien avulla. Älä leikkaa saumojen päältä.
- Antaa myös kevyttä tukea rannenivelen alueelle.

Tuotekoodi	Koko	Puoli	Ranteen ympärys
CGO208-L1	XS	vasen	13–15 cm
CGO208-L2	S/M	vasen	15–17 cm
CGO208-L3	L/XL	vasen	17–20 cm
CGO208-L4	XXL	vasen	20–23 cm
CGO208-R1	XS	oikea	13–15 cm
CGO208-R2	S/M	oikea	15–17 cm
CGO208-R3	L/XL	oikea	17–20 cm
CGO208-R4	XXL	oikea	20–23 cm



Tuotekoodi	Koko	Puoli	Ranteen ympärys
NRX202R1	1	oikea	13–18 cm
NRX202R2	2	oikea	17–23 cm
NRX202L1	1	vasen	13–18 cm
NRX202L2	2	vasen	17–23 cm



MEDIROYAL | NRX202

NRX® 202

Kevyt ja pehmeä peukalotuki töihin ja harrastuksiin

Käyttöaiheet

- Peukalon yli liikuvuus
- Työperäinen rasitus
- Peukalon tyvinivelen tulehdus
- Peukalon artroosi

Ominaisuudet

- Erittäin ihoystävällinen ja hengittävä NRX-materiaali
- Antaa lisätukea peukaloa ympäröiville rakenteille
- Ohjaa peukaloa kohti neutraaliasentoa
- Antaa myös ranteelle kevyttä tukea kompression avulla

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään ranteen ympärysmittaan mukaan. Erikseen oikea ja vasen puoli.

SPORLASTIC | 07603

Rhizo-Ring® Soft

Peukalotuki

Käyttöaiheet

- Tyvinivelen kuluma tai sijoiltaanmeno

Ominaisuudet

- Tukee peukaloa toiminnalliseen asentoon pois adduktio-virheasennosta
- Peukalon vapaa liikkuvuus säilyy
- Mahdollistaa tarttumaoiteen säilymisen
- Pakettiin kuuluu vaihtohihna

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetty ranteen ympärysmittalla. Erikseen oikea ja vasen puoli.

Tuotekoodi	Koko	Puoli	Ranteen ympärys
3507603-2-9188-S	S	oikea	< 17 cm
3507603-2-9188-M	M	oikea	17–19 cm
3507603-2-9188-L	L	oikea	> 19 cm
3507603-1-9188-S	S	vasen	< 17 cm
3507603-1-9188-M	M	vasen	17–19 cm
3507603-1-9188-L	L	vasen	> 19 cm

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilikka • Jalka

Lapset



Koko- ja tilaustiedot

Koko määrittyy sormen pituuden ja leveyden mukaan. Pituus mitataan sormi ojennettuna tyvinivelestä kärkiniveleen.



Koko- ja tilaustiedot

Koko määrittyy sormen pituuden ja paksuuden mukaan. Pituus mitataan sormi ojennettuna sormen tyvestä (MCP-nivel) kärkiniveleen (DIP-nivel).

MEDIROYAL | 501

Sormen ekstensiojousi pitkä

Sormen keskiniveltä ojentava tuki

Käyttöaiheet

- Sormien jänneiden fleksiokontraktuurat
- Sormien keskinivelen (PIP) jäykkyys

Ominaisuudet

- Antaa dynaamisen tuen PIP-nivelelle
- Jättää DIP-nivelen täysin vapaaksi
- Sormen yläpuolinen tyyny keventää sormeen kohdistuvaa painetta
- Jousi on säädettävissä yksilöllisesti
- Jousen voima on n. 2,3 N, kun sormi on koukistettu 15°

Tuotekoodi	Puoli	Koko	Sormen pituus	Sormen leveys
501AA	puolieroton	AA	5,7 cm	2,2 cm
501A	puolieroton	A	7 cm	2,2 cm
501B	puolieroton	B	7,6 cm	2,5 cm
501C	puolieroton	C	8,9 cm	2,9 cm
501D	puolieroton	D	10,2 cm	2,9 cm

MEDIROYAL | 504

Sormen ekstensiojousi lyhyt

Sormijousi

Käyttöaiheet

- Sormien jänneiden fleksiokontraktuurat
- Sormien keskinivelen (PIP) jäykkyys

Ominaisuudet

- Ei vaikuta MCP-nivelen liikkumiseen
- Voidaan käyttää myös DIP-nivelen tukemiseen
- Voidaan säätää yksilöllisesti
- Jousen voima noin 2,3 N 15 asteen koukistuksessa

Tuotekoodi	Puoli	Koko	Sormen pituus	Sormen leveys
504AA	puolieroton	AA	4,4 cm	2,2 cm
504A	puolieroton	A	4,8 cm	2,2 cm
504B	puolieroton	B	5,1 cm	2,5 cm
504C	puolieroton	C	5,7 cm	2,9 cm
504D	puolieroton	D	6,7 cm	2,9 cm



Koko- ja tilaustiedot
Koko S-L, puolieroton.

Tuote-koodi	Koko	Tuen pituus	Tuen leveys
MR02705-S	S	155 mm	45 mm
MR02705-M	M	175 mm	45 mm
MR02705-L	L	195 mm	48 mm



Tuotekoodi	Koko	Pituusmitta
MR02702000409	S	60 mm
MR02702000509	M	70 mm
MR02702000609	L	75 mm

MEDIROYAL | MR2705

Proxi® DC Splint

Käyttöaiheet

Dupuytrenin kontraktuura, sormien kontraktuurat

Ominaisuudet

- Suunniteltu erityisesti sormien konservatiiviseen immobilisointiin esimerkiksi leikkauksen jälkeen.
- Sormilevyssä on valmistettu alumiinista, ja sen distaaliosassa on muovinen joustava alue.
- Kisko on laminoitu CR-vahtomuovilla, jonka ulkopinnalla on tarranauha ja sisäpinnalla Neptune™-pehmuste. Tämän ansiosta kisko on paineita keventävä ja sitä voidaan muokata yksilöllisesti sekä lyhentää tarvittaessa.
- Kaksipuolinen ja saatavana kolmessa koossa. Kisko tukee kahta sormea yhdessä ja sitä voidaan käyttää sormien 2-5 hoitoon.
- Kiskon kiinnitysnauha on valmistettu NRX® Double Soft Elastic -materiaalista, joten se on helppo leikata ja muotoilla yksilöllisesti. NRX® Double Soft Elastic -materiaalia voidaan myös venyttää paikallisesti, jotta se sopii käyttäjälle paremmin.

MEDIROYAL | MR2702

Proxi® Trigger Finger

Uudelleenmuotoiltava sormituki Trigger fingerin hoitoon

Käyttöaiheet

Trigger finger eli napsusormi

Ominaisuudet

- Lämpömuovattava materiaali mahdollistaa käytön myös peukalossa.
- Pystytään muotoilemaan jonkin verran myös ilman lämmitystä.
- Hengittävä materiaali.
- Vähentää jännitteen kuormitusta ja pitää sen jännetupittuneissa.
- Tarra kiinnittyy mihin kohtaan tukea tahansa.
- Helppo pukea muotoilunsa ansiosta.

Koko- ja tilaustiedot

Koko määrittyy pituusmitalla 5 mm PIP-nivelen alapuolelta kämmenen pohjaan.

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilikka • Jalka

Lapset



Koko- ja tilaustiedot

Koko määräytyy sormen ympärysmittan ja pituuden mukaan. Ota ympärysmitta DIP- tai PIP-nivelestä sen mukaan, kumpaa niveltä pitää tukea.

MEDIROYAL | MR2701

Proxi® DIP/PIP

Helposti muokattava sormituki DIP- tai PIP-nivelen tukemiseen

Käyttöaiheet

- DIP- tai PIP-nivelen tuenta trauman jälkeen
- Triggerfinger eli napsusormi
- Sormen instabiliteetti
- Nivelen turvotus
- Sorminivelen sijoiltaanmeno
- Reumaattisen tulehdusprosessin jälkihoito

Ominaisuudet

- Voidaan tukea joko DIP- tai PIP-niveltä
- Helppo muotoilla ilman lämmittämistä
- Hengittävä ja ihoystävällinen materiaali
- Tarra tarttuu mihin kohtaan tukea tahansa
- Ohut rakenne
- Helppo pukea ja riisua

Tuotekoodi	Koko	Ympärys	Pituus
MR02701000109	1	40-55 mm	30 mm
MR02701000209	2	50-65 mm	38 mm



Koko- ja tilaustiedot

Koko määräytyy sormen ympärysmittan mukaan. Ympärysmitta tulee ottaa siitä kohdasta, jossa tukea tullaan käyttämään (DIP- tai PIP-nivelen kohdalta).

MEDIROYAL | 2008, 2009

Multi Finger Splint

Monikäyttöinen sormilasta erilaisiin sormivammoihin

Käyttöaiheet

Swan neck deformity (joutsenkaulavirheasento), Mallet finger, Boutonniere deformity (napinläpivirheasento), Trigger finger/thumb, sormen ulnaari- tai radiaalideviaatio, nivelsidevammat, nivelen yli liikkuvuus

Ominaisuudet

- Monipuoliset käyttökohteet
- Pukemistyyllillä voidaan tukea haluttua suuntaa
- Valmistettu nylonista ja polypropyleenistä
- Materiaali jäykkää, mutta joustavaa
- Muokattavissa kuumailmapuhaltimella
- Toinen pää hieman leveämpi istuvuutta parantaen. Leveämpi pää merkattu + -merkillä
- Tuen voi pestä saippualla ja vedellä tai desinfiointiaineella
- Saatavilla yksittäispakattuna (2008-koko) tai kolmen kappaleen pakkauksessa (2008-koko/03). Tilattavissa myös valikoimapakkaus, jossa on yksi jokaista kokoa (2009).

Koko	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ympärys DIP- ja PIP-nivel, mm	42-43	44-46	46-50	50-55	55-58	58-60	60-62	62-65	65-68	67-71	71-74	74-77	77-81	81-84
Tuen pituus, mm	26	29	31	33	33	35	39	39	40	43	43	45	45	45



Koko	Ympärys	Tuen pituus
1	42-43 mm	30 mm
2	44-46 mm	31,5 mm
3	46-50 mm	34 mm
4	50-55 mm	36 mm
5	55-58 mm	37 mm
6	58-60 mm	40,3 mm
7	60-62 mm	45 mm
8	62-65 mm	44 mm
9	65-68 mm	47,5 mm
10	68-71 mm	51 mm
11	71-74 mm	51,5 mm
12	74-77 mm	52 mm
13	77-81 mm	52,5 mm
14	81-84 mm	53 mm



Koko- ja tilaustiedot

Oikean koon määrittäminen onnistuu helpoiten sovitusarjan 1008-S avulla. Sovitusarjassa on 14 kokoa sekä sormusmitta.

MEDIROYAL | 2015, 2016

Exto®-15

Sormituki DIP- tai PIP-nivelen yliojentumisen tai yliliikkuvuuden hoitoon

Käyttöaiheet

DIP- ja PIP-sorminivelen yliojentumiselta ja yliliikkuvuudelta suojaaminen, sorminivelten radiaalinen tai ulnaarinen virheasento

Ominaisuudet

- Tuen 15 asteen koukistuskulma pyrkii estämään sorminivelten yliojentumisen tai yliliikkuvuuden.
- Tukee myös sorminivelen radiaalista tai ulnaarista virheasentoa
- Polymeerimateriaali tekee tuesta lämpömuovattavan
- Saatavilla yksittäispakattuna (2015-koko) tai kolmen kappaleen pakkauksessa (20158-koko/03). Tilattavissa myös valikoimapakkaus, jossa on yksi jokaista kokoa (2016).



Koko- ja tilaustiedot

Koko määrittyy sormen ympärysmittaan mukaan. Ympärysmitta tulee ottaa siitä kohdasta, jossa tukea tullaan käyttämään (DIP- tai PIP-nivelen kohdalta).

MEDIROYAL | 1008

Oval-8

Kätevä ja tehokas sormen pikkunivelen tuki

Käyttöaiheet

Sormen nivelen immobilisointi, joutsenkaula- ja napinläpi-virheasennon korjaamiseen, Malletfinger-jänneaurion tukemiseen, nivelen sivuttaissuunteiseen tukemiseen, Trigger finger -tuentaan

Ominaisuudet

- Yksinkertainen, huomaamaton 3-pistetuki
- Muotoiltu muovituki, jossa pyöristetyt reunat
- Avonainen malli pitää ihon kuivana ja puhtaana
- Voi käyttää vedessä (uidessa, suihkussa, käsiä pestessä)
- Helppo ja nopea pukea päälle
- Tukea on helppo muotoilla lämpöpuhaltimella
- Puolieroton

Tuotekoodi	Kuvaus	Koko
1008-koko	Yksittäinen Oval-8 -tuki	2-15
1008-koko-5	Täyttöpakkaus, 5 kpl samaa kokoa	2-15
1008-S	Sovitusarja 1/koko (koot 2-15) ja sormusmitta	
1008-K	Oval-8 -sormitukisetti, sisältää 44 tukea kätevässä lokerikossa	



MEDIROYAL | 2003, 2005

Mallet Splint

Sormen kärkiniveltä (DIP-nivel) immobilisoiva tuki

Käyttöaiheet

DIP-nivelen immobilisointi, sormivammat, erityisesti mallet finger (vasarasormi)

Ominaisuudet

- Pitää DIP-nivelen ojennettuna
- Lastan aukot lisäävät hengittävyttä lastan molemmilla puolilla
- Voidaan lämpömuokata sormeen sopivaksi
- Lastaa voidaan tarvittaessa lyhentää: PIP-nivelen liikerata ei rajoitu
- Lasta voidaan kiinnittää käyttämällä ihoystävällistä joustamatonta teippiä tai NRX® Strap Plus -nauhalla, joka kiinnitetään lastan dorsaalipuoleen kiinnitettävällä, itsekiinnittyvällä koukkutarralla.
- Väri kirkas ja beige

Koko- ja tilaustiedot

Koko määräytyy sormen kärkinivelen (DIP-nivelen) ympärysmittan mukaan. Saatavilla yksittäispakattuna tai kymmenen kappaleen paketissa.

Tuote-koodi	Väri	Koko	DIP-nivelen ympäryys	Lastan pituus	Määrä
2003-1	kirkas	1	40-45 mm	50 mm	1 kpl
2003-2	kirkas	2	45-50 mm	53 mm	1 kpl
2003-3	kirkas	3	50-55 mm	57 mm	1 kpl
2003-4	kirkas	4	55-60 mm	60 mm	1 kpl
2003-5	kirkas	5	60-65 mm	58 mm	1 kpl
2003-5,5	kirkas	5,5	65-70 mm	61 mm	1 kpl
2003-6	kirkas	6	70-80 mm	61 mm	1 kpl
2003-7	kirkas	7	80-90 mm	63 mm	1 kpl

Beige: tuotekoodi 2005-koko

10 kpl paketti: tuotekoodi 2003-koko/10 (kirkas) ja 2005-koko/10 (beige)

MEDIROYAL | NRX100X



NRX® Strap Kit -sisarlenkki

Kaksoisside sormien ja varpaiden instabiileetin hoitoon

Käyttöaiheet


Sormien tai varpaiden murtumat, venähdykset ja ruhjeet, yliliikkuvuus, nnaltaehkäisevä käyttö urheilussa

Ominaisuudet

- Mahdollistaa sormen/varpaan tuen viereiseltä sormelta tai varpaalta
- Mahdollistaa sormen/varpaan liikuttelun/mobilisoinnin vamman jälkeen
- NRX-nauhan sisäpinta pitää nauhan paikallaan sormessa
- Kaksi eri materiaalivaihtoehtoa: joustavampi NRX Strap ja tukevampi NRX Plus. Materiaaleja yhdistelemällä saadaan yksilöllisesti sopiva tuenta.
- Nauha voidaan leikata sopivaan mittaan
- Kiinnitetään paketin mukana tulevalla tarralla
- Kaksi eri pakettikokoa, 6 kpl tai 30 kpl

Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi	Kuvaus	Nauhan leveys	Määrä
NRX1008-30	sisarlenkki plus	15 mm	30 kpl
NRX1008-06	sisarlenkki plus	15 mm	6 kpl
NRX1007-30	sisarlenkki	15 mm	30 kpl
NRX1007-06	sisarlenkki	15 mm	6 kpl
NRX1009-30	sisarlenkki	30 mm	30 kpl
NRX1009-06	sisarlenkki	30 mm	6 kpl

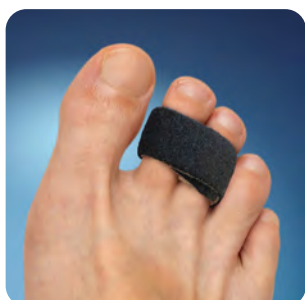

MEDIROYAL | EU44801

ARX® Buddy Loops

Sisarlenkit sormiin ja varpaisiin

Käyttöaiheet

Sormen tai varpaan instabiileetti tai murtuma, neurologinen oire sormessa tai varpaassa

Ominaisuudet

- Laadukas ARX-materiaali kiinnittyy itseensä ilman tarraa. Mitä enemmän tukea käyttää, sitä paremmin materiaali tarttuu itseensä. Mahdollista pestä ja käyttää uudelleen.
- Mahdollistaa sormen tai varpaan tukemisen toisella sormella/varpaalla
- Nauhan leveys 13 mm

Koko- ja tilaustiedot

Mahdollista leikata sopivaan mittaan. Pakkauskoot 5, 25 ja 50 kpl/pkt.

Tuotekoodi	Määrä
EU448013	5 kpl
EU448014	25 kpl
EU448015	50 kpl

Selkätuet

Ryhti- ja hyperekstensiotuet

- 69** Estab
- 70** Stabil-T
- 71** Flex-B
- 72** SAT36 muotoonmeltu
SAT35 suora leikkaus
- 73** Spinalplus 2.0
Spinomed active
- 74** Exto Inter
Exto Light
- 75** Dorsolite
Posture

Matalat ja korkeat tukiliivit

- 76** SAT 1323 muotoonmeltu
SAT 1355 suora leikkaus
- 77** Agilomb
- 78** Litecross90
Litecross93
- 79** Litecross91
- 80** Lumbocare Light
- 81** X-Back matala ja korkea
- 82** Dorsum Low
- 83** Porostrap
Aspen Lumbar
- 84** Lumbocare Inno I ja II

SI-vyöt

- 85** Sacro-X
LumboForce Sacro

Kylkituet

- 86** Kylkiluutuki miehet
Kylkiluutuki naiset

Tyrävyöt

Vatsatyrävyöt

- 87** Abdostrap II
Navel Truss

Nivustyrävyöt

- 88** HG50 / HG100 Inguinal
Balder

ORTHOSERVICE | M22035

E-Stab

Kevyt ja portaattomasti säädettävä hyperekstensio selän murtumien hoitoon

Käyttöaiheet

- Traumaattiset murtumat T10-L1/L2 tasolla
- Osteoporoosin/metastaasin aiheuttamat kompressiomurtumat rintarangassa ja rinta/lannerangan ylimenoalueella
- Murtumat osteomalasian yhteydessä
- Osteoartriitti
- Kipsikorsetin tilalla käytettäväksi

Ominaisuudet

- Erittäin mukava ja kevyt alumiinikehys, reunat pyöristetty.
- Teleskooppimekanismi: tukea säädettäessä ruuveja vain löysätään, niitä ei tarvitse irroittaa. Tukea voidaan säätää pysty- ja vaakasuuntiin.
- Portaaton, kuusioavaimella tehtävä säätö helpottaa tuen asennusta ja mahdollistaa säädön sopivaksi tuen ollessa potilaan yllä.
- Sternum-osa on myös kulmasäädettävissä sivuilta, 7,5° välein, sopivan tuennan/ekstension saavuttamiseksi
- Keinuva lantio-osa, jossa lukitusmahdollisuus 0°, 18° tai 36° kulmaan (paljon istuva potilas, esim. pyörätuolissa)
- Liikuteltava sternum-osa.
- Kiinnityksessä ainutlaatuinen vyön pituuden säätö, jossa kaksinkertainen solki ja itselukittava esikiinnitysjärjestelmä.
- Irroitettavat, neppariinnitteiset pehmusteosat, joissa vettähylykivä käsittely.

Koko- ja tilaustiedot

Koko määrittyy lantion ympärysmittaan mukaan. Koon valinnassa tulee huomioida myös *korkeus: rintalasta – häpyluun yläreuna.

Tuotekoodi	Koko	Lantion ympäryys	Korkeus*
M22035-1	1	50-75 cm	41-54 cm
M22035-1S	1S	50-75 cm	30-41 cm
M22035-2	2	75-105 cm	41-54 cm
M22035-2S	2S	75-105 cm	30-41 cm
M22035-3	3	105-135 cm	41-54 cm
M33035-3S	3S	105-135 cm	30-41 cm



Kaula

Olka • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset

Selkätuet

Ryhti- ja hyperekstensiotuet



ORTHOSERVICE | MP1000

Stabil-T

Pituussäädettävä hyperekstensiotuki
sternum- ja lantio-osan kulmasäädöillä

Käyttöaiheet

Traumaattiset murtumat T10-L1/L2 tasolla, osteoporoosin/metastaasin aiheuttamat kompressiomurtumat rintarangassa ja rinta/lannerangan ylimenoalueella, murtumat osteomalasian yhteydessä, osteoartriitti kipsikorsetin tilalla käytettäväksi

Ominaisuudet

- Pituussäädettävä
- Teleskooppisesti leveyssäädettävä sternum-osa, joka on myös kulmasäädettävissä sivuilta, 7,5° välein, sopivan tuennan/ekstension saavuttamiseksi
- Keinuva lantio-osa, jossa lukitusmahdollisuus 0° tai 18° kulmaan (paljon istuva potilas, esim. pyörätuolissa)
- Säädettävä selkäpuolinen hihna, jossa helppokäyttöinen pikasolki
- Vettä kestävät pehmusteet
- Runko valmistettu kevyestä alumiinista, reunat pyöristetty

Koko- ja tilaustiedot

*Korkeus määritetään mitalla rintalastan proksimaalireunasta (yläreuna) häpyluun yläreunaan. Toinen määrittävä mitta on lantion ympärysmitta.

Tuotekoodi	Koko	Lantion ympäryys	Korkeus*
MP1000-XS	XS	50–60 cm	30–37 cm
MP1000-S	S	60–75 cm	34–42 cm
MP1000-MS	MS	75–90 cm	34–41 cm
MP1000-M	M	75–90 cm	36–46 cm
MP1000-ML	ML	75–90 cm	40–52 cm
MP1000-LS	LS	90–105 cm	36–46 cm
MP1000-L	L	90–105 cm	40–52 cm
MP1000-XLS	XLS	105–115 cm	39–49 cm
MP1000-XL	XL	105–115 cm	42–54 cm

ORTHOSERVICE | M33009

Flex-B

Ryhtitukiliivi alumiinisella tukiraamilla, kevennettävissä kuntoutuksen edetessä

Käyttöaiheet

Nivelrikon tai kyfoosin aiheuttama selkäkipu, rintarangan tai lannerangan yläosien murtumien hoito, osteoporoosin tai metastaasin aiheuttamat kompressiomurtumat rintarangassa

Ominaisuudet

- Valmistettu elastisesta, antistaattisesta ja hengittävästä CarbonTrace®-materiaalista
- Muotoiltava alumiininen tukiraami
- Kuntoutuksen edetessä tuentaa voi keventää vaihtamalla tukiraamin tilalle joustavat tukilastat
- Säädetävät, pehmustetut olkaremmit
- Olkaremmien liikkuva takapaneeli voidaan kiinnittää mille korkeudelle tahansa
- Etupuolen elastiset remmit mahdollistavat yksilöllisen säädön
- Etuosa vahvistettu spiraalilastoilla

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään pituuden ja vyötärön ympäryksen mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Lantion ympäryys	Korkeus edestä	Korkeus takaa
M33009-XS	XS	70–80 cm	16 cm	50 cm
M33009-S	S	80–90 cm	16 cm	50 cm
M33009-M	M	90–100 cm	16 cm	50 cm
M33009-L	L	100–110 cm	16 cm	52 cm
M33009-XL	XL	110–120 cm	16 cm	52 cm
M33009-XXL	XXL	120–130 cm	16 cm	52 cm



Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset

Selkätuet

Ryhti- ja hyperekstensiotuet



ORTHOSERVICE | M1336, M1335

SAT36 muotoonommeltu SAT35 suora leikkaus

Keskivahvan tuen antava dorsolumbaari korsetti elastisilla olkahihnoilla

Käyttöaiheet

- Artroosin tai kyfoosin aiheuttamat selkäkivut
- Alempien rintanikamien ja ylempien lannenikamien murtumien jälkitilojen hoito
- Osteoporoosin tai metastaasin aiheuttamien stabiilien kompressiomurtumien jälkitilojen hoito
- Postoperatiivinen tuenta

Ominaisuudet

- Kiristysmekanismi, jolla saadaan kohdistettu paine ja täydellinen stabilisaatio juuri oikeaan paikkaan
- Neljä tukilastaa selkäpuolella (vahvistetut lastat tilattavissa erikseen)
- Tarranauhakiinnitys etuosassa
- Pehmustetut ja elastiset olkahihnat
- Hengittävä rakenne selkäpuolella
- Pääosa kankaasta puuvillaa, jossa hieman elastaania
- Väri beige

Koko- ja tilaustiedot / SAT36 muotoonommeltu

Tuotekoodi	Koko	Lantion ympärys	Etu-/takakorkeus
M1336-XS	XS	75-85 cm	21/55 cm
M1336-S	S	85-95 cm	21/55 cm
M1336-M	M	95-105 cm	21/55 cm
M1336-L	L	105-115 cm	21/55 cm
M1336-XL	XL	115-125 cm	21/55 cm
M1336-XXL	XXL	120-135 cm	21/55 cm

Koko- ja tilaustiedot / SAT35 suora leikkaus

Tuotekoodi	Koko	Lantion ympärys	Etu-/takakorkeus
M1335-XS	XS	70-80 cm	23/55 cm
M1335-S	S	80-90 cm	23/55 cm
M1335-M	M	90-100 cm	23/55 cm
M1335-L	L	100-110 cm	23/55 cm
M1335-XL	XL	110-120 cm	23/55 cm

ORTHOSERVICE | M33049

Spinalplus 2.0

Ryhtitukiliivi alumiinilastalla

Käyttöaiheet

Osteoporoosista johtuvat rinta- ja lannerangan degeneratiiviset muutokset (murtuman jälkeinen tuenta, ennaltaehkäisevä hoito), rintarangan suurentunut kyfoosi ja siihen liittyvä selkäkipu, Scheuermannin tauti

Ominaisuudet

- Muotoiltava alumiininen tukiraami
- Helposti kiristettävä, pienellä lihasvoimalla toimiva remmitys (kiristyy yhden, lantiolle kiinnitettävän kiristysremmin avulla)
- Lantion tukivyö on helposti ja yksilöllisesti säädettävissä (lantion ympärys 70–125 cm)
- Tuki antaa biodynaamisen ja joustavan tuen sekä aktivoi selkää tukevaa lihaksistoa
- Pehmustetut hartiaremmit tasaavat hartiapainetta ja estävät hiertymät
- Väri harmaa

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään rintarangan ensimmäisen ja lannerangan viidennen nikaman välisellä etäisyydellä sekä lantion ympäryksellä.

Tuotekoodi	Koko	Selän pituus T1-L5	Lantion ympärys
M33049-XS	XS	35–41 cm	70–125 cm
M33049-S	S	41–47 cm	70–125 cm
M33049-M	M	47–54 cm	70–125 cm
M33049-L	L	54–61 cm	70–125 cm



MEDI | 5.669.05X

Spinomed® active

Osteoporoosin yksilöllinen ryhtituki bodylla

Ominaisuudet

- Helposti puettava
- Miellyttävä ja huomaamaton
- Parantaa kokonaisvaltaisesti keskivartalon tukea ja hallintaa

Koko- ja tilaustiedot

Mitat otetaan aina yksilöllisesti.

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset

Selkätuet

Ryhti- ja hyperekstensiotuet



MEDIROYAL | EXT150

Exto® Inter

Ryhtitukiliivi muokattavalla tukiraamilla

Käyttöaiheet

Hyväasentoinen kompressiomurtuma rintarangassa, kohtalainen ja voimakas kyfoosi, lievä skolioosi rintarangassa, osteoporoosi, murtuman jälkeinen hoito


Ominaisuudet

- Hyvä kombinaatio tuen keveyttä ja tukevuutta
- Muokattavissa oleva tukiranka takaa hyvän istuvuuden
- Muokattavat olkaremmit mahdollistavat toispuoleisen tuennan esim. skolioosin yhteydessä
- Ohut, pehmeä ja hengittävä materiaali lisää käyttömukavuutta

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään pituuden ja vyötärön ympäryksen mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Pituus	Vyötärön ympäryys
EXT150-P	Petite	145–170 cm	60–80 cm
EXT150-S	Small	170–190 cm	60–80 cm
EXT150-L	Standard	170–190 cm	80–110 cm

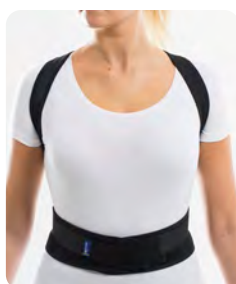

MEDIROYAL | EXT100

Exto® Light

Kevyt selän ryhtitukiliivi

Käyttöaiheet

Huono ryhti, kipu rintarangan alueella, staattisesta jännityksestä johtuva niska-hartiasseudun kipu, rintarangan kyfoosi, osteoporoosi

Ominaisuudet

- Kevytrakenteinen ja helppo pukea
- Toiminnallinen ja joustava
- Hengittävä materiaali
- Vähäinen paine olkapäissä
- Jättää lapaluun vapaaksi, eikä häiritse sen toimintaa
- Ohjaa olkapäitä alaspäin, jolloin trapezius-lihaksen staattinen jännitys vähenee
- Ojentaa rintarankaa
- Voidaan säätää epäsymmetrisesti lievän skolioosin hoidon yhteydessä

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään pituuden ja vyötärön ympäryksen mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Pituus	Vyötärön ympäryys
EXT100-C	Child	120–145 cm	45–60 cm
EXT100-P	Petite	145–170 cm	60–80 cm
EXT100-S	Small	170–190 cm	60–80 cm
EXT100-L	Standard	170–190 cm	80–110 cm



ORTHOSERVICE | M91111

Dorsolite

Yläselän kevyt ryhtituki muistuttaa yläselän ryhdin ylläpidosta

Käyttöaiheet



Yläselän etukumaruus, huono ryhti, eteen työntyvät hartiat, lapaluun lievä sirotus, huonosta ryhdistä johtuva selkäkipu

Ominaisuudet

- Remmit voidaan muokata ja lyhentää kätevien Y-tarrojen avulla
- Säädetävät olkaremmit
- Alkuasetusten jälkeen remmi kiinnitetään pikalukon avulla
- Tuki on helppo laittaa päälle, kuten selkäreppu

Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi	Koko	Väri
M91111	1 koko	beige

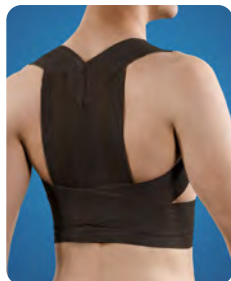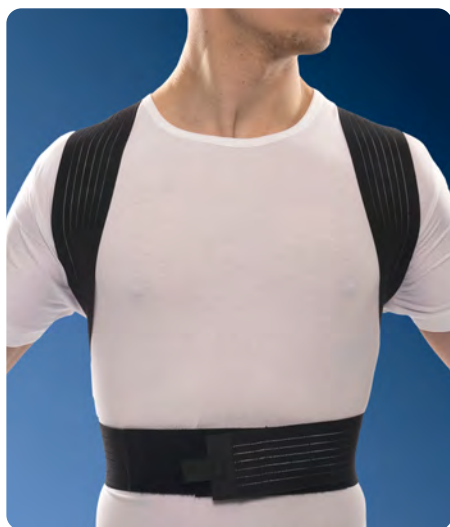

MEDIROYAL | MR4922

Posture

Ryhtitukiliivi

Käyttöaiheet

Ryhtiongelmia

Ominaisuudet

- Toiminnallinen tukiliivi tarjoaa dynaamisen tuen yläselän ryhdille
- Elastiset remmit mahdollistavat yksilöllisen säädön
- Helppo pukea selkäreppuun tavoin
- Kaksi erilaista pehmustetta vähentävät kainaloihin kohdistuvaa painetta ja hankausta
- Hengittävä, vakaa ja hyvän kompression antava materiaali
- Väri musta, saatavana myös beige.

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään vyötärön yläosan ympärysmittan mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Vyötärön ympäryys
MR04922000309	XS	63-75 cm
MR04922000409	S	75-83 cm
MR04922000509	M	83-91 cm
MR04922000609	L	91-99 cm
MR04922000709	XL	99-107 cm
MR04922000809	XXL	107-115 cm

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset

Selkätuet

Matalat ja korkeat tukiliivit



ORTHOSERVICE | M1323, M1355

SAT 1323 muotoonommeltu SAT 1355 suora leikkaus

Puolijäykkä tukiliivi elastisilla kiristystarroilla

Käyttöaiheet

- Posttraumaattinen tuenta
- Postoperatiivinen tuenta
- Vakaan lannenikaman kompressiomurtuman jälkikuntoutus
- Poikkihaarakkeiden murtumien hoito
- Iskias-ongelmat
- Selkärangan nivelrikko

Ominaisuudet

- Kiristysmekanismi jolla saadaan kohdistettua täydellinen paine ja tuenta juuri oikeaan paikkaan
- Selkäpuolella neljä tukilastaa (metalliset, vahvistetut tukilastat tilattavissa erikseen erikseen, tuotenumero: 9ST012/L)
- Tarranauhakiinnitys etuosassa
- Hengittävä rakenne selkäpuolella
- Pääosa kankaasta puuvillaa, jossa hieman elastaania

Koko- ja tilaustiedot / SAT 1323 muotoonommeltu

Koko määritetään lantion ympärysmitan mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Lantion ympärys	Etu-/takakorkeus
M1323-XS	XS	75-85 cm	21/33 cm
M1323-S	S	85-95 cm	21/33 cm
M1323-M	M	95-105 cm	21/33 cm
M1323-L	L	105-115 cm	21/33 cm
M1323-XL	XL	115-125 cm	21/33 cm
M1323-XXL	XXL	120-135 cm	21/33 cm

Koko- ja tilaustiedot / SAT 1323 suora leikkaus

Koko määritetään lantion ympärysmitan mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Lantion ympärys	Etu-/takakorkeus
M1355-XS	XS	70-80 cm	20/32 cm
M1355-S	S	80-90 cm	20/32 cm
M1355-M	M	90-100 cm	20/32 cm
M1355-L	L	100-110 cm	20/32 cm
M1355-XL	XL	110-120 cm	20/32 cm
M1355-XXL	XXL	120-130 cm	20/32 cm



TENORTHO | TO1108

Agilomb

Selkätuki, jossa muotoiltu vatsanpuoli

Käyttöaiheet

Osteoporoosi, osteomalasia, lisääntynyt kyfoosi, osteolyysi, noidannuoli/lumbago, iskias, spondyloartroosi, välilevyvaivat

Ominaisuudet

- Helppo säätää sopivan kokoiseksi ja sopivalle kireydelle
- 6 integroitua lastaa tukee alaselkää
- Saatavilla myös vahvemmat tukilastat
- Etupuolella kevyt spiraalituki
- Kevyt, joustava ja kestävä materiaali
- Muovaantuu hyvin käyttäjän vartalon malliin
- Takaa hyvän istuvuuden
- Remmien päissä olevat lenkit helpottavat kiristämistä
- Tuen etu- ja takakorkeus 30 cm

Koko- ja tilaustiedot

Koko määrittyy lantion ympärysmittan mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Lantion ympäryys
TO1108-M	M	90-100 cm
TO1108-L	L	100-110 cm
TO1108-XL	XL	110-120 cm
TO1108-XXL	XXL	120-130 cm
TO1108-XXXL	XXXL	130-140 cm

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset

Selkätuet

Matalat ja korkeat tukiliivit



Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään lantion ympäryksen mukaan.

ORTHOSERVICE | M1090

Litecross90

Keskikorkea selän tukiliivi Sensitive®-materiaalista

Käyttöaiheet

- Lumbago
- Lanne- ja ristiselän kiputilat
- Lannerangan välilevyvaivat
- Selkärangan nivelrikko
- Postoperatiivinen hoito
- Lievät selkärangan alaosan vammat
- Lanneselän alueen kontraktuurat

Ominaisuudet

- Valmistettu elastisesta, antistaattisesta ja hengittävästä Sensitive®-materiaalista
- Elastiset lisäkiretimet tarrakiinnityksellä tuen yksilölliseen säätöön
- Tarranauhakiinnitys
- Neljä irrotettavaa lastaa selkäpuolella
- Etuosa vahvistettu spiraalilastoilla
- Saatavana myös beigenä M1090C

Tuotekoodi	Koko	Väri	Lantion ympäryys	Etu-/takakorkeus
M1090S-XS	XS	musta	70–80 cm	19/28 cm
M1090S-S	S	musta	80–90 cm	19/28 cm
M1090S-M	M	musta	90–100 cm	19/28 cm
M1090S-L	L	musta	100–110 cm	19/28 cm
M1090S-XL	XL	musta	110–120 cm	19/28 cm
M1090S-XXL	XXL	musta	120–130 cm	19/28 cm



ORTHOSERVICE | M1093

Litecross93

Matala selän tukiliivi Sensitive®-materiaalista

Käyttöaiheet ja ominaisuudet

Kuten Litecross 90. Saatavana myös mustana M1093S.

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään lantion ympäryksen mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Väri	Lantion ympäryys	Etu-/takakorkeus
M1093C-XS	XS	beige	70–80 cm	14/23 cm
M1093C-S	S	beige	80–90 cm	14/23 cm
M1093C-M	M	beige	90–100 cm	14/23 cm
M1093C-L	L	beige	100–110 cm	14/23 cm
M1093C-XL	XL	beige	110–120 cm	14/23 cm
M1093C-XXL	XXL	beige	120–130 cm	14/23 cm



ORTHOSERVICE | M1091

Litecross91

Korkea selän tukiliivi Sensitive®-materiaalista

Käyttöaiheet

Kuten keskikorkea Litecross90, lisäksi:

- Stabiiliin lannenikaman kompressiomurtuman jälkitilat
- Poikkihaarakkeiden murtumien hoito

Ominaisuudet

- Valmistettu elastisesta, antistaattisesta ja hengittävästä Sensitive®-materiaalista
- Elastiset lisäkirstimet (4 kpl) tarrakiinnityksellä tuen yksilölliseen säätöön
- Neljä irrotettavaa lastaa selkäpuolella
- Etuosa vahvistettu spiraalilastoilla
- Saatavana myös mustana M1091S

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään lantion ympäryksen mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Väri	Lantion ympäryys	Etu-/takakorkeus
M1091C-XS	XS	beige	70-80 cm	23/33 cm
M1091C-S	S	beige	80-90 cm	23/33 cm
M1091C-M	M	beige	90-100 cm	23/33 cm
M1091C-L	L	beige	100-110 cm	23/33 cm
M1091C-XL	XL	beige	110-120 cm	23/33 cm
M1091C-XXL	XXL	beige	120-130 cm	23/33 cm
M1091S-XS	XS	musta	70-80 cm	23/33 cm
M1091S-S	S	musta	80-90 cm	23/33 cm
M1091S-M	M	musta	90-100 cm	23/33 cm
M1091S-L	L	musta	100-110 cm	23/33 cm
M1091S-XL	XL	musta	110-120 cm	23/33 cm
M1091S-XXL	XXL	musta	120-130 cm	23/33 cm

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset

Selkätuet

Matalat ja korkeat tukiliivit



ORTHOCARE | 2530

Lumbocare light

Lanneselän tukeva ja kestävä selkätuki

Käyttöaiheet

- Akuutit selkävut
- Selän yliikkuvuus
- Degeneratiiviset muutokset
- Postoperatiivinen kuntoutus

Ominaisuudet

- Laadukkaat ihoystävälliset elastiset materiaalit
- Lisäkiristimet antavat hyvän lisätuen
- Tukee selkää lantiosta rintarangan keskiosaan
- Korkeus edestä n.18 cm, takaa n. 24 cm

Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi	Koko	Vyötärön ympärys
2530-S	S	60-75 cm
2530-M	M	75-90 cm
2530-L	L	90-105 cm
2530-XL	XL	105-120 cm
2530-XXL	XXL	120-135 cm
2530-XXXL	XXXL	135-150 cm
2530-XXXXL	XXXXL	150-160 cm

MEDIROYAL | MR4920, MR4921

X-Back matala ja korkea

Käyttöaiheet

Akuutti tai krooninen noidannuoli, lumbosakraalinen epävakausta, degeneratiiviset sairaudet, osteoporoosi

Ominaisuudet

- Takana neljä taskua, joista kaksi ulointa ovat suljettuja ja niissä on muovikiskot
- Kaksi keskimmäistä taskua ovat avoimia, joissa on teräskiskot, jotka voidaan säätää yksilöllisesti käyttäjän mukaan
- Matalan mallin MR4920 takakorkeus on 26 cm ja korkean mallin MR4921 takakorkeus on 32 cm
- Saatavana myös beigenä.

Koko- ja tilaustiedot

Koko määräytyy vyötärön ympärysmittan mukaan.

Matala malli Tuotekoodi	Koko	Vyötärön ympäryys	Tuen takakorkeus	Väri
MR04920000309	XS	66-75 cm	26 cm	musta
MR04920000409	S	75-83 cm	26 cm	musta
MR04920000509	M	83-91 cm	26 cm	musta
MR04920000609	L	91-99 cm	26 cm	musta
MR04920000709	XL	99-107 cm	26 cm	musta
MR04920000809	XXL	107-115 cm	26 cm	musta
MR04920000909	XXXL	115-125 cm	26 cm	musta
MR04920-4XL-9	XXXXL	125-138 cm	26 cm	musta

Korkea malli Tuotekoodi	Koko	Vyötärön ympäryys	Tuen takakorkeus	Väri
MR04921000309	XS	66-75 cm	32 cm	musta
MR04921000409	S	75-83 cm	32 cm	musta
MR04921000509	M	83-91 cm	32 cm	musta
MR04921000609	L	91-99 cm	32 cm	musta
MR04921000709	XL	99-107 cm	32 cm	musta
MR04921000809	XXL	107-115 cm	32 cm	musta
MR04921000909	XXXL	115-125 cm	32 cm	musta
MR04921-4XL-9	XXXXL	125-138 cm	32 cm	musta



Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset

Selkätuet

Matalat ja korkeat tukiliivit



MEDIROYAL | MR4924

Dorsum Low

Käyttöaiheet

- Noidannuoli eli lumbago
- Lanne- ja ristiselän kiputilat
- Lannerangan välilevyvaivat
- Selkärangan nivelrikko
- Postoperatiivinen hoito
- Lievät selkärangan alaosan vammat
- Lanneselän alueen kontraktuurat

Ominaisuudet

- Tuen korkeus takana on 19 cm ja edessä vain 14 cm
- Takana neljä kiskoa avoimissa taskuissa, jotka voidaan tarpeen tullen myös poistaa
- Kiskot on valmistettu joustavasta muovista, joten ne mukautuvat alaselän muotoihin
- Helppo pukea ja säätää

Koko- ja tilaustiedot

Koko määrittyy lantion ympärysmittan mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Lantion ympäryys
MR04924000409	S	75-83 cm
MR04924000509	M	83-91 cm
MR04924000609	L	91-99 cm
MR04924000709	XL	99-107 cm
MR04924000809	XXL	107-115 cm
MR04924000909	XXXL	115-135 cm



Koko- ja tilaustiedot
Koko määräytyy vyötärön
ympäryksen mukaan.

ENOVIS | 82-0227, 82-0228

Porostrap

Matala tukiliivi lisäkivistystarroilla

Käyttöaiheet

- Lanne ja ristiselkävivot
- Akuutti alaselän kipu
- Aktiiviliikkujan selkätuki
- Selkävivotun jälkeinen kuntoutus

Ominaisuudet

- Matalaprofiilinen, kevyt selkätuki
- Optimaalisen miellyttävä hengittävä verkkotekstiili
- Neljä taipuisaa dorsaalista jäykistettä, kaksi taipuisaa ventraalista jäykistettä
- Bilateraaliset elastiset nauhat kompressiotason säätöön
- Käyttöä helpottavat käsi- ja sormilenkit
- Tukiliivin korkeus takaa 21 cm tai 26 cm

Tuotekoodi 21 cm	Tuotekoodi 26 cm	Koko	Vyötärön ympäryys
82-0227-1	82-0228-1	XS	56-68 cm
82-0227-2	82-0228-2	S	68-82 cm
82-0227-3	82-0228-3	M	82-98 cm
82-0227-4	82-0228-4	L	98-116 cm
82-0227-5	82-0228-5	XL	116-136 cm



CAMP | 48003

Aspen Lumbar

Kevyesti ja helposti säädettävä tukeva lannerangan tuki

Käyttöaiheet

Postoperatiivinen tuki, kuntoutumaton vartalon lihaksisto, degeneratiivinen välilevysairaus, pullistuma tai välilevytyrä, epäspesifinen alaselkäkipu, krooninen alaselkäkipu, murtumien hoito, spondylolisteesi, selkärangan ahtaus, facet-oireyhtymä

Ominaisuudet

- Auttaa lievittämään akuuttien kipeytymisten, kouristusten tai väsyneiden lihasten aiheuttamaa alaselkäkipua.
- Joustamaton materiaali, jossa on Aspenin patentoitu 4:1-kiristysmekanismi.
- Erittäin helppo ja kevyt kiristyssäätö
- Sopii erinomaisesti aktiivisille potilaille ja sitä voidaan helposti käyttää huomaamattomasti vaatteiden alla.

Koko- ja tilaustiedot

Koko määräytyy vyötärön ympärysmittaan mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Vyötärön ympäryys
480030010	XS	53-69 cm
480030011	S	66-79 cm
480030012	M	79-91 cm
480030013	L	91-107 cm
480030014	XL	104-122 cm
480030015	XXL	109-132 cm

Selkätuet

Matalat ja korkeat tukiliivit



ORTHOCARE | 2521, 2526

Lumbocare Inno I ja II

Lanneselän tukiliivi, kaksi korkeutta ja yksilöllisesti säädettävä etukorkeus

Käyttöaiheet

Alaselän akuutit tai pitkäaikaiset kiputilat, yliliikkuvuus ja kuluman aiheuttamat muutokset, välilevyvaivat, noidannuoli, postoperatiivinen hoito (Lumbocare Inno II, 2526)

Ominaisuudet

- Tukee lantiota
- Tukee rintarangan alaosaa (Lumbocare Inno II, 2526)
- Parantaa selkärangan asentoa
- Vähentää rasitusta vammautuneelta alueelta
- Ojentaa lievästi lannelordoosia
- Antaa proprioseptisen efektin
- Laadukkaat ihoystävälliset elastiset materiaalit
- Helppokäyttöinen käsilenkkien ja tarranauhakiinnityksen ansiosta
- Leveä lisäkiristin antaa hyvän lisätuen ja mahdollistaa tuen etuosan korkeuden yksilöllisen säädön.*

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään lantion ympäryksen mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Lantion ympäry	Tuen etu-/takakorkeus
2521-S	S	60–75 cm	17 cm* / 24 cm
2521-M	M	75–90 cm	17 cm* / 24 cm
2521-L	L	90–105 cm	17 cm* / 24 cm
2521-XL	XL	105–120 cm	17 cm* / 24 cm
2521-XXL	XXL	120–135 cm	17 cm* / 24 cm
2526-S	S	60–75 cm	17 cm* / 28 cm
2526-M	M	75–90 cm	17 cm* / 28 cm
2526-L	L	90–105 cm	17 cm* / 28 cm
2526-XL	XL	105–120 cm	17 cm* / 28 cm
2526-XXL	XXL	120–135 cm	17 cm* / 28 cm



MEDIROYAL | MR4925

Sacro-X

Matala elastinen SI-tukivyö

Käyttöaiheet

SI-nivelen kipu, toimintahäiriö tai artroosi, lumbosakraalinen instabiliteetti

Ominaisuudet

- Suunniteltu antamaan hyvä lumbosakraalinen tuki
- Sacro-tyyny ja kaksi lastaa: tyyny lisää tukea SI-alueella, muoviset lastat tukevat ja kohdistavat paineen oikein
- Lisäkiristinnauhan voi kiinnittää sivuille tai etuosaan
- Materiaali elastinen ja napakka

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään lantion ympäryksen mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Lantion ympärys
MR4925-S	S	75–83 cm
MR4925-M	M	83–91 cm
MR4925-L	L	91–99 cm
MR4925-XL	XL	99–107 cm
MR4925-XXL	XXL	107–115 cm



ENOVIS | 82-0058

LumboForce® Sacro

Käyttöehdot

Symfyysin/iliosakraalinivelten trauman jälkeen, symfyysin vajaatoiminta, rakenteellinen löystyminen sakroiliakisessa nivelessä

Ominaisuudet

- Kaksi uudelleensijoitettavaa proprioseptiopaneelia hierovat ja edistävät verenkiertoa sekä lievittävät kipua.
- Kiristyshihnat yksilölliseen kompression säätöön.
- Hengittävä, puolijoustava verkkomainen materiaali.

Koko- ja tilaustiedot

Koko määräytyy lantion ympärysmitan mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Lantion ympärys
82-0058-2	S	75–90 cm
82-0058-3	M	90–100 cm
82-0058-4	L	100–110 cm
82-0058-5	XL	110–120 cm
82-0058-6	XXL	120–130 cm
82-0058-7	XXXL	130–140 cm

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilikka • Jalka

Lapset



SPORLASTIC | 07028

Kylkiluutuki miehet

Käyttöaiheet

Mustelmat ja murtumat kylkiluissa ja rinnassa

Ominaisuudet

- Tarrakiinnitys
- Korkeus 15 cm

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään rinnan ympäryksen mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Rinnan ympäryys
07028-0-9100-S	S	< 82 cm
07028-0-9100-M	M	82–96 cm
07028-0-9100-L	L	96–112 cm
07028-0-9100-XL	XL	> 112 cm



SPORLASTIC | 07029

Kylkiluutuki naiset

Käyttöaiheet

Mustelmat ja murtumat kylkiluissa ja rinnassa

Ominaisuudet

- Tarrakiinnitys
- Korkeus edestä 9 cm ja takaa 15 cm

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään vyötärön ympäryksen mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Vyötärön ympäryys
07029-0-9100-S	S	< 66 cm
07029-0-9100-M	M	66–76 cm
07029-0-9100-L	L	76–89 cm
07029-0-9100-XL	XL	> 89 cm



ENOVIS | 82-0256, 82-0257, 82-0258

Abdostrap II

Vatsatukiliivi abdominaaliseen heikkouteen

Käyttöaiheet

Postoperatiivisesti, kuntoutumiseen, keisarinleikkauksen jälkeen

Ominaisuudet

- Vahva kompressoiva elastinen materiaali abdominaalialueen tuennan lisäämiseksi
- 2 joustavaa dorsaalista jäykistettä sakrolumbaalialueen stabilointiin
- 2 joustavaa ventraalista jäykistettä ventraaliseksi lisätueksi
- Etuosassa tukeva materiaali, johon leikattavissa aukko.
- Lisävarusteena tarroilla kiinnitettävä hihna, jolla saa kohdennettua lisätuentaa.
- Korkeusvaihtoehdot: 18, 25 ja 32 cm

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään vyötärön ympäryksen mukaan.

Tuotekoodi 18 cm	Tuotekoodi 25 cm	Tuotekoodi 32 cm	Koko	Vyötärön ympärys
82-0256-1	82-0257-1	82-0258-1	S	68–82 cm
82-0256-2	82-0257-2	82-0258-2	M	82–98 cm
82-0256-3	82-0257-3	82-0258-3	L	98–116 cm
82-0256-4	82-0257-4	82-0258-4	XL	116–136 cm
82-0256-5	82-0257-5	82-0258-5	XXL	136–156 cm



ORLIMAN | O-104

Navel Truss

Napatyrävyö

Ominaisuudet

- Elastinen, tarrakiinnitys
- Edessä pyöreä navan tukipelotti

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään vyötärön ympäryksen mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Vyötärön ympärys
0-104-7	7	73–83 cm
0-104-8	8	84–91 cm
0-104-9	9	92–99 cm
0-104-10	10	100–107 cm
0-104-11	11	108–120 cm
0-104-12	12	121–130 cm
0-104-13	13	131–140 cm

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset



Koko- ja tilaustiedot
Koko määritetään lantion
ympäryksen mukaan.

ORMIHL | 917X, 9183

HG50 / HG100 Inguinal

Tukivyö toispuoleiseen tai molemminpuoliseen nivustyrään

Käyttöaiheet

Pieni tai keskikokoinen nivustyrä, estää tyrän kasvun

Ominaisuudet

- Laadukas ja kestävä
- Antaa hyvän tuen
- Solkikiinnitys

Tuotekoodi vasen	Tuotekoodi oikea	Tuotekoodi molemminpuoleinen	Lantion ympärys
9170/82	9171/82	9183/82	82 cm
9170/87	9171/87	9183/87	87 cm
9170/92	9171/92	9183/92	92 cm
9170/97	9171/97	9183/97	97 cm
9170/102	9171/102	9183/102	102 cm
9170/107	9171/107	9183/107	107 cm
9170/112	9171/112	9183/112	112 cm



NORDICARE | 50216, 50215

Balder

Tyrävyö toispuoleiseen tai molemminpuoliseen nivustyrään

Käyttöaiheet

Pieni tai keskikokoinen nivustyrä, estää tyrän kasvun,
pre- ja postoperatiivisesti

Ominaisuudet

- Portaattomasti säädettävissä (korkeus- ja sivusuunnassa) hyvän istuvuuden aikaansaamiseksi
- Pehmeä, helposti sopivan pituiseksi lyhennettävä haaranauha kiinnitetään lantiolle tarranauhalla
- Muotoonmeltu, hengittävä ja miellyttävä materiaali ihoa vasten
- Joustava ja huomaamaton, ei näy vaatteiden läpi
- Värit musta ja beige

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään lantion ympäryksen mukaan.

Vasen musta	Oikea musta	Molemminpuoleinen beige	Koko	Lantion ympärys
502161030	502162030	502150030	XS	70–80 cm
502161040	502162040	502150040	S	80–90 cm
502161050	502162050	502150050	M	90–100 cm
502161060	502162060	502150060	L	100–115 cm
502161070	502162070	502150070	XL	115–125 cm



Lonkkatuet

- 91** Hipop
Hipocross 2.0
- 92** Hinge for Hipocross
Coxa-Hit
- 93** NRX Strap Kit



TENORTH | TO3309

Hipop

Yhden koon lonkkaortoosi, jossa on korkeuden, fleksion ja ekstension sekä abduktion ja adduktion säädöt

Käyttöaiheet

Postoperatiivisesti, lonkan vaurioituminen leikkauksen jälkeen, ei-eroitavat ja luutumattomat reisiluun kaulan murtumat ja lonkkanivelen ongelmat, joissa tarvitaan abduktio-adduktion ja/tai fleksio-ekstension kontrollia

Ominaisuudet

- Tukee lonkkaa ja reittä
- Valmistettu vahvasta muovista ja alumiinisesta nivelkiskosta
- Kätevä yhden koon puolieroton tuote: tuettavan lonkan puoli, ympärysmittat ja pituus säädettävissä yksilöllisesti
- Tuen nivel on säädettävissä tilanteen/tarpeen mukaisesti: abduktio-adduktiosuunta välillä -60°-60°, fleksio-ekstensiosuunta välillä 0°-20°-40°-60°-80°-100°
- Pehmusteet miellyttävää ja hengittävää C6Tex-materiaalia

Koko- ja tilaustiedot

Yksi koko. Erikseen oikea, vasen ja puolieroton malli.

Tuotekoodi	Puoli	Koko
TO3309	Puolieroton	1 koko



ORTHOSERVICE | M91006N

Hipocross 2.0

Lonkkatuki lonkan kiputiloihin

Käyttöaiheet

- Postoperatiivisesti lonkan tekonivelooperaatioiden ja luksaation jälkeen
- Konservatiivisesti lonkan kulumissa, luksaatioissa ja lihasrepeämissä

Ominaisuudet

- Tukee lonkkaa, sivuttaiset spiraalituet
- Elastiset ristikkäin menevät lisäkirimmet: estävät liiallista adduktiota, osittain vähentävät fleksiota ja ekstensiota
- Parantaa lihasten koordinaatiota/aktivaatiota (proprioseptiikka)
- Antaa hyvän kompression
- Helppo tarrakiinnitys
- Hengittävä ja miellyttävä materiaali
- Lisävarusteena jäykkä nivelkisko M91007: rajoittamaan ekstension 0° ja fleksion 80°, estämään voimakkaammin lonkan adduktiota, oikea/vasen

Koko- ja tilaustiedot

Koko määrittyy lantion ja reiden proksimaaliosan ympärysmittan mukaan. Vasen ja oikea.

Tuotekoodi Vasen	Tuotekoodi Oikea	Koko	Lantion ympäryys	Reiden ympäryys
M91006NL-S	M91006NR-S	S	72-104 cm	40-58 cm
M91006NL-M	M91006NR-M	M	104-137 cm	54-74 cm
M91006NL-L	M91006NR-L	L	137-170 cm	68-90 cm



ORTHOSERVICE | M91007

Hinge for Hipocross

Jäykkä nivelkisko, lisäosa Hipocross-lonkkatukeen

Käyttöaiheet

- Rajoittamaan ekstension 0°
- Rajoittamaan fleksion 80°
- Estämään voimakkaammin lonkan adduktiota



SPORLASTIC | 07480-2-9003, 07480-1-9003

Coxa-HiT®

Kevyt lonkkatuki kiputiloihin

Käyttöaiheet

- Postoperatiivisesti lonkan tekonivel-operaatioiden ja luksaation jälkeen
- Konservatiivisesti lonkan kulumissa ja lihasrepeämissä

Ominaisuudet

- Antaa hyvän kompression
- Tukee lonkkaa sivusuunnassa
- Parantaa lihasten koordinaatiota / aktivaatiota (proprioseptiikka)
- Ohjaa alaraajaa kevyesti abduktioon ja ulkokiertoon
- Tuen mukana kuuma-/kylmäpaketti kuntoutumisen tehostamiseksi
- Helppo tarrakiinnitys ja oikean kompressiotason osoittavat nauhat
- Hengittävä ja miellyttävä materiaali

Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi	Koko	Puoli	Lantion ympärys
07480-1-9003-S	S	vasen	80-90 cm
07480-1-9003-M	M	vasen	90-100 cm
07480-1-9003-L	L	vasen	100-110 cm
07480-1-9003-XL	XL	vasen	110-120 cm
07480-1-9003-XXL	XXL	vasen	120-130 cm
07480-1-9003-XXXL	XXXL	vasen	> 130 cm
07480-2-9003-S	S	oikea	80-90 cm
07480-2-9003-M	M	oikea	90-100 cm
07480-2-9003-L	L	oikea	100-110 cm
07480-2-9003-XL	XL	oikea	110-120 cm
07480-2-9003-XXL	XXL	oikea	120-130 cm
07480-2-9003-XXXL	XXXL	oikea	> 130 cm



MEDIROYAL | NRX1005

NRX® Strap Kit

Valmiiksi leikattu nauhapaketti lonkan rotaation tueksi

Käyttöohjeet

- Lonkan lyhentyneet adduktorit (lähentäjälihakset)
- Lonkan ojennuksen ongelmat

Ominaisuuudet

- Nauhat leikattu valmiiksi
- Avustaa lonkan sisä- tai ulkorotaatiota
- Ylläpitää lonkan adduktoreiden dynaamista venytystä
- Tarjoaa kompressiota pakaralihaksille ja avustaa lonkan ojennusta
- Paketissa mukana tarranauhat, joilla tuki stabiloidaan
- Uudelleenkäytettävä
- Konepestävä

Koko- ja tilaustiedot

Yksi kokoluokka, puolieroton.

Tuotekoodi	Puoli	Koko
NRX1005	puolieroton	1 koko

Kaula

Olka • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset

Polvituet



Postoperatiivituet

- 95** T Scope Premier
Rebound Post-Op Knee
- 96** X-ROM Post-Op
Go Up Pro
- 97** Genufit 30A
- 98** Immok

Kulumapolvituet

- 99** Unloader One X
- 100** Genudyn OA
Ortho-A
- 101** Genufeel OA
- 102** OA Reaction Web

Ligamenttituet

- 103** Defiance III / Defiance
- 104** A22
- 105** Axiom-D Elite
- 106** Rebound PCL
- 107** M.4s PCL Dynamic
- 108** Pluspoint 4
- 109** Pluspoint Fast
- 110** ARX Liga X Wrap
NRX Liga X Wrap
- 111** Genufit 15A / 15
- 112** Playmaker Xpert

Kevyet tuet

- 113** Genufit 08
Genufit 08A
- 114** Genu-Hit
- 115** Genucare Air-X Open
- 116** JuzoFlex Genu 323
SRX Polvituki lumpioaukolla

Patellatuet

- 117** eLux Patella
- 118** Lateral J
NRX Patella Lux
- 119** NRX Patella Tendon Long
Kasseler Patellar Tendon Bandage



BREG | 08814

T Scope® Premier

Polven liikerataa rajoittava tuki portaattomalla pituussäädöllä

Käyttöaiheet

Postoperatiivinen tukeminen polvileikkauksen jälkeen, kun halutaan rajoittaa polvinivelen liikettä, polvivamman jälkeinen tuenta: ACL- ja CL-operaatioiden, meniskikorjausten, kondylimurtumien, Tibian osteotomian ja patellamurtumien jälkeen.

Ominaisuudet

- Portaaton pituussäätö
- Helppokäyttöinen, pikalukot helpottavat sovitusta
- Materiaalit: alumiini, muovi, foam ja nylon
- Fleksiosäätö -10°-120°, 10° porrastuksella
- Ekstensiosäätö -10°-30°, 10° porrastuksella

Koko- ja tilaustiedot

Tuote-koodi	Kuvaus	Puoli	Koko	Reiden ympärys
08814	T-Scope	puolieroton	Standard	< 77 cm
08815	T-Scope	puolieroton	XL	77-90 cm
00015	varapehmustesetti			
SPR	vaihtoremmit ja soljet			
73261	kevennyssetti			



ÖSSUR | B-8381

Rebound® Post-Op Knee

Postoperatiivinen polvituki oikeaan ja vasempaan jalkaan valmiiksi muotoiltuna

Käyttöaiheet

Postoperatiivinen hoito: polven nivelsidevammat, meniskivammat, patellajänteen vammat ja osteokondroosi. Sääriluun yläpinnan murtumat, kondyylimurtumat, nivelsidevammojen konservatiivinen hoito, sääriluun osteotomia.

Ominaisuudet

- Säädet mahdollista tehdä ilman työkaluja
- Saatavilla myös puolieroton malli
- Teleskooppikiskojen pituus säädettävissä 47-68 cm
- Värikoodit ja numerointi helpottavat tuen käyttöä
- Helppo- ja nopeakäyttöiset soljet

Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi	Puoli	Reiden ympärys
B-8381680	vasen	41-81 cm
B-8381580	oikea	41-81 cm
B-8381480	puolieroton	41-81 cm
B-8381082	vaihtopehmusteet	

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset



Koko- ja tilaustiedot

Sopii oikeaan ja vasempaan jalkaan.

Tuote-koodi	Koko	Kiskojen pituus
M24046	universaali	50–65 cm

ENOVIS | 11-2181-9

X-ROM Post-Op

Yhden koon postoperatiivinen polvituki teleskooppikiskoilla

Käyttöaiheet

Postoperatiivinen hoito: polven nivelside- ja meniskivammat, patellamurtumien jälkeen, kondyylimurtumat, nivelsidevammojen konservatiivinen hoito, sääriluun osteotomia

Ominaisuudet

- Erittäin kevyt ja tukeva
- Taipuisat kiskot muotoutuvat jalan mallin mukaiseksi ja korjaavat polven virheasentoja
- Kiskojen pituus ja pehmusteiden paikat säädettävissä yksilöllisesti
- 10° välein säädettävä ojennuksen ja koukistuksen rajoitus: ekstension säätö -10°–90°, fleksion säätö -10°–120°
- Pikalukitus tiettyyn kulmaan -10°–30°
- Säädöt mahdollista tehdä ilman työkaluja
- Varaosat: remmi- ja pehmustesetti

Koko- ja tilaustiedot

Yksi koko, sama tuki sopii oikeaan ja vasempaan jalkaan.

Tuotekoodi	Kuvaus	Puoli	Koko
11-2181-9	X-ROM Post-Op -poltituki	puolieroton	1 koko
25-7530	remmisetti, varaosa		
25-7531	pehmustesetti, varaosa		

ORTHOSERVICE | M24046

Go Up Pro

Teleskooppinen polvituki postoperatiiviseen käyttöön porrastetulla liikesäädöllä.

Käyttöaiheet

Postoperatiivinen hoito, joka vaatii ojennus-koukistus -suuntaista liikerajoitusta: nivelsiteiden korjausleikkaukset, sääriluun eteenpäin liukuminen, reisiluun distaalikolmanneksen murtumat, sääriluun proksimaalikolmanneksen murtumat, patellamurtumat, polven ojentajien jännevammat

Ominaisuudet

- Teleskooppiset ja kevyet alumiinikiskot nivelillä.
- Teleskooppisäätö helppo tehdä nappien avulla.
- Rungon "PUSH&SET" remmisäädöllä ja itsekiinnittyvä järjestelmä, metalliton nivelen säätö, kevyt ja intuitiivinen säätö: fleksio 0°–120° 10° välein, kstensio: -10°–60° 10° välein, mahdollisuus lukita nivel 0°–60° asentoihin 10° välein, irrotettavat ja pestävät kondyylipehmusteet
- Pehmusteet vähentävät tuen liikkumista ja suojaavat jalkaa suoralta kosketukselta kiskoihin; saumat ulkopuolella, leikattava paremman istuvuuden aikaansaamiseksi
- Väri harmaa



ORTHOSERVICE | MG1130A

GenuFIT 30A

Postoperatiivinen polvituki säädettävällä liikerajoituksella

Käyttöaiheet

Tason I ja II sivusidevammojen konservatiivinen hoito, uusien sivusidevammojen ehkäisy urheilussa, polven krooninen instabiliteetti, patellofemoraalinen artroosi, kulumasta johtuva instabiliteetti

Ominaisuudet

- Anatominen muotoilu ja ohut rakenne, tuen pituus 41 cm
- Hengittävä AirX-materiaali, polvitaipteen alueella pehmeä Soft-X-materiaali
- Helppo kiinnittää ja kiristää sopivaksi
- Helpposäätöinen nivel liikerajoittimilla: nivel on mahdollista lukita 0°, 15°, 30°, 60° tai 90° kulmaan

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään reiden ympärysmittan mukaan. Mitta otetaan 15 cm polvilumpion keskikohdan yläpuolelta.

Tuotekoodi	Koko	Reiden ympäryys
MG1130A-XS	XS	33–39 cm
MG1130A-S	S	39–45 cm
MG1130A-M	M	45–52 cm
MG1130A-L	L	52–58 cm
MG1130A-XL	XL	58–66 cm
MG1130A-XXL	XXL	66–75 cm

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset



ORTHOSERVICE | M810X

Immok

Immobilisoiva polvituki

Käyttöaiheet

Postoperatiivinen tai -traumaattinen polven immobilisointi 0° tai 20° kulmaan

Ominaisuudet

- Kaksinkertainen pehmeä materiaali, sisäpuolella frotee
- Mediaalinen, lateraalinen ja polven takana olevat kiskot voidaan muotoilla yksilöllisesti
- Avoin patellan kohta
- Pestävä

Koko- ja tilaustiedot

Neljä eri pituutta kahdella eri kulmalla.

Sama tuki sopii oikeaan ja vasempaan jalkaan.

Tuotekoodi	Polvikulma	Tuen pituus
M8104	0°	40 cm
M8105	0°	50 cm
M8106	0°	60 cm
M8107	0°	70 cm
M8104F	20°	40 cm
M8105F	20°	50 cm
M8106F	20°	60 cm
M8107F	20°	70 cm



ÖSSUR | UOX0XX871X

Unloader One® X

Huippulaadukas polviortoosi toispuoleiseen kulumaan

Käyttöaiheet

Kohtalainen tai vaikea polven toispuoleinen nivelrikko, degeneratiiviset nivelkierukan repeämät, muut polven tilat, joihin voi auttaa toispuoleinen kuormituksen kevennys

Ominaisuudet

- 3 pisteen kuormituksen kevennysjärjestelmä luo polviniveleen toispuoleisen kevennyksen
- Kevennä kuormitusta vain tarvittaessa, erityisesti polven ojennuksen aikana, ei aiheuta painetta polven sivulle esim. istumisen aikana
- Ohut ja kevyt runko tekee käytöstä miellyttävän
- Ihoa hirtämättömät pehmusteet ja rungon sileä sisäpinta vähentävät painepisteiden todennäköisyyttä
- Pohjehihna pohkeen paksuimmassa kohdassa pitää tuen paikallaan
- SmartDosing-säätönupeilla hihnojen kireyttä ja tuen määrää on helppo säätää
- Värikoodit ja Quick-Fit-soljet helpottavat käyttöä
- Nivelen kohdistusmerkki helpottaa tuen asianmukaista asemointia
- Säädettävissä ilman työkaluja
- Konepestävä

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään pohkeen ympärysmittan mukaan. Mitta otetaan 15 cm polvilumpion keskikohdan alapuolelta. Erikseen oikean ja vasemman jalan sekä mediaalisen ja lateraalisen kevennyksen tuet.

Unloader One X		Mediaalinen kevennys		Lateraalinen kevennys	
Koko	Pohkeen ympäryys	Vasen	Oikea	Vasen	Oikea
XS	25–31 cm	UOX0618711	UOX0518711	UOX0628711	UOX0528711
S	31–36 cm	UOX0618712	UOX0518712	UOX0628712	UOX0528712
M	36–43 cm	UOX0618713	UOX0518713	UOX0628713	UOX0528713
L	43–51 cm	UOX0618714	UOX0518714	UOX0628714	UOX0528714
XL	51–62 cm	UOX0618715	UOX0518715	UOX0628715	UOX0528715

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset



SPORLASTIC | 07788, 07789

Genudyn OA

Polvituki toispuoleiseen polvikulumaan

Käyttöaiheet

Kohtalainen toispuoleinen polvikuluma, varus/valgus-virheasento, kivun ja paineen vähentäminen polven toiselta nivelpinnalta

Ominaisuudet

- Molemminpuoliset kiskot antavat vahvan tuen
- Dynaaminen paineen keventäminen kuluneelta nivelpinnalta: kevennys aktivoituu polven suoristuessa ja vähenee polven koukistuessa, esim. istuessa tai kävelyn heilahdusvaiheessa
- Helppo säätää yksilöllisesti sopivaksi paineen säätimellä
- Nivelen liikerajaa mahdollista rajoittaa: ekstensio 0°, 20°, 30°, 40° ja fleksio 45°, 60°, 75°, 90°
- Tuen runkoa voi muotoilla yksilöllisten tarpeiden mukaisesti

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään reiden ympärysmittaan mukaan. Mitta otetaan 15 cm polvilumpion keskikohdan yläpuolelta. Eriksien oikea ja vasen jalka sekä mediaalinen ja lateraalinen kevennys.

Genudyn OA		Mediaalinen kevennys		Lateraalinen kevennys	
Koko	Reiden ympärys	Vasen	Oikea	Vasen	Oikea
XS	32–38 cm	07788-1-9000-XS	07788-2-9000-XS	07789-1-9000-XS	07789-2-9000-XS
S	38–44 cm	07788-1-9000-S	07788-2-9000-S	07789-1-9000-S	07789-2-9000-S
M	44–50 cm	07788-1-9000-M	07788-2-9000-M	07789-1-9000-M	07789-2-9000-M
L	50–56 cm	07788-1-9000-L	07788-2-9000-L	07789-1-9000-L	07789-2-9000-L
XL	56–63 cm	07788-1-9000-XL	07788-2-9000-XL	07789-1-9000-XL	07789-2-9000-XL
XXL	63–70 cm	07788-1-9000-XXL	07788-2-9000-XXL	07789-1-9000-XXL	07789-2-9000-XXL



ORTHOSERVICE | M91014

Ortho-A

Uusi Innovatiivinen ja kevyt polvituki toispuoleiseen polvikulumaan

Käyttöaiheet

Lievä tai kohtalainen toispuoleinen polvinivelartroosi, postoperatiivinen hoito vammoissa, jotka vaativat toispuoleista kuormituksen kevennystä: nivelruston vammat, menisci-vammat

Ominaisuudet

- Kevyt, joustava ja kestävä runko
- Toispuoleinen nivelkisko
- Nivelessä olevan säädön avulla nivelten asento ja kevennysvoima on helposti säädettävissä
- Pikakiinnitin, helppo pukea ja riisua
- Irrotettavat ja pestävät pehmusteet
- Ekstensio- ja fleksio-rajoitteet säädettävissä
- Väri harmaa

Koko- ja tilaustiedot

Yksi koko, vasen ja oikea puoli erikseen.

Tuotekoodi	Koko	Puoli
M91014	1 koko	vas/oik

ORTHOSERVICE | M24014

Genufeel OA

Dynaaminen polvituki toispuoleisen kuluman hoitoon.

Käyttöaiheet

Kohtalainen toispuoleinen polvikuluma, postoperatiivinen käyttö kierukka- tai rusto-operaation jälkeen

Ominaisuudet

- Patentoitu kiinnitys- ja kiristysmekanismi
- Kiinnitysmekanismi tekee tuesta helpon pukea ja riisua
- Polven sivuilla olevat kehät vähentävät painetta ja lisäävät käyttömukavuutta
- Kolmepisteinen tuenta keventää kuormitusta kipeältä nivelpinnalta
- Polven ollessa koukussa remmit löystyvät eikä tukea ole
- Polven suoristuessa remmit kiristyvät ja kuormitus kevenee kipeältä nivelpinnalta esim. kävellessä ennen jokaista askelta
- Hengittävä ja elastinen materiaali
- Edestävä avattava malli helpottaa pukemista
- Paine jakautuu polven alueelle tasaisesti
- Toisella puolella metallinen kisko, johon saadaan ojennus- tai koukistusrajoituspaloja
- Muovikiskot helpottavat tuen kohdistamista oikeaan kohtaan
- Velcro -remmisäätö
- Väri harmaa

Koko- ja tilaustiedot

Koko määräytyy reiden ympärysmittan mukaan. Mitta otetaan 15 cm polvilumpion keskikohdan yläpuolelta. Oikea ja vasen. Tuen korkeus 40 cm.

Tuotekoodi	Koko	Puoli	Reiden ympärys
M24014R-XS	XS	vasen	33-39 cm
M24014R-S	S	vasen	39-45 cm
M24014R-M	M	vasen	45-52 cm
M24014R-L	L	vasen	52-58 cm
M24014R-XL	XL	vasen	58-66 cm
M24014R-XXL	XXL	vasen	66-75 cm
M24014L-XS	XS	oikea	33-39 cm
M24014L-S	S	oikea	39-45 cm
M24014L-M	M	oikea	45-52 cm
M24014L-L	L	oikea	52-58 cm
M24014L-XL	XL	oikea	58-66 cm
M24014L-XXL	XXL	oikea	66-75 cm



Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset



ENOVIS | 82-7426, 82-7427

OA Reaction Web

Polvituki lievän tai keskivaikean toispuoleisen nivelrikon hoitoon

Käyttöaiheet

Lievä tai keskivaikea toispuoleinen kuluma

Ominaisuudet

- Patentoitu silikonirakenne stabiloi ja keventää polvilumpiota
- Alumiininivelessä säädettävä varus/valgus-kuormitus, 6° säätömahdollisuus
- Ohut ja joustava, miellyttävä käyttää vaatteiden alla
- Sama tuki sopii oikeaan ja vasempaan jalkaan, oikean jalan mediaalikevennys ja vasemman jalan lateraalikevennys voidaan hoitaa samalla tuella

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään reiden ja pohkeen ympärysmittojen mukaan. Reisimitta otetaan 15 cm polvilumpion keskikohdan yläpuolelta ja pohjemitta pohkeen paksuimmasta kohdasta. Kaksi eri mallia riippuen jalasta ja kevennystä vaativasta nivelpinnasta.

Vasen mediaalikevennys / Oikea lateraalikevennys			
Tuotekoodi	Koko	Pohkeen ympäryys	Reiden ympäryys
82-7427-1	XS	< 34 cm	33–39 cm
82-7427-2	S	35–36 cm	39–47 cm
82-7427-3	M	37–38 cm	47–53 cm
82-7427-4	L	39–41 cm	53–60 cm
82-7427-5	XL	42–44 cm	60–67 cm
82-7427-6	XXL	45–46 cm	67–75 cm
82-7427-7	XXXL	> 46 cm	75–81 cm

Oikea mediaalikevennys / Vasen lateraalikevennys			
Tuotekoodi	Koko	Pohkeen ympäryys	Reiden ympäryys
82-7426-1	XS	< 34 cm	33–39 cm
82-7426-2	S	35–36 cm	39–47 cm
82-7426-3	M	37–38 cm	47–53 cm
82-7426-4	L	39–41 cm	53–60 cm
82-7426-5	XL	42–44 cm	60–67 cm
82-7426-6	XXL	45–46 cm	67–75 cm
82-7426-7	XXXL	> 46 cm	75–81 cm

ENOVIS | 11-744X

Defiance® III / Defiance®

Yksilöllisesti valmistettu 4-pistepolviligamenttiortoosi

Käyttöaiheet

ACL-, PCL-, MCL- ja LCL-instabiliteetti, kontaktiurheiluun vamman jälkeiseen tuentaan tai uuden vamman ennaltaehkäisyyn

Ominaisuudet

- Erittäin kevyt ja vahva hiilikuituinen tuki
- Valmistetaan yksilöllisten mittojen mukaan: mitta otetaan CCMI Mark III -mitanottolaitteen tai kipsivalun mukaan
- Defiance III eroaa Defiance-ortoosista sen anatomisesti muotoillusta reiden sisäsivun kiskosta: lisää käyttömukavuutta ja helpottaa ortoosien bilateraalista käyttöä
- Tuen saa dynaamisella FourcePoint-nivelellä, perinteisemmällä Standard-nivelellä, lukittavalla Drop-lock-nivelellä tai OA-nivelellä
- FourcePoint-nivelessä on dynaaminen polysentrinen nivel, joka vaimentaa asteittain lisääntyvästi ekstensioiskua viimeisen 25° polven ojennuksen aikana. Samalla se työntää tibiaa taaksepäin suojaten ja korvaten ACL-ligamentin tehtävää
- Standard-nivelessä on polysentrinen nivel, joka seuraa polven normaalia liikettä. Niveltä käytetään ACL/PCL -yhdistelmävammoissa ja MCL- tai LCL-instabiliteetissa
- Drop-lock nivel on tehty quadriceps-heikkouteen esim. seisomisen helpottamiseen postpoliosydrroomassa
- OA-nivelellä pystytään keventämään painetta toispuoleisessa polvikulmassa
- Fleksiorajoin: 45°, 60°, 75°, 90° ja ekstensiorajoin: 0°, 10°, 20°, 30°, 40° (asennettuna 10°)
- Omat ACL, PCL ja CI (Combined Injury) -hihnarakenteet
- Saatavana lyhyellä pohjekiskolla, jolloin voidaan käyttää myös laskettelukenkiä tai motocross-saapasta
- Saatavana nahkavuorilla ja -pehmusteilla
- Kääntyvät D-renkaat, jotka seuraavat jalan liikkeitä
- Useita väri- ja grafiikkavaihtoehtoja

Koko- ja tilaustiedot

*Reiden ympärys mitataan 15 cm polven keskikohdan yläpuolelta.

*Pohkeen ympärys mitataan 15 cm polven keskikohdan alapuolelta.

Koko	Reiden ympärys*	Pohkeen ympärys*
Minimi	31,8 cm	26 cm
Maksimi	97 cm	66,5 cm



Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset

Polvituet
Ligamenttituet



ENOVIS | 11-T7622-2 , 11-T7623-2

A22®

Kevyt ja tukeva yksilöllinen polvituki

Käyttöaiheet

Polven ligamenttivammat, uusien vammojen ennaltaehkäisy urheillessa

Ominaisuudet

- Uniikki titaanirunko: ohut ja kevyt, mutta hyvin tukeva
- Fourcepoint-nivel suojaa eturistisidettä (ACL): lyhentää aikaa, jonka polvi on täydessä ekstensiossa ja lisää sääriluuhun kohdistuvaa taaksepäin suuntautuvaa painetta, estäen sääriluuta liikkumasta eteenpäin
- Antibakteerinen materiaali neutraloi hajuja ja lisää käyttömukavuutta
- Kondyylipehmustekennot vaimentavat iskuja sekä parantavat istuvuutta ja vakautta
- Vaihdettavat hihnat
- Soveltuu erityisen hyvin urheiluun

Tilaustiedot

Tuki valmistetaan aina yksilöllisten mittojen mukaan. Erikseen oikea ja vasen puoli.

BREG | PK528, PK523

Axiom-D Elite

Dynaaminen polvituki etu- ja takaristisidevammoihin

Käyttöaiheet

Eturistisidevamma ACL, takaristisidevamma PCL, yhdistelmävamma ACL/CL, yhdistelmävamma PCL/CL

Ominaisuudet

- Uniikki ja patentoitu toimintamekanismi: säären yläosan remmin liikkuva jousimekanismi antaa sääreen kohdistuvan dynaamisen voiman polvikulman ja vamman mukaan. Voima välittyy etureiden ja takareiden lihastyöstä jousimekanismiin, joka antaa sääreen eteen tai taakse työntävän voiman vammaan sopien.
- Vastustaa säären siirtymää (translaatio)
- Tukeva alumiinirunko
- Kevyt, istuva, ihonmyönteinen ja helposti muotoiltavissa
- Tarrakiinnitys, jossa pikaklipsit
- Vaihdettaavat remmit ja pehmusteet
- Versiot vakioasentoinen Standard ja urheilullinen Athletic
- Saatavissa myös yksilöllisillä mitoilla

Koko- ja tilaustiedot

* Reiden ympärys mitataan 15 cm polven keskikohdan yläpuolelta.

** Pohkeen ympärys mitataan 15 cm polven keskikohdan alapuolelta.

Tärkeää sovittaessa
tai pukiessa:

ACL-vamma

Kiristä säärempi
polvi 90° fleksiossa.

PCL-vamma

Kiristä säärempi
polvi 0° fleksiossa.

ACL/PCL-yhdistelmävamma

Kiristä säärempi
polvi 45° fleksiossa.

Puoli / Koko	Reiden ympärys*	Standard Pohkeen ympärys**	Standard Tuotekoodi	Athletic Pohkeen ympärys**	Athletic Tuotekoodi
Vasen XS	34–41 cm	32–36 cm	PK528101	28–32 cm	PK523101
Vasen S	41–48 cm	36–39 cm	PK528103	32–36 cm	PK523103
Vasen M	48–55 cm	39–43 cm	PK528105	36–39 cm	PK523105
Vasen L	55–62 cm	43–47 cm	PK528107	39–43 cm	PK523107
Vasen XL	62–69 cm	47–51 cm	PK528109	43–47 cm	PK523109
Vasen XXL	69–75 cm	51–53 cm	PK528111	47–51 cm	PK523111
Vasen XXXL	75–89 cm	55–58 cm	PK528113	51–53 cm	PK523113

Puoli / Koko	Reiden ympärys*	Standard Pohkeen ympärys**	Standard Tuotekoodi	Athletic Pohkeen ympärys**	Athletic Tuotekoodi
Oikea XS	34–41 cm	32–36 cm	PK528201	28–32 cm	PK523201
Oikea S	41–48 cm	36–39 cm	PK528203	32–36 cm	PK523203
Oikea M	48–55 cm	39–43 cm	PK528205	36–39 cm	PK523205
Oikea L	55–62 cm	43–47 cm	PK528207	39–43 cm	PK523207
Oikea XL	62–69 cm	47–51 cm	PK528209	43–47 cm	PK523209
Oikea XXL	69–75 cm	51–53 cm	PK528211	47–51 cm	PK523211
Oikea XXXL	75–89 cm	55–58 cm	PK528213	51–53 cm	PK523213

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset



ÖSSUR | B-124501XX

Rebound PCL

Rebound PCL on dynaaminen polven takaristisiteen tuki

Käyttöaiheet

Takaristisiteen (PCL) vammojen hoito, mukaan lukien rekonstruktio tai toiminnallinen ei-kirurginen hoito. Kohdistaa fysiologisesti oikean dynaamisen voiman takaristisiteeseen kuntoutumisen aikana.

Ominaisuudet

- DTS-järjestelmä (Dynamic Tension System) lisää sääriluuhun kohdistuvaa kuormitusta polven fleksion aikana, joka saa aikaan anteriorisen vetävän voiman, joka tarvitaan paranevan takaristisiteen kuormituksen vähentämiseksi ja paranemisen mahdollistamiseksi
- Kolme vaihtoehtoa, joilla säädetään vakioitua, biokemiallisesti oikeaa tibian posteriorista kuormitusta säätönappien avulla
- Tibian posteriorisen kuormituksen uudelleen säätäminen on mahdollista esim. turvotuksen yhteydessä
- Kevyt ortoosi, jonka silikoninen Sensil®-pohjepehmuste ja säämiskäinen reisi-pehmuste pitävät ortoosin paikoillaan ja takaavat käyttömukavuuden
- Mittojen mukaan valmistettu takaosan runko istuu paikallaan ja tukee parhaalla mahdollisella tavalla
- Avoin etuosa helpottaa paikoilleen asettamista ja poistamista
- Saatavissa myös yksilöllisillä mitoilla

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään kolmella mitalla:

M/L-mitta* on polvinivelen leveysmitta.

Pohkeen ympärys** mitataan 15 cm polven keskikohdan alapuolelta.

Reiden ympärys*** mitataan 15 cm polven keskikohdan yläpuolelta.

Tuotekoodi Vasen	Tuotekoodi Oikea	Koko	M/L-mitta*	Pohkeen ympärys**	Reiden ympärys***
B-124501161	B-124501158	S	8,9–10,2 cm	29–34,5 cm	42–45 cm
B-124501162	B-124501159	M	10,2–11,4 cm	34,5–38 cm	45–51 cm
B-124501163	B-124501160	L	11,4–12,7 cm	38–42 cm	51–58,5 cm



MEDI | G.081.X01

M.4s PCL Dynamic

Polvituki takaristisiteen (PCL) optimaaliseen tuentaan vamman tai leikkauksen jälkeen

Käyttöaiheet

Konservatiivinen hoito takaristisidevamman (PCL) jälkeen, leikkauksen jälkeinen hoito takaristisidevamman jälkeen

Ominaisuudet

- Tukee säären oikeaan asentoon koko polven liikkeen ajan korvaten takaristisiteen tehtävää: takaristiside saa parantua rauhassa, polven yli liikkuvuus ja sitä kautta kulumariski saadaan poistettua
- Tuen vahva rakenne antaa hyvän sivusuuntaisen tuen polvelle
- Ekstensio- ja fleksiosäädöillä (ojennus ja koukistus) polven vaurioituneet rakenteet saadaan suojattua vamman kannalta vahingollisilta nivelkulmilta
- Patentoitu physioglide-nivel, joka jäljittelee tarkasti polvinivelen oikeaa pyörivän ja liukuvan liikkeen yhdistelmää
- Ekstensorajoitukset (ojennus): 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- Fleksiorajoitukset (koukistus): 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Immobilointi (jäykistys): 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
- Väri musta

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään reiden ympärysmittalla, 15 cm polven keskikohdan yläpuolelta.

Tuotekoodi Vasen	Tuotekoodi Oikea	Koko	Reiden ympäry
G.081.201	G.081.301	XS	31–37 cm
G.081.202	G.081.302	S	37–45 cm
G.081.203	G.081.303	M	45–51 cm
G.081.204	G.081.304	L	51–57 cm
G.081.205	G.081.305	XL	57–63 cm
G.081.206	G.081.306	XXL	63–69 cm

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset



ORTHOSERVICE | M33040

Pluspoint 4

Kovaraaminen eturisti- ja sivusidetuki

Käyttöaiheet

Polven eturistiside- (ACL) ja sivusiderepeämien (MCL, LCL) konservatiivinen hoito ja kuntoutus, polven instabiliteetti, kompleksisesta traumasta tai kulumamuutoksista johtuva instabiliteetti, pre- ja postoperatiivinen kuntoutus edellä mainittuihin vammoihin, nivelsiteiden suojaus urheillessa

Ominaisuudet

- Anatominen muotoilu
- Innovatiivinen ja kevyt, mutta tukeva raami, joka istuu jalkaan erinomaisesti
- Kiinnitysremmeissä jalan mukaisesti liikkuvat kiinnityslenkit parantavat remmien istuvuutta
- Kaksiosainen tarrakiinnitys
- Remmien pehmusteet parantavat käyttömukavuutta
- Niveleen on helppo asentaa rajoituspalat ilman työkaluja: ekstensorajoitukset 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, fleksiorajoitukset 45°, 60°, 75°, 90° ja immobilisaatio 0°, 10°, 20°, 30°
- Anatomisesti muotoiltu mediaalikondyylipehmuste istuvuuden varmistamiseksi
- Kahdet eri paksuiset vaihtokondyylipehmusteet optimaalisen tukevuuden saavuttamiseksi (esim. turvotuksesta johtuvat muutokset)
- Vaihdettavissa olevat pehmusteet, ihoystävällinen pitävä pinnoite

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään reiden ympärysmittan perusteella. Mitta otetaan 15 cm polvilumpion keskikohdan yläpuolelta. Erikseen oikea ja vasen jalka.

Tuotekoodi	Koko	Puoli	Reiden ympäryys
M33040L-S	S	vasen	39-47 cm
M33040L-M	M	vasen	47-53 cm
M33040L-L	L	vasen	53-60 cm
M33040L-XL	XL	vasen	60-67 cm
M33040L-XXL	XXL	vasen	67-75 cm
M33040R-S	S	oikea	39-47 cm
M33040R-M	M	oikea	47-53 cm
M33040R-L	L	oikea	53-60 cm
M33040R-XL	XL	oikea	60-67 cm
M33040R-XXL	XXL	oikea	67-75 cm



ORTHOSERVICE | M22040

Pluspoint Fast

Helppokäyttöinen eturisti- ja sivusidetuki

Käyttöaiheet

Polven eturistiside- (ACL) ja sivusiderepämien (MCL, LCL) konservatiivinen hoito ja kuntoutus, polven instabiliteetti eli väljyys/ löysyys, kulumasta tai traumasta johtuva polven instabiliteetti, pre-/ postoperatiivinen kuntoutus, polven nivelsiteiden suojaaminen urheillessa

Ominaisuudet

- Kevyt ja kestävä rakenne
- Anatominen muotoilu parantaa istuvuutta
- Tukea ei tarvitse pukea jalan kautta, sillä alumiinituet ovat etupuoolella
- Helppokäyttöiset lukitussoljet ilman tarrakiinnitysjärjestelmää
- Remmien pehmusteet hyvin käyttäjäystävälliset
- Lisäpaksuus pohkeen kohdalla optimaalisen mukavuuden takaamiseksi
- Mediaalikondyylipehmuste anatomisesti muotoiltu istuvuuden varmistamiseksi
- Kahdet eri paksuiset vaihtokondyylipehmusteet optimaalisen tukevuden saamiseksi (esim. turvotuksesta johtuvat muutokset)
- Tuen pituus 40 cm
- Rajoituspalat helppo asentaa ilman työkaluja
- Ekstensorajoitukset (ojennus): 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
- Fleksiorajoitukset (koukistus): 45°, 60°, 75° ja 90°
- Immobilisaatio (lukitus): 0°, 10°, 20°, 30°

Koko- ja tilaustiedot

Koko määrittäyty reiden ympärysmittan mukaan. Mitta otetaan 15 cm polvilumpion keskikohdan yläpuolelta. Oikea ja vasen.

Tuotekoodi	Koko	Puoli	Reiden ympäryys
M22040L-S	S	vasen	39-47 cm
M22040L-M	M	vasen	47-53 cm
M22040L-L	L	vasen	53-60 cm
M22040L-XL	XL	vasen	60-67 cm
M22040L-XXL	XXL	vasen	67-75 cm
M22040R-S	S	oikea	39-47 cm
M22040R-M	M	oikea	47-53 cm
M22040R-L	L	oikea	53-60 cm
M22040R-XL	XL	oikea	60-67 cm
M22040R-XXL	XXL	oikea	67-75 cm

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset



MEDIROYAL | ARX314

ARX® Liga X Wrap

Yliojennusta estävä polvituki

Käyttöaiheet

Lievä tai kohtalainen sivusidevamma, lievät ACL-vammat, polven yliojennus, hemi-potilaan polven tuenta, lievä polvikuluma

Ominaisuudet

- Alumiiniset sivukiskot antavat hyvän sivutuen
- Edestä avattava malli
- Takaristikko ehkäisee yliojennusta
- Tuki on helppo pukea ja säätää sopivaksi
- Hengittävän AirX-materiaalin ansiosta tukea voi käyttää pitkään
- Sivukiskot voidaan helposti muotoilla jalan anatomian mukaisesti
- Kiskojen pehmustetut nivelet lisäävät käyttömukavuutta

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään polven ympärysmittan mukaan. Sama tuki sopii oikeaan ja vasempaan jalkaan.

Tuotekoodi	Koko	Polven ympäryys
ARX314-XS	XS	29-32 cm
ARX314-S	S	32-35 cm
ARX314-M	M	35-38 cm
ARX314-L	L	38-42 cm
ARX314-XL	XL	42-46 cm
ARX314-XXL	XXL	46-50 cm
ARX314-XXXL	XXXL	50-54 cm



MEDIROYAL | NRX414

NRX® Liga X Wrap

Yliojennusta estävä polvituki

Käyttöaiheet

Kuten ARX314 (yllä)

Ominaisuudet

- Tuote on sama kuin ARX Liga X Wrap, erona tuotteen materiaali
- NRX-materiaali on lämmittävä, kulutuskestävä, nivelen liikettä joustavasti mukaileva materiaali
- NRX-materiaali mahdollistaa voimakkaan kompression
- Erityisesti liikuntaan ja urheiluun suunniteltu malli, joka sopii myös niveltulehduksista kärsiville.

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään polven ympärysmittan mukaan. Sama tuki sopii oikeaan ja vasempaan jalkaan.

Tuotekoodi	Koko	Polven ympäryys
NRX314-XS	XS	29-32 cm
NRX314-S	S	32-35 cm
NRX314-M	M	35-38 cm
NRX314-L	L	38-42 cm
NRX314-XL	XL	42-46 cm
NRX314-XXL	XXL	46-50 cm
NRX314-XXXL	XXXL	50-54 cm

ORTHOSERVICE | MG1115A, MG1115

Genufit 15A /15

Miellyttävästä AirX-materiaalista valmistettu sivukiskollinen polvituki

Käyttöaiheet

Polven sivusidevammat, uusien sivusidevammojen ehkäisy urheillessa, lievien polvikulumien kivunhoito, lievä krooninen medio-lateraalinen instabiliteetti

Ominaisuudet

- Hengittävä AirX-materiaali
- Alumiinista valmistetut polysentriset saranakiskot molemmilla sivuilla
- Edestä avattava ja umpimainen malli, tuen pituus 34 cm
- Kaksiosainen kiinnitysmekanismi helpottaa pukemista
- Lisäkiristys tarranauhoilla

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään reiden ympärysmittaan mukaan, mitta otetaan 15 cm polven keskikohdan yläpuolelta.

Edestä avattava Tuotekoodi	Umpinainen Tuotekoodi	Koko	Reiden ympäryys
MG1115A-XS	MG1115-XS	XS	33–39 cm
MG1115A-S	MG1115-S	S	39–45 cm
MG1115A-M	MG1115-M	M	45–52 cm
MG1115A-L	MG1115-L	L	52–58 cm
MG1115A-XL	MG1115-XL	XL	58–66 cm
MG1115A-XXL	MG1115-XXL	XXL	66–75 cm



Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset



ENOVIS | 82-0022-X, 82-0023-X

Playmaker Xpert

Uusi sivukiskollinen polvituki Drytex-materiaalista

Käyttöaiheet

Lievät tai kohtalaiset polven sivusidevammat, lievät polvikulumat, krooninen medio-lateraalinen instabiliteetti, kuntoutuksen tukeminen. Umpinaista mallia käytetään myös kierukkavammoissa ja polvilumpion tuennassa.

Ominaisuudet

- Kaksoisnivelelliset irroitettavat alumiinikiskot sivuilla
- Kiskot muotoiltavissa potilaan mukaisesti
- Drytex-materiaali on hengittävä ja antaa hyvän puristeen
- Kaksi mallia: umpinainen ja edestä avattava
- Umpinaisessa mallissa polvilumpiota tukeva tukirengas
- Tuen pituus 33 cm

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään pohkeen ja reiden ympärysmittan mukaan. Reiden ympäryys mitataan 15 cm polvilumpion keskikohdan yläpuolelta ja pohkeen ympäryys pohkeen paksuimmasta kohdasta.

Umpinainen Tuotekoodi	Edestä avattava Tuotekoodi	Koko	Pohkeen ympäryys	Reiden ympäryys
82-0022-1	82-0023-1	XS	< 34 cm	33–39 cm
82-0022-2	82-0023-2	S	35–36 cm	39–47 cm
82-0022-3	82-0023-3	M	37–38 cm	47–53 cm
82-0022-4	82-0023-4	L	39–41 cm	53–60 cm
82-0022-5	82-0023-5	XL	42–44 cm	60–67 cm
82-0022-6	82-0023-6	XXL	45–46 cm	67–75 cm
82-0022-7	82-0023-7	XXXL	> 46 cm	75–81 cm

ORTHOSERVICE | MG1108

Genufit 08

Putkimallinen polvituki spiraalijousilla ja patella-tuella

Käyttöaiheet

Lievä sivusuuntainen instabiliteetti, lievät sivusidevammat, vamman jälkeinen kuntoutus ja uuden vamman ennaltaehkäisy, lievä patellan instabiliteetti, lievä polviartroosi

Ominaisuudet

- Hengittävä ja ihoystävällinen AirX-materiaali
- Anatominen muotoilu takaa hyvän istuvuuden
- Kireys säädettävissä tarranauhoilla
- Molemmilla sivuilla spiraalijouset antamassa lisätukea
- Tuen pituus 34 cm

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään reiden ympärysmittan mukaan, 15 cm polven keskikohdan yläpuolelta.

Tuotekoodi	Koko	Reiden ympäryys
MG1108-XS	XS	33–39 cm
MG1108-S	S	39–45 cm
MG1108-M	M	45–52 cm
MG1108-L	L	52–58 cm
MG1108-XL	XL	58–66 cm
MG1108-XXL	XXL	66–75 cm



ORTHOSERVICE | MG1108A

Genufit 08A

Edestä avattava laadukas polvituki urheilukäyttöön

Käyttöaiheet

Polven lievät venähdysvammat, lievä polvikuluma, lievät kierukkavammat, rasituksesta johtuva polvikipu, lievät polven etuosan ja polvilumpion ongelmat

Ominaisuudet

- Hengittävä ja ihoystävällinen AirX-materiaali
- Avattava malli mahdollistaa kireyden säädön ja takaa hyvän istuvuuden
- Spiraalinmuotoiset sivutuet, jotka muotoutuvat jalan muotoon ja antavat lisätukea
- Tuki antaa lämpöä ja puristetta parantaen asentotuntoa
- Polvitaipen kangas on saumaton, materiaali joustava ja miellyttävä

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään reiden ympärysmittan mukaan. Sama tuki sopii oikeaan ja vasempaan jalkaan.

Tuotekoodi	Koko	Reiden ympäryys
MG1108A-XS	XS	33–39 cm
MG1108A-S	S	39–45 cm
MG1108A-M	M	45–52 cm
MG1108A-L	L	52–58 cm
MG1108A-XL	XL	58–66 cm
MG1108A-XXL	XXL	66–75 cm



Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset



SPORLASTIC | 07081

Genu-Hit®

Polvituki silikonirenkaalla

Käyttöaiheet

Nivelside- ja kierukkavammojen jälkikuntoutus, uusien vammojen ennaltaehkäisy, polvilumpion kondromalasia, polvilumpion yli liikkuvuus, Bakerin kysta, nivelrikko ja niveltulehdus, reuma

Ominaisuudet

- Muotoon ommeltu, antaa polvinivelelle sopivan kompression
- Sivuilla olevat spiraalituet pitävät tuen ryhdikkäänä
- Kudontatekniikka antaa hierovan vaikutuksen parantaen polven alueen aineenvaihduntaa
- Silikonirengas polvilumpion ympärillä tukee polvilumpiota ja helpottaa siihen kohdistuvan paineen tuntua
- Väri harmaa, saatavana myös musta ja beige

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään pohkeen ja reiden ympärysmittan mukaan. Mitat otetaan 14 cm polven keskikohdan ala- ja yläpuolelta.

Lisäksi on saatavilla lasten malli, tuotekoodi 87081.

Pohkeen ympäryys 23–26 cm ja reiden ympäryys 29–33 cm.

Tuotekoodi	Puoli	Koko	Pohkeen ympäryys	Reiden ympäryys
07081-0-9188-1	puolieroton	1	< 28 cm	< 38 cm
07081-0-9188-2	puolieroton	2	28-31 cm	38-41 cm
07081-0-9188-3	puolieroton	3	31-34 cm	41-44 cm
07081-0-9188-4	puolieroton	4	34-37 cm	44-47 cm
07081-0-9188-5	puolieroton	5	37-40 cm	47-50 cm
07081-0-9188-6	puolieroton	6	40-43 cm	50-53 cm
07081-0-9188-7	puolieroton	7	43-46 cm	53-56 cm
07081-0-9188-8	puolieroton	8	46-50 cm	56-60 cm
07081-0-9188-9	puolieroton	9	50-54 cm	60-64 cm



ORTHOCARE | 6735

Genucare Air-X Open


Edestä avettava napakka polvituki

Käyttöaiheet

Polven kuluma ja nivelrikko, rasituksesta johtuva polvikipu, vamman jälkeinen kuntoutusvaihe, polven sivusiteiden ja kierukoiden lievät venähdykset, uusien polvivammojen ennaltaehkäisy urheillessa, krooniset leikkauksen ja vamman jälkeiset tulehdukset ja kiputilat, yllirasittunut polvi

Ominaisuudet

- Helposti puettava, hengittävä Air-X-materiaali ja jämäkkä malli
- Antaa lämpövaikutuksen
- Parantaa asentotuntoa parantaen polven kontrollia
- Laaja tarrapinta mahdollistaa yksilöllisen säädön
- Irrotettavat lisäremmit reidessä ja pohkeessa mahdollistavat tuen lisäämisen

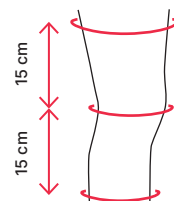

Koko- ja tilaustiedot

Sama tuki sopii oikeaan ja vasempaan jalkaan. Koko määritetään reiden, polven ja pohkeen ympärysmittojen mukaan. Mitat otetaan 15 cm polvilumpion keskikohdan yläpuolelta, polven kohdalta ja 15 cm lumpion keskikohdan alapuolelta.

Tuotekoodi	Koko	Pohkeen ympäryys	Polven ympäryys	Reiden ympäryys
6735-S	S	31–34 cm	30–33 cm	43–46 cm
6735-M	M	34–37 cm	33–36 cm	46–49 cm
6735-L	L	37–40 cm	36–39 cm	49–52 cm
6735-XL	XL	40–43 cm	39–42 cm	52–56 cm
6735-XXL	XXL	43–46 cm	42–45 cm	56–58 cm

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset



JUZO | 3222

JuzoFlex Genu 323

Polvituki kevyillä sivuvahvikkeilla ja lumpioaukolla

Käyttöaiheet

Nivelside- ja kierukkavammojen jälkikuntoutus, polven alkava / lievä kuluma, tuenta vamman akuuttivaiheen jälkeisessä kuntoutuksessa, uusien vammojen ennaltaehkäisy, polven rasitusperäiset vaivat, polven turvotus, niveltulehdus

Ominaisuudet

- Valmistettu vahvasta ja kestävästä laakakudotusta kankaasta
- Anatomisesti muotoiltu, aukko polvilumpiolle
- Polvituen sivuilla on kevyet spiraalivahvikkeet luomaan kevyttä sivuttaistukea ja estämään tuen rullaantumisen
- Erityinen neulos polvitaiteen alueella parantaa tuen istuvuutta polven koukistuksen aikana
- Tuessa on hyvä kompressio, joka luo tukea ja parantaa polven asentotuntoa. Parantuneen asentotunnon avulla polvea tukeva lihaksisto reagoi nopeammin ja oikein eri tilanteissa.
- Väri beige

Koko- ja tilaustiedot

Koon määrittämiseksi ota ympärysmittat alla olevan mittataulukon osoittamista kohdista. Koko määrittyy pohkeen, polven ja reiden ympärysmittan perusteella. Vertaa saatuja mittoja taulukkoon ja valitse mittojen perusteella sopivin koko.

Reiden ympärysmitta: 15 cm polvilumpion keskikohdan yläpuolelta.

Pohkeen ympärysmitta: 12 cm polvilumpion keskikohdan alapuolelta.

	1/XS	2/S	3/M	4/L	5/XL	6/XXL
15 cm	38–41 cm	41–44	44–47	47–50	50–53	53–56
12 cm	31–34 cm	34–37	37–40	40–43	43–46	46–49
	28–31 cm	31–34	34–37	37–40	40–43	43–46



MEDIROYAL | SRX851

SRX® Polvituki lumpioaukolla

Polvituki liikuntaan ja urheiluun

Käyttöaiheet

Polven alueen paikalliset tulehdukset ja ylrasitusvammat, turvotus, lievä polven epävakaumus, ajoittainen polvikipu, aktiivisen ja liikunnallisen elämän tukeminen

Ominaisuudet

- Laadukas SRX-materiaali: elastinen, napakka, kevyt ja lämmittävä
- Sisäpinnan Neptune-materiaali pitää ihon kuivana lisäten käyttömukavuutta
- Avoin polvilumpion kohta vähentää lumpioon kohdistuvaa painetta ja antaa kevyttä tukea lumbiolle
- Tuen lämpövaikutus: parantaa nivelen verenkiertoa ja lihasten reagoitakykyä, vähentää tulehdusreaktioita ja lievittää kipua mahdollistaen liikunnan lisäämisen
- Tuen korkeus 25 cm

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään polven keskikohdan ympärysmittan perusteella. Sama tuki sopii molempiin jalkoihin.

Tuotekoodi	Koko	Reiden ympäryys
SRX851-XS	XS	29–32 cm
SRX851-S	S	32–35 cm
SRX851-M	M	35–38 cm
SRX851-L	L	38–42 cm
SRX851-XL	XL	42–46 cm
SRX851-XXL	XXL	46–50 cm



EMBREIS | E6711XX

eLux Patella

Sukkamallinen patellatuki lumpion sijoiltaanmenoon. Myös lasten koot. Saatavana myös kietaistavana mallina (E6721XX) ja yksilöllisillä mitoilla.

Käyttöaiheet

Polvilumpion sijoiltaanmeno, patellofemoraalinen kipu, polvilumpion postoperatiivinen hoito

Ominaisuudet

- Stabiloii patellaa
- J-mallinen mansetti tukee lumpiota
- Kiristysnauhat mahdollistavat säädön
- Helppokäyttöinen ja mukavan tuntuinen
- Materiaali neopreenin ja lycran yhdistelmä

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään reiden ja pohkeen ympäryksmitalla. Mitat otetaan 15 cm polvilumpion keskikohdan ylä- ja alapuolelta. Erikseen oikea ja vasen puoli.

Tuen pituus kokoluokissa XXS ja XS on 24 cm (lapsille), isommissa kokoluokissa 29 cm.

Tuotekoodi	Puoli	Koko	Pohkeen ympärys	Reiden ympärys
E671121	oikea	XXS	26–29 cm	32–35 cm
E671122	oikea	XS	28–32 cm	34–39 cm
E671123	oikea	S	31–34 cm	38–42 cm
E671125	oikea	M	33–37 cm	41–45 cm
E671127	oikea	L	36–40 cm	44–49 cm
E671128	oikea	XL	39–44 cm	48–53 cm
E671129	oikea	XXL	43–48 cm	52–58 cm
E671129-1	oikea	XXXL	46–51 cm	57–63 cm
E671111	vasen	XXS	26–29 cm	32–35 cm
E671112	vasen	XS	28–32 cm	34–39 cm
E671113	vasen	S	31–34 cm	38–42 cm
E671115	vasen	M	33–37 cm	41–45 cm
E671117	vasen	L	36–40 cm	44–49 cm
E671118	vasen	XL	39–44 cm	48–53 cm
E671119	vasen	XXL	43–48 cm	52–58 cm
E671119-1	vasen	XXXL	46–51 cm	57–63 cm

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset

Polvituet Patellatuet



Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään reiden ympäryksen mukaan. Mitta otetaan 15 cm polven keskikohdan yläpuolelta. Vasen ja oikea erikseen.

ENOVIS | 81-0659, 81-0660

Lateral J

Polvilumpiotuki J-mallisella tukipelotilla, saatavana myös sivukiskollisena versiona (11-077x-x)

Käyttöaiheet

Polvilumpion sijoiltaanmeno ja löysyys, polvilumpion lateralisaatio

Ominaisuudet

- Polvituen J-mallinen tukipelotti ja Y-lisäremmit auttavat lumpion paikallaan pysymistä ja estävät kipua
- Hengittävä Drytex tekee tuesta miellyttävän käyttää, saatavana myös neopreenisenä
- Erityisesti urheilukäyttöön: kontakti- ja extremelajit, pelit, juoksu

Tuotekoodi vasen	Tuotekoodi oikea	Koko	Reiden ympärys
81-06602	81-06592	XS	33–39 cm
81-06603	81-06593	S	39–47 cm
81-06604	81-06594	M	47–53 cm
81-06605	81-06595	L	53–60 cm
81-06606	81-06596	XL	60–67 cm
81-06607	81-06597	XXL	67–75 cm



MEDIROYAL | NRX430

NRX® Patella Lux

Polvituki lumpion sijoiltaanmenoon

Käyttöaiheet

Patellan subluksaatio tai luksaatio, patellofemoraalinen kipu, patellan linjausongelmista johtuva polven etuosan kipu

Ominaisuudet

- Kevyt rakenne
- Mahtuu kapeampienkin housujen alle
- Sama tuki sopii molempiin jalkoihin
- Paineen säätö mahdollista remmien avulla
- Liukumaton sisäpinta auttaa tuen paikallaan pysymistä
- Remmit tarttuvat mihin kohtaan tukea tahansa
- Hengittävä materiaali

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään polven keskikohdan ympäryksellä. Sama tuki sopii molempiin jalkoihin.

Tuotekoodi	Koko	Polven ympärys
NRX430-XS	XS	29–32 cm
NRX430-S	S	32–35 cm
NRX430-M	M	35–38 cm
NRX430-L	L	38–42 cm
NRX430-XL	XL	42–46 cm
NRX430-XXL	XXL	46–50 cm



MEDIROYAL | NRX421

NRX® Patella Tendon Long

Lumpiotuki polven etuosan kiputiloihin

Käyttöaiheet

Osgood-Schlatterin tauti, hyppääjän polvi, kondromalasia, patellajänteen ongelmat

Ominaisuudet

- Spiraalituot molemmilla sivuilla pitää tuen ryhdikkäänä
- Tiukkuutta voi säätää reiden ja pohkeen kohdalta tarroilla
- Patellajänteen kohdalla tukimansetti, joka kohdistaa kompression oikeaan kohtaan, mansetilla voidaan myös nostaa lumpiota ja keventää jänteen rasitusta
- Käyttömukavuutta lisää hengittävä Neptune-materiaali
- Materiaali tarjoaa lämpövaikutuksen tuomat hyödyt

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään polven keskikohdan ympärysmittan perusteella. Sama tuki sopii molempiin jalkoihin.

Tuotekoodi	Koko	Polven ympäryys
NRX421-XS	XS	29–32 cm
NRX421-S	S	32–35 cm
NRX421-M	M	35–38 cm
NRX421-L	L	38–42 cm
NRX421-XL	XL	42–46 cm
NRX421-XXL	XXL	46–50 cm
NRX421-XXXL	XXXL	50–54 cm



SPORLASTIC | 07229

Kasseler Patellar Tendon Bandage

Polvilumpion proprioseptiikkaa parantava tukiremmi

Käyttöaiheet

Konservatiivinen/postoperatiivinen kuntoutus, polven etuosan kipu (Q-ceps jänteen tulehdukset, kondromalasia), kuntouttava harjoittelu, Quadriceps-lihaksen heikkous

Ominaisuudet

- Tuki nostaa polvilumpion painetta, proprioseptiikka paranee
- Lievittää kipua
- Silikonituen nystyrät antavat hierovan vaikutuksen ja parantavat proprioseptiikkaa
- Portaaton tarrakiinnitys, remmit voi lyhentää yksilöllisesti

Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi	Puoli	Koko
07229	puolieroton	1 koko



Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset

Nilkka- ja jalkatuet

Walkerit

- 121** AirSelect Standard
AirSelect Short
- 122** Airstep Tight
Airstep Tight Short
- 123** XcelTrax Air / Ankle
- 124** VACOped Achilles

Walker-lisävarusteet

- 125** Aircast 10° kantakiilarja
Evenup
- 129** Aircast hygieniasuojus
Sääsuoja walkereille

Nilkkatuet

- 127** Air-Stirrup II
Air-Stirrup Classic
- 128** Airstrong
Malleocare Step
- 129** Malleostrong Pro
Malleodyn S3
- 130** McDavid A101 -nilkkatuki
Wraptor Speed Lace
- 131** SRX Stable
Malleorapid
- 132** Airlift PTTD
Malleo-Hit
- 133** Achillodyn
Achicare Comfort C Plus

Yölastat

- 134** Malleonite-yölasta
Ufo-yölasta
- 135** Universal-yölasta
Night Sock -yövenytyssukka

Peroneustuet

- 136** Step-On AFO
- 137** Easy Walk Advance II
- 138** Afo light
Afo extrastrong
- 139** Affix
- 140** Spring-Up
Rebound Foot-Up
- 141** Neurodyn Classic

Jalkaterä ja kantapää

- 142** AirHeel / AirHeel with Stabilizers
Plantaarifaskiittinauha
- 143** ActyToe
ActyToe-yölasta
- 144** Hallux Valgus Combo
Novaped Sport
- 145** Skin Hallux
Skin Calcaneus
- 146** MOW-pronaatiopohjallinen
- 147** LOW-supinaatiopohjallinen
- 148** Kantakiila, silikoninen
Kantakiila, kova
- 149** Heel Cup
- 150** Silicon Insole
Metarso
- 151** ActyToe Lift
Mailand
- 152** Amsterdam
Marseille
- 153** PodaPro
Podalux II



Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään kengän koon mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Kengän koko
01EF-XS	XS	< 35,5
01EF-S	S	35,5–39,5
01EF-M	M	39,5–43
01EF-L	L	43–47
01EF-XL	XL	> 47



Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään kengän koon mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Kengän koko
01ES-XS	XS	< 35,5
01ES-S	S	35,5–39,5
01ES-M	M	39,5–43
01ES-L	L	43–47
01ES-XL	XL	> 47

ENOVIS | 01EF

AirSelect Standard

Nykyaikainen, ilmatäytteinen, matalaprofiilinen walker

Käyttöaiheet

Postoperatiivisesti ja -traumaattisesti nilkan ja jalkaterän vammoissa, akilleksen konservatiivinen tai postoperatiivinen kuntoutus, vamman nopeaan, turvalliseen ja aktiiviseen kuntoutukseen, kipsin korvike

Ominaisuudet

- Matalaprofiilinen pohjaratkaisu, luonnollinen askel
- Kaksi Duplex-ilmakennoa nilkan sivuilla antavat maksimaalisen tuen ja vähentävät tehokkaasti turvotusta
- Umpinainen rakenne, sopii myös akilleksen kuntoutukseen ja kantakiiloille
- Edessä muovinen etupaneeli, tasaa remmien paineen tasaisesti
- Monipuoliset lisä-/vaihtovarusteet, puolieroton

Lisävarusteet	
01E101x (x=1-5)	Sisäpehmuste ja sisäpohjallinen (XS–XL)
01E104x (x=1-3)	Vaihtoremmissarja (XS/S, M/L, XL)
0129A	Elastinen "tuubi"-sisäsukka, koko XS
0129P	Elastinen "tuubi"-sisäsukka, koko Universal

ENOVIS | 01ES

AirSelect Short

Nykyaikainen, ilmatäytteinen, matalaprofiilinen lyhyt walker

Käyttöaiheet

Metatarsaalisiin fraktuurat, jalkaterän etu- ja keskiosan vammat, akuutti ja postoperatiivinen käyttö, pehmytkudosvauriot, säären alaosan ja nilkan stabiilit murtumat, akuutit nilkan nyrjähdykset

Ominaisuudet

- Matalaprofiilinen pohjaratkaisu, erinomainen käynti: luonnollinen askel, varhainen mobilisointi
- Kolme Duplex-ilmakennoa antavat maksimaalisen tuen ja vähentävät tehokkaasti turvotusta
- Umpinainen rakenne, kevyt
- Edessä muovinen etupaneeli tasaa remmien paineen tasaisesti
- Monipuoliset lisä-/vaihtovarusteet, puolieroton

Lisävarusteet	
01E101x (x=1-5)	Sisäpehmuste ja sisäpohjallinen (XS–XL)
01E104x (x=1-3)	Vaihtoremmissarja (XS/S, M/L, XL)
0129A	Elastinen "tuubi"-sisäsukka, koko XS
0129P	Elastinen "tuubi"-sisäsukka, koko Universal



ORTHOSERVICE | M550N

Airstep Tight

Walker-ortoosi ilmatyynyillä

Käyttöaiheet

Jalkaterä-, nilkka- ja säärimurtumien konservatiivinen ja postoperatiivinen hoito, vakavat nivelsidevammat, konservatiivinen hoito akillesjänteen repeämän jälkeen, akillesjänteen korjausleikkauksen jälkeinen postoperatiivinen hoito, pre- ja postoperatiivinen/posttraumaattinen immobilisaatio

Ominaisuudet

- Yksilöllisesti täytettävät ilmatyyny walkerin molemmilla sivuilla takaavat optimaalisen istuvuuden ja vakauden: integroitu pumppumekanismi ilmatyynyjen täyttämiseen ja tyhjentämiseen
- Walkerin muovinen etupaneeli tukevoittaa walkeria ja luo tasaisen paineen jalan ja säären etupinnalle
- Tuen rakenne on kevyttä, tukevaa muovia; pohja EVA-materiaalia
- Pohja luistamatonta materiaalia
- Paketissa lisäpehmusteita yksilölliseen lisäpehmustamiseen
- Puolieroton

Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi	Koko	Kengän koko	Vaihtopehmuste, tuotekoodi
M550N-S	S	35-39	M550N/P-S
M550N-M	M	39-44	M550N/P-M
M550N-L	L	44-47	M550N/P-L
M550N-XL	XL	>47	M550N/P-XL
M550N-XL	XL	>47	M550N/P-XL



ORTHOSERVICE | M560N

Airstep Tight Short

Lyhyt walker ilmatyynyillä

Käyttöaiheet

- Jalkaterän metatarsaalimurtumat
- Jalkaterän etu- ja keskiosan vammat
- Nilkan akuutit, voimakkaat nyrjähdykset, jossa voimakas turvotus mukana alkuvaiheessa
- Jalan ja nilkan leikkauksen jälkeinen tuenta
- Säären alaosan ja nilkan stabiilit murtumat

Ominaisuudet

- Yksilöllisesti täytettävät ilmatyyny walkerin molemmilla sivuilla takaavat optimaalisen istuvuuden ja vakauden: integroitu pumppumekanismi ilmatyynyjen täyttämiseen ja tyhjentämiseen
- Walkerin muovinen etupaneeli tukevoittaa walkeria ja luo tasaisen paineen jalan ja säären etupinnalle
- Tuen rakenne on kevyttä, tukevaa muovia; pohja EVA-materiaalia
- Pohja luistamatonta materiaalia
- Paketissa lisäpehmusteita yksilölliseen lisäpehmustamiseen
- Puolieroton

Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi	Koko	Kengän koko
M560N-S	S	35-39
M560N-M	M	39-44
M560N-L	L	44-47
M560N-XL	XL	> 47



ENOVIS | 79-9551X, 79-9552X

XcelTrax Air / Ankle

Laadukas, ilmatäytteinen, takaa auki oleva walker

Käyttöaiheet

- Postoperatiivisesti ja -traumaattisesti nilkan ja jalkaterän vammoissa
- Kipsin korvike
- Vamman nopeaan, turvalliseen ja aktiiviseen kuntoutukseen
- Ankle-malli erityisesti jalkaterän murtumat kuten meta-tarsaalimurtumat, nilkan nyrjähdykset ja stabiilit murtumat.

Ominaisuudet

- Kevyt, valmiiksi muotoiltu rakenne
- Matalaprofiilinen pohjaratkaisu, luonnollinen askel
- Iskuja vaimentava ja pitävä pohjan rakenne
- Pehmeään nailon-/vaahtomuovivuoreen integroitu ilmakennosto ja pumppu mahdollistavat napakan miellyttävän tuennan
- Vaihtopehmusteet kokoluokittain
- Puolieroton

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään kengän koon mukaan.

Tuotekoodi	Kuvaus	Koko	Kengän koko	Vaihtopehmuste
79-95512	XcelTrax Air	XS	< 36	79-95532
79-95513	XcelTrax Air	S	36–39	79-95533
79-95515	XcelTrax Air	M	40–44	79-95535
79-95517	XcelTrax Air	L	44–46	79-95537
79-95518	XcelTrax Air	XL	> 46	79-95538
79-95522	XcelTrax Air Ankle	XS	< 36	79-95542
79-95523	XcelTrax Air Ankle	S	36–39	79-95543
79-95525	XcelTrax Air Ankle	M	40–44	79-95545
79-95527	XcelTrax Air Ankle	L	44–46	79-95547
79-95528	XcelTrax Air Ankle	XL	> 46	79-95548

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset



OPED | VPED-01-4

VACOped Achilles

Markkinoiden paras akilles- ja murtumaortoosi nivelsäädöllä

Käyttöaiheet

Akillesrepeämät (konservatiivinen ja postoperatiivinen hoito), akillestendiniitti, nilkkamurtumat, kantaluun murtumat, kompleksit nilkan nivelsidevammat, metatarsaalimurtumat, nilkan vaikeat nyrjähdykset

Ominaisuuudet

- Mahdollistaa aikaisen painon varauksen turvallisesti, minimoidaan immobilisoinnin haitat: lihasvoima ja -aktiivisuus, aineenvaihdunta
- Akilleskuntoutus voidaan toteuttaa tehokkaasti mutta turvallisesti: nivelsäädöt 30° plantaarifleksioista 10° dorsifleksioon 5° välein. Nivelsäätö voidaan lukita tai avata kuntoutusvaiheen mukaan: vältetään akilleksen turha kiristyminen turvallisesti ja estetään mahdolliset uudet repeämät kuntoutuksen aikana
- Tuen sisäsuikkaan on integroitu patentoitu mikrohelmistä koostuva tyhjiöpakkaus, jonka avulla ortoosi antaa täydellisen istuvuuden sekä tuennan jalalle ja säärelle
- Pakkauksen mukana tulee kaksi erilaista ulkopohjaa: akilleskuntoutukseen suunniteltu pizarapohja ja muihin vammoihin suunniteltu matalampi keinupohja
- Pakkauksessa mukana kulmasäätöavain, varasisäusukka ja tyhjiöpumppu
- Ortoosin jalkateräosuus on säädettävissä kolmeen eri pituuteen
- Ortoosille on luotu tarkat hoitoprotokollat eri indikaatioille, lisäksi useita tutkimustuloksia

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään kengän koon mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Kengän koko
VPED-01-4-S	S	35–39
VPED-01-4-M	M	40–43
VPED-01-4-L	L	44–50

Lisävarusteet	Kuvaus	Koko
42VPSE-01-4-S	varaosasetti	S
42VPSE-01-4-M	varaosasetti	M
42VPSE-01-4-L	varaosasetti	L



Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi	Koko	Walkerin koko
82-0110	XS/M	XS-M
82-0210	L/XL	L-XL

ENOVIS / AIRCAST | 82-0X10

Aircast 10° kantakiilarja

Kolmiosainen kantakiilarja akillesjännekuntoutukseen walkerin kanssa käytettäväksi

Käyttöaiheet

Akillesjänteen ja pohkeen repeämien hoito ja kuntoutus walkerin avulla

Ominaisuudet

- Koostuu kolmesta 10° kiilasta, joita voidaan käyttää päällekkäin: 3 kiilaa = 30° kulma, 2 kiilaa = 20° kulma, 1 kiila = 10° kulma
- Sopii käytettäväksi useiden eri walker-mallien kanssa
- Keventää akillesjänteen ja pohkeen kuormitusta
- Pitää jalkaterää ojennetussa asennossa (plantaarifleksio), jotta akillesjänne pääsee paranemaan oikeaan pituuteensa
- Kantakiiloissa kaksipuolinen teippi, jolla kiilat saadaan kiinnitettyä walkerin runkoon ja toisiinsa
- Kaksi eri kokoa, puolieroton
- Valmistettu kierrätysmateriaalista



OPED | 1035X

Evenup®

Korkeussäädettävä kengän korotuspohja

Käyttöaiheet

- Käytetään kipsin, walkerin tai hoitojalkineen aiheuttaman alaraajojen väliaikaisen pituuseron korjaukseen.
- Evenupin avulla kävely sujuu symmetrisemmin ja kuntoutus etenee paremmin eikä pituuserosta johtuvia kipuja synny muualle kehoon kuten alaselkään tai lonkkiin.

Ominaisuudet

- Korotus on säädettävissä irrotettavien palojen ansiosta 1,3 cm, 1,9 cm ja 3,2 cm korkeuksiin
- Helppokäyttöinen ja kevyt
- Kiinnitys kumisella "raamilla" ja kengän päältä tarralla
- Kestävä ja pitävä EVA-pohja
- Puolieroton: sopii sekä oikeaan että vasempaan jalkineeseen
- Sopii parhaiten lenkkariin (myös kävelykenkään, jossa normaali kannan korkeus ja leveys)

Koko- ja tilaustiedot

Koko määräytyy kengän koon mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Kengän koko	Jalan pituus
10350	S	34–38	21,6–26 cm
10351	M	39–43	26,5–27,8 cm
10352	L	44–46	28,3–29,8 cm



ENOVIS / AIRCAST | 0130A

Aircast® hygieniasuojus

Walkerin suojus sisäkäyttöön

Käyttöaiheet

Walkerin käyttö sisätiloissa

Ominaisuudet

- Estää sisätilojen likaantumista
- Luistamaton pohja
- Helppokäyttöinen
- Materiaali hengittävä nailon

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään Walkerin koon mukaan.

Tuotekoodi	Walkerin koko	Suojan koko
0130A-PED/S	S, lapset	PED/S
0130A-M/L	M	M/L
0130A-M/L	L	M/L
0130A-XL	XL	XL



NORDICARE | 8022000

Sääsuoja walkereille

Lyhyt nilkkamittainen sääsuoja lyhyen tai pitkä walkerin kanssa käytettäväksi

Ominaisuudet

- Helppo avata ja kiinnittää edessä olevan tarrakiinnityksen avulla
- Lisänauhakiinnitys pikalukolla sääsuojan yläreunassa
- Suojaa myös walkerin pohjan, pitävä ja vahvistettu
- ulkopohjan materiaali
- Yleismalli, sopii eri walker-malleihin

Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi	Walkerin koko
802200040	S/M
802200060	L/XL



Koko- ja tilaustiedot
Koko määritetään käyttäjän
pituuden mukaan.

ENOVIS / AIRCAST | 81-02V

Air-Stirrup II

Tukeva nilkkatuki akuuttiin nilkan nyrjähdykseen

Käyttöaiheet

Akuutit nilkkavammat, nilkan nyrjähdykset (asteet I-III),
postoperatiivinen tuenta

Ominaisuudet

- Puolikova, anatomisesti muotoiltu kuori antaa suojaa ja käyttömukavuutta sekä estää inversion/eversion
- Patentoitu Duplex™ -ilmatyynyjärjestelmä parantaa verenkiertoa ja vähentää turvotusta
- Helppo asentaa paikalleen ilmatyynyjen ja säädettävän kantalapun avulla
- Sopii hyvin jalkineeseen

Tuotekoodi	Koko	Puoli	Käyttäjän pituus	Tuen korkeus
81-02VSL	S	vasen	< 157 cm	21,6 cm
81-02VSR	S	oikea	< 157 cm	21,6 cm
81-02VML	M	vasen	157–167 cm	23,5 cm
81-02VMR	M	oikea	157–167 cm	23,5 cm
81-02VLL	L	vasen	> 162 cm	26,7 cm
81-02VLR	L	oikea	> 162 cm	26,7 cm



ENOVIS / AIRCAST | 02XX

Air-Stirrup Classic

Nilkkatuki akuutin nilkkavamman tuentaan

Käyttöaiheet

Nilkan nyrjähdyksen jälkeinen tuenta

Ominaisuudet

- Puolikova, anatomisesti muotoiltu kuori antaa suojaa ja käyttömukavuutta sekä estää inversion/eversion
- Duplex™-ilmatyynyjärjestelmä parantaa verenkiertoa ja vähentää turvotusta
- Helppo asettaa paikalleen ilmatyynyjen ansiosta
- Hyvä sopivuus jalkineisiin mahdollistaa kevyen alkuvaiheen kuormituksen

**Koko- ja
tilaustiedot**

Tuotekoodi vasen	Tuotekoodi oikea	Koko	Korkeus
02CL	02CR	S	22 cm
02BL	02BR	M	23 cm
02AL	02AR	L	27 cm
02JL	02JR	Ped	15 cm
02DL	02DR	Ohut kuori	23 cm

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset



ORTHOSERVICE | MA1029

Airstrong

Tukeva nilkkatuki ilmatyynyillä

Käyttöaiheet

Kohtalainen tai vakava nilkan nivelsidevamma, postoperatiivinen kuntoutus, Malleolien murtumien kuntoutus, krooninen instabiliteetti, urheilukäytössä uusien vammojen ennaltaehkäisy

Ominaisuudet

- Anatominen muotoilu, elppo pukea
- Ilmatäytteiset tyynyt molemmilla sivuilla
- Velcro®-tarranauha stabiloi tuen paikalleen
- Pakettiin sisältyy pumppu

Koko- ja tilaustiedot

Yksi koko. Sopii sekä vasempaan että oikeaan jalkaan.

Tuotekoodi	Koko
MA1029	1 koko



ORTHOCARE | 7420

Malleocare Step

Yhden koon nilkkatuki

Käyttöaiheet

Postoperatiivinen ja konservatiivinen hoito nilkan ligamenttivamman jälkeen, krooninen nilkan instabiliteetti, nilkan nyrjähdysten jälkeen

Ominaisuudet

- Helppo käyttää säädettävien tarranauhojen avulla
- Pehmeä tarjoo suojaa ja käyttömukavuutta

Koko- ja tilaustiedot

Yksi koko. Sopii sekä vasempaan että oikeaan jalkaan.

Tuotekoodi	Kuvaus	Koko
7420	Malleocare Step -nilkkatuki	1 koko
0213	Lisävaruste, vaihtokantahihnat	1 koko



Tuotekoodi	Puoli	Koko	Kengän koko
MA1028L-XS	vasen	XS	30-34
MA1028L-S	vasen	S	35-38
MA1028L-M	vasen	M	39-42
MA1028L-L	vasen	L	43-47
MA1028L-XL	vasen	XL	48+
MA1028R-XS	oikea	XS	30-34
MA1028R-S	oikea	S	35-38
MA1028R-M	oikea	M	39-42
MA1028R-L	oikea	L	43-47
MA1028R-XL	oikea	XL	48+



ORTHOSERVICE | MA1028

Malleostrong Pro

Pehmeä ja helposti puettava nilkkatuki akuutin nilkkavamman tuentaan

Käyttöaiheet

Lievien ja kohtalaisten (taso I ja II) nilkan nyrjähdysten akuutti, konservatiivinen hoito, leikkauksen ja kipsin jälkeinen tuenta ja kuntoutus, nilkan krooninen instabiliteetti

Ominaisuudet

- Erittäin helppo pukea ja hyvä pehmustus tekee tuesta erinomaisen akuutin nilkkavamman tuennassa
- Takaa avattava, helppo asettaa paikalleen kipeäänkin nilkkaan
- Akuuttivaiheen tuennan lisäksi samalla tuella voi palata myöhemmin myös liikuntaan ja urheiluun
- Vahvat anatomiset sivutuet
- Jalkaterän ulkosivulta lähtevä jämäkkä lisäkieristysremmi lisää selvästi nilkan ulkosivun tukea ja tekee tuesta tukevan myös ilman jalkinetta
- Remmi kietaistaan nilkan ympäri kiinnittyen lopulta ylös nilkan ulkosivulle, remmi kiinnittää myös sivutuet tukevasti nilkan sivuille
- Pienin koko sopii lapsille (kengän koot 30-34)

Koko- ja tilaustiedot

Koko määräytyy kengän koon mukaan. Vasen ja oikea erikseen.

SPORLASTIC | 07841

Malleodyn® S3

Kuntoutuksen mukaisesti kevennettävä nilkkatuki

Käyttöaiheet

Laadukas nilkkavamman kuntoutus: nilkan venähdys/nyrjähdys, nivelsidevammat, trauman jälkitila, urheiluvammat ja -käyttö, uusien nilkkavammojen ennaltaehkäisy, nilkan kiputilat, instabiliteetti (löysyys, epävakaus)

Ominaisuudet

- Suljettu rakenne estää "ikkunaturvotuksen" syntymisen
- Optimaalinen kuntoutus 3-vaiheisen ohjelman mukaisesti ja kylmähoito. Yhdellä nilkkaetuella kolmen eri tuen tehtävät.
- Tuen keventäminen vaiheittain on erittäin helppoa
- Korkealaatuinen ja miellyttävä materiaali: anatominen 3D-tukirakenne sekä hengittävä ja kosteutta siirtävä bi-elastinen kangas
- Sisäpehmusteen materiaali antibakteerinen
- Kaksi pikakiinnitintä
- Kantapään leveys säädettävissä yksilöllisesti
- Ohut rakenne, sopii hyvin jalkineisiin

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään kengän koon mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Kengän koko
07841-1	1	35-40
07841-2	2	41-47

Kaula

Oika • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset

Nilkka- ja jalkatuet

Nilkkatuet



MCDAVID | A101

McDavid A101 -nilkkatuki

Nauhoitettava muovivahvikkeinen nilkkatuki vahvaan tuentaan

Käyttöaiheet

Nilkan nyrjähdysten jälkeinen tuenta, postoperatiivisesti tai -traumaattisesti kipsi- tai walkerhoidon jälkeen tai niiden sijaan, instabiiliin nilkan tuenta urheilu-, liikunta- tai työkäytössä

Ominaisuudet

- Pehmustettu Intera-vuoraus haihduttaa kosteutta ja tehostaa puristusvaikutusta
- Suorituskykyä ja mukavuutta lisäävät kolminkertainen nylon/ vinyylimateriaali, lämpömuovailtavat muovivahvikkeet sivuilla, lovitettu etuosa, elastinen kantapääosa ja kieli
- Puolieroton
- Väri musta, saatavana myös valkoinen

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään kengän koon mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Kengän koko
A101R-BK-XS	XS	38,5-40
A101R-BK-S	S	40-42,5
A101R-BK-M	M	42,5-44,5
A101R-BK-L	L	44,5-47,5
A101R-BK-XL	XL	48-



BREG | SA7020

Wraptor Speed Lace

Helposti ja nopeasti puettava tukeva nilkkatuki

Käyttöaiheet

Akuutit nilkan nyrjähdykset, löysän/yliliikkuvan nilkan tuenta, uusien nilkan nyrjähdysten ennaltaehkäisy urheilussa ja liikunnassa

Ominaisuudet

- Ohut, joustava ja erittäin tukeva nilkkatuki
- Nopea ja tehokas kiinnitys Speed-Lace- nauhoituksella
- Joustamattomat lisäkivistysnauhat nilkan sivuilla: tuen tukevuutta ja tuennan suuntaa on helppo säätää ja keventää kuntoutumisen edetessä
- Kantapään alla, sisäpinnalla on pitävä Shark skin -materiaali, jonka avulla kantaluun ohjaus ja tuenta pitävä ja hyvä
- Mahtuu hyvin kenkään

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään kengän koon mukaan.

Jos olet kahden koon välillä, valitse isompi.

Tuotekoodi	Koko	Kengän koko
SA702001	XS	38-40
SA702003	S	41-43
SA702005	M	43-44,5
SA702007	L	44,5-47
SA702009	XL	48-
SA702011	XXL	48W-leveä



Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään kengän koon ja nilkan ympäryksen mukaan. Mikäli nilkan ympäryys ja kengän koko eivät osu samaan kokoluokkaan, valitse tuki nilkan ympäryksen mukaan.



Koko- ja tilaustiedot

Koko määräytyy nilkan kapeimman kohdan ympärysmittan mukaan. Sama tuki sopii oikeaan ja vasempaan jalkaan.

Tuotekoodi	Koko	Nilkan ympäryys
M24081-0	0	16–19 cm
M24081-1	1	19–22 cm
M24081-2	2	22–26 cm
M24081-3	3	26–30 cm

MEDIROYAL | SRX875

SRX® Stable

Erityisesti urheiluun ja liikuntaan soveltuva nilkkatuki

Käyttöaiheet

Lievä tai keskivaikea nilkan nivelsidevamma, uusien nilkkavammojen ennaltaehkäisy urheillessa, nilkan tuenta liikkussa ja urheillessa

Ominaisuudet

- Antaa sivusuuntaisen mekaanisen tuen nilkalle
- Ristiremmillä voidaan säätää tuen määrää ja suuntaa yksilöllisesti, yläremmi stabiloi ristiremmiä
- Akillesjänteen kohdalla venyvä kangas, joka vähentää akillesjänteeseen kohdistuvaa painetta
- Hengittävä materiaali ja ohut rakenne, sopii hyvin jalkineisiin

Tuotekoodi	Koko	Nilkan ympäryys	Kengän koko
SRX875-XS	XS	19–20 cm	35–37
SRX875-S	S	20–21 cm	38–40
SRX875-M	M	21–23 cm	40–42
SRX875-L	L	23–25 cm	42–44
SRX875-XL	XL	25–27 cm	44–46

ORTHOSERVICE | M24081

Malleorapid

Helposti puettava ja tukeva nilkkatuki

Käyttöaiheet

Lievien ja kohtalaisten (taso I ja II) nilkan nyrjähdysten akuutti ja konservatiivinen hoito, leikkauksen jälkeinen toiminnallinen kuntoutus, urheiluun palaaminen kohtalaisten tai vakavien (taso II ja III) nilkan nyrjähdysten jälkeen, krooninen nilkan tulehdus, nilkan jännetulehdus

Ominaisuudet

- Helposti ja nopeasti puettava
- Miellyttävä ja hengittävä materiaali
- Tuki avattavissa takaa, jalka asetetaan paikalleen ja tarra suljetaan
- Lisäkieritys nykyaikaisen ja nopean nyöriksen avulla, pikakiinnitysmekanismi ja nauhoille suunniteltu oma tasku
- Nyöritys mahdollistaa tuen helpon muokattavuuden ja säädön turvotuksen mukaan
- Nyöriksen alla hyvin vahvistettu "kieli" mahdollistaa voimakkaankin kiristyksen ilman, että nyöritys painuu ihoa vasten
- Tuen lisävahvisteina sivuilla ohuet, muotoiltavissa olevat metallilastat
- Lastat irroitettavissa ja sijainti muokattavissa kuntoutuksen vaiheen ja jalan anatomian mukaan
- Elastiset lisäremmit lisäävät tukevuutta
- Tuen anatominen ja ohut rakenne mahdollistaa käytön erilaisissa kengissä (sopii myös jalkapallokenkään)
- Pienin koko sopii myös lapsille

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset

Nilkka- ja jalkatuett

Nilkkatuett



Tuotekoodi	Koko	Puoli	Kengän koko
02PSL	S	vasen	< 38
02PSR	S	oikea	< 38
02PML	M	vasen	39–42
02PMR	M	oikea	39–42
02PLL	L	vasen	> 43
02PLR	L	oikea	> 43

ENOVIS / AIRCAST | 1002P

Airlift PTDD

Jalan pitkittäisen holvin tuentaan

Käyttöaiheet

Tibialis posterior -jänteen tulehdus tai dysfunktio, jalan pitkittäisen holvin madaltuminen, lattajalka, nilkan sisäsivun nivelsiteen (delta-ligamentin) venähdykset/repeämät, leikkauksen jälkeinen tuenta jalan sisäsivun operaatioissa

Ominaisuudet

- Tuen antavat täytettävä ilmatyyny, nilkan molemmin puolin olevat puolijäykät sivutuett ja tukiremmi
- Ilmatyyny jalan pitkittäisen holvin alla, jalan sisäsivulla
- Ilmatyynyn avulla tuki asettuu yksilöllisesti jalkaholvin muodon, tukitarpeen ja painon mukaan
- Ohut, ilmava materiaali

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään kengän koon mukaan.



Tuotekoodi	Koko	Nilkan ympärys
07074-0-9188-1	1	< 19 cm
07074-0-9188-2	2	19–21 cm
07074-0-9188-3	3	21–23 cm
07074-0-9188-4	4	23–25 cm
07074-0-9188-5	5	25–27 cm
07074-0-9188-6	6	27–29 cm
87074-0-9188-K	lapset	16–18 cm

SPORLASTIC | 07074

Malleo-Hit®

Elastinen nilkkatuki silikonisilla tukityynyillä

Käyttöaiheet

Konservatiivinen tai postoperatiivinen nilkan kuntoutus, nilkan nyrjähdysten tuenta ja kuntoutus, nilkan kuluma tai nilkan kiputilat, reuman aiheuttamat nilkan kiputilat

Ominaisuudet

- Kompressiovaikutus tukee, helpottaa kipua ja parantaa asentotuntoa
- Nystyräiset silikonitynnyt kehräsluiden takana ja alla vähentävät turvotusta, parantavat verenkiertoa ja antavat mikrohierontaa
- Tuki nopeuttaa kudosten välistä aineenvaihduntaa turvotustilanteissa
- Tuki erityiskudottu huomioiden erityistä joustoa vaativat alueet kuten nilkkataive
- Puolieroton
- Väri harmaa, saatavilla myös musta ja beige

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään nilkan kapeimman kohdan ympärysmittaan mukaan.



Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään nilkan kapeimman kohdan ympärysmittan mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Nilkan ympäryys
07071-0-9188-1	1	< 19 cm
07071-0-9188-2	2	19-21 cm
07071-0-9188-3	3	21-23 cm
07071-0-9188-4	4	23-25 cm
07071-0-9188-5	5	25-27 cm
07071-0-9188-6	6	27-29 cm



Tuotekoodi	Koko	Nilkan ympäryys
7920-XS	XS	17-20 cm
7920-S	S	20-22 cm
7920-M	M	22-24 cm
7920-L	L	24-26 cm
7920-XL	XL	26-28 cm
7920-XXL	XXL	28-30 cm

SPORLASTIC | 07071

Achillodyn®

Elastinen akillestuki silikonisilla tukityynyillä ja erillisillä kantakorotuksilla

Käyttöaiheet

Akillesjänteen tulehdukset, akillesbursiitti, akillesjänteen osittaisen repeämisen jatkoahoito, akillesjänteen postoperatiivinen kuntoutus

Ominaisuudet

- Tuen sisäpuolella akillesjänteen ympärillä olevat silikoniset tukityynyt edistävät paineen ja hierovan vaikutuksensa ansiosta paranemisprosessia ja vähentävät jänteen ympärillä olevaa turvotusta
- Vähentää akillesjänteeseen kohdistuvaa venytystä tukityynyjen ja kantakorotusten avulla
- Lisää nilkan ja akilleen tukevuutta parantuneen proprioseptiikan avulla
- Tuen mukana tulee iskua vaimentavat kantakorokkeet
- Akillesjänteen molemmin puolin silikoniset tukityynyt
- Erytiskudottu huomioiden erityistä joustoa vaativat alueet kuten nilkkataive
- Puolieroton
- Väri harmaa, saatavilla myös musta ja beige

ORTHOCARE | 7920

Achicare Comfort C Plus

Elastinen akillestuki silikonisilla tukityynyillä

Käyttöaiheet

Krooninen tai akuutti akillesjännetulehdus, amman tai leikkauksen jälkeiseen kuntoutusvaiheeseen, jännetupen tulehdukset, akillesbursiitit (limapussin tulehdukset)

Ominaisuudet

- Tukee akillesjännettä ponnistuksen aikana ja poistaa tehokkaasti turvotusta akilleksen ympäriltä
- Tuki lisää nilkan ja akilleen tukevuutta parantuneen proprioseptiikan avulla
- Akillesjänteen molemmin puolin silikoniset tukityynyt
- Erytiskudottu huomioiden erityistä joustoa vaativat alueet kuten nilkkataive
- Puolieroton

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään nilkan kapeimman kohdan ympärysmittan mukaan.

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Läpse:



ORTHOSERVICE | M90062

Malleonite-yölasta

Yölasta plantaarifaskiitin hoitoon

Käyttöaiheet

Plantaarifaskiitti, akillesjännteen tendinopatia, riippunilkka, jalan kipu heräämisen jälkeen

Ominaisuudet

- Remmit mahdollistavat yksilöllisen säädön
- Pehmusteet lisäävät käyttömukavuutta

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään kengän koon mukaan.
Sopii molempiin jalkoihin.

Tuotekoodi	Koko	Kengän koko
M90062-S/M	S/M	36–42
M90062-L/XL	L/XL	43–48



ORTHOMERICA | 36XX

Ufo-yölasta

Yölasta plantaarifaskiitin ja akilles tendiniitin hoitoon

Käyttöaiheet

Plantaarifaskiitti, akilles tendiniitti, ontraktuuriin hoito ja ennaltaehkäisy, neurologiset sairaudet ja oireet

Ominaisuudet

- Tukee jalkaa dorsifleksioon
- Venyttää nilkan plantaarifleksoreita ja kantakalvoa
- Ennaltaehkäisee kontraktuurien syntymistä sänkypotilailla
- Tarra- ja klipsikiinnitteinen, helppo pukea
- Lisävarusteena varvaskiila kantakalvon venytyksen tehostamiseksi
- Aikuisten ja lasten koot
- Puolieroton

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään kengän koon mukaan.
Sopii molempiin jalkoihin.

Aikuiset

Tuotekoodi	Koko	Kengän koko
3619	XS	–36
3620	S	36–39
3621	M	39–42
3622	L	42–44
3623	XL	44–

Lapset

Tuotekoodi	Koko	Kengänkoko
3614	S	16–23
3615	M	23–27
3616	L	27–31



Tuote- koodi	Koko	Kengän koko	Vaihtopehmuste Tuotekoodi
UFO/S	S	36-39	UFO/S-L
UFO/M	M	39,5-43	UFO/M-L
UFO/L	L	43,5-45	UFO/L-L

PROMEDICS | UFO/X

Universal-yölasta

Käyttöaiheet

Plantaarifaskiitti, akillestendiniitti, kontraktuurien hoito ja ennaltaehkäisy, neurologiset sairaudet/oireet

Ominaisuudet

- Tukee jalan dorsifleksioon
- Venyttää nilkan plantaarifleksoreita ja kantakalvoa
- Ennaltaehkäisee kontraktuurien syntymistä vuodepotilailla
- Tarra ja klipsikiinnitteinen, helppo pukea
- Helppo dorsifleksion säätö tarrakiristimillä, kohdennettua venytystä varpaille tehtävissä varvaskiiloilla (3 kpl)
- Puolieroton
- Vaihtopehmusteet saatavilla

Koko- ja tilaustiedot

Koko määrittyy jalkineen kokoluokan mukaan.



MEDIROYAL | NPF8

Night Sock -yövenytyssukka

Yövenytyssukka plantaarifaskiitin hoitoon

Käyttöaiheet

Plantaarifaskiitti

Käytön vasta-aiheet

Verenkierto-ongelmat, jalan avohaavat, diabetes, turvotus, vasaravarvas, iho-ongelmat, raskaus

Ominaisuudet

- Pitää jalan oikeassa asennossa ja antaa jalkapohjan kantakalvolle kevyen venytyksen
- Tarkoitettu käytettäväksi illalla, yöllä tai levossa
- Materiaalit nylon, spandex ja polyester
- Puolieroton

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään kengän koon mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Kengän koko
NPF8-S	S/M	35-40
NPF8-L	L/XL	41-46

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset



STEP-ON HELLAS | 100, 200

Step-On AFO

Innovatiivinen Step-On AFO on sarja dynaamisia peroneus-valmistuksia yksilöllisen tuen ominaisuuksilla

Käyttöaiheet

- Riippuniikka johtuen mm: aivohalvaus, MS-tauti, selkäydinvamma, päävamma, peroneushermon vamma, neuropatia, lihasrappeumatauti, CP-vamma
- Kontraindikaatiot: ihovauriot ja -tulehdukset, runsas turvotus, vahva nilkan plantaarisuunnan spastisuus

Ominaisuudet

- Vahva dorsifleksioavustus säädettävällä jousella
- Hyvä plantaariliikkeen kontrolli
- Saatavilla lateraalaisella tai mediaalisella nivelellä, tai molemminpuolisella tuplanivelellä vahvempaan jalan kontrolliin
- Alemman remmin avulla voi korjata nilkan asentoa
- Termoplastinen materiaali, lämpömuovattava
- Voi käyttää normaalikokoisen kengän sekä kantaremmillisen sandaalin kanssa
- Tuen paino vain 290 grammaa

Koko- ja tilaustiedot

Käyttäjän max. paino 115 kg, erikseen oikea ja vasen puoli.

Tuotteisiin saatavilla varaosina vaihtopehmusteet, -remmit ja -jouset. Lisäksi saatavilla sovitukset, jossa 4 kpl Step-On AFO 100 -tukia potilasarvioihin. Ole yhteydessä asia-kas palveluumme.

Step-On AFO 100 – yksipuoleinen nivel

Tuotekoodi	Nivelen sijainti	Puoli	Koko	Kengän koko	Pohkeen ympärys max.
100/MH/RT/S-M	mediaalinen	oikea	S-M	35-40	42,5 cm
100/MH/RT/L-XL	mediaalinen	oikea	L-XL	41-45	42,5 cm
100/LH/RT/S-M	lateraalinen	oikea	S-M	35-40	42,5 cm
100/LH/RT/L-XL	lateraalinen	oikea	L-XL	41-45	42,5 cm
100/MH/LT/S-M	mediaalinen	vasen	S-M	35-40	42,5 cm
100/MH/LT/L-XL	mediaalinen	vasen	L-XL	41-45	42,5 cm
100/LH/LT/S-M	lateraalinen	vasen	S-M	35-40	42,5 cm
100/LH/LT/L-XL	lateraalinen	vasen	L-XL	41-45	42,5 cm

Step-On AFO 200 – molemminpuolinen nivel

Tuotekoodi	Nivelen sijainti	Puoli	Koko	Kengän koko	Nilkan malleolaarinen leveys
200/DH/RT/S	molemminpuolinen	oikea	S	- 39	6,3-7,0 cm
200/DH/RT/M	molemminpuolinen	oikea	M	- 43	7,1-7,5 cm
200/DH/RT/L	molemminpuolinen	oikea	L	- 44	7,6-8,1 cm
200/DH/RT/XL	molemminpuolinen	oikea	XL	- 46	8,2-8,6 cm
200/DH/LT/S	molemminpuolinen	vasen	S	- 39	6,3-7,0 cm
200/DH/LT/M	molemminpuolinen	vasen	M	- 43	7,1-7,5 cm
200/DH/LT/L	molemminpuolinen	vasen	L	- 44	7,6-8,1 cm
200/DH/LT/XL	molemminpuolinen	vasen	XL	- 46	8,2-8,6 cm

ORTHOBALTIC | AFO12A

Easy Walk Advance II

Hiilikuituinen kevytrakenteinen peroneustuki

Käyttöaiheet

- Jalkaterän dorsifleksion heikkous (riippunilkka)
- Postoperatiivinen tuenta
- Nilkan niveltulehdus

Ominaisuudet

- Kevyt ja ohut, hiilikuitua
- Pohjeosan muotoilun ansiosta tuki istuu ja mukautuu monenmuotoisiin pohkeisiin
- Mahdollistaa dynaamisen ja symmetrisen kävelyn, avustaa nilkan dorsifleksiota ja varvastyöntöä
- Pohjeremmissä pikakiinnitys magneetilla: helpottaa tuen kiinnittämistä ja poisottoa yhdelläkin kädellä
- Pohjeremmin pituus helposti säädettävissä

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään kengän koon mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Puoli	Kengän koko	Tuen korkeus
AFO12ALXS	XS	vasen	34–36	32,5 cm
AFO12ARXS	XS	oikea	34–36	32,5 cm
AFO12ALS	S	vasen	36–39	33,5 cm
AFO12ARS	S	oikea	36–39	33,5 cm
AFO12ALM	M	vasen	39–42	34,5 cm
AFO12ARM	M	oikea	39–42	34,5 cm
AFO12ALL	L	vasen	42–45	35,5 cm
AFO12ARL	L	oikea	42–45	35,5 cm
AFO12ALXL	XL	vasen	45–47	37,5 cm
AFO12ARXL	XL	oikea	45–47	37,5 cm



Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset



ORTHOSERVICE | M9050

Afo light

Peroneuslasta kevyemmästä materiaalista

Käyttöaiheet

Jalkaterän dorsifleksion heikkous (riippunilkka), kevyestä tai kohtalainen nilkan equinussuuntainen spastisuus

Ominaisuudet

- Polypropyleenistä valmistettu runko-osa pyöristetyillä reunoilla, voidaan lämpömuokata
- Veluuripäällystetty pehmustetyyny suojaa tibiaa ja pohjetta
- Tarranauhakiinnitys pohkeessa
- Nilkkaremmi edessä kantapään stabilointiin
- Väri valkoinen

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään kengän koon mukaan.

Tuotekoodi Vasen	Tuotekoodi Oikea	Koko	Kengän koko	Tuen korkeus
M9050L-S	M9050R-S	S	35–39	28 cm
M9050L-M	M9050R-M	M	40–43	29 cm
M9050L-L	M9050R-L	L	41–44	34 cm
M9050L-XL	M9050R-XL	XL	> 44	39 cm



ORTHOSERVICE | M9051

Afo extrastrong

Peroneuslasta, tukeva materiaali

Käyttöaiheet

Jalkaterän dorsifleksion heikkous (riippunilkka), kevyestä tai kohtalainen nilkan equinussuuntainen spastisuus

Ominaisuudet

- Polyoxymetyleenistä valmistettu tukeva runko, ei lämpömuokattava
- Veluuripäällystetty pehmustetyyny suojaa tibiaa ja pohjetta
- Tarranauhakiinnitys pohkeessa
- Nilkkaremmi edessä kantapään stabilointiin
- Väri sininen

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään kengän koon mukaan.

Tuotekoodi Vasen	Tuotekoodi Oikea	Koko	Kengän koko	Tuen korkeus
M9051L-S	M9051R-S	S	35–39	28 cm
M9051L-M	M9051R-M	M	40–43	29 cm
M9051L-L	M9051R-L	L	41–44	34 cm
M9051L-XL	M9051R-XL	XL	>44	39 cm



ORTHOSERVICE | M20050

Affix

Peroneustuki

Käyttöaiheet

Riippunilkka, lievä tai kohtalainen jalan spastisuus

Ominaisuudet

- Suunniteltu käytettäväksi nauhakengän kanssa
- Matalaprofiilinen tuki
- Hengittävä materiaali
- Paketissa 2 kpl kenkäkiinnittimiä ja 2 kpl S-kiinnityskoukkuja
- Jalkaterän nosto tehdään tarroilla kiinnitettävän kuminauhan avulla
- Nilkkamansetissa geelipehmusteet akillesjänteen ympärillä
- Lisävarusteena hankittavissa jalkaterämansetti, joka mahdollistaa tuen käytön ilman kenkää tai avoimen kengän kanssa

Koko- ja tilaustiedot

Peroneustuki on puolieroton, koko määritetään nilkan ympärysmittan mukaan. Jalkaterämansetti on lisävaruste, tilataan erikseen. Mansetin koko määritetään jalkaterän ympärysmittalla, vasen ja oikea malli erikseen.

Tuotekoodi	Kuvaus	Puoli	Koko	Nilkan ympäryys	Jalkaterän ympäryys
M20050-XS	Affix-peroneustuki	puolieroton	XS	13–17 cm	
M20050-S	Affix-peroneustuki	puolieroton	S	17–21 cm	
M20050-M	Affix-peroneustuki	puolieroton	M	21–25 cm	
M20050-L	Affix-peroneustuki	puolieroton	L	25–29 cm	
M20052	S-kiinnityskoukku 2 kpl, varaosa				
M20053	Vaihtokuminauha 1 kpl, varaosa				
M20054	Kenkäkiinnitin 2 kpl, varaosa				
M20051L-S	Jalkaterämansetti, lisävaruste	vasen	S		17–21 cm
M20051L-M	Jalkaterämansetti, lisävaruste	vasen	M		21–25 cm
M20051L-L	Jalkaterämansetti, lisävaruste	vasen	L		25–29 cm
M20051R-S	Jalkaterämansetti, lisävaruste	oikea	S		17–21 cm
M20051R-M	Jalkaterämansetti, lisävaruste	oikea	M		21–25 cm
M20051R-L	Jalkaterämansetti, lisävaruste	oikea	L		25–29 cm

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset



TENORTHO | TO4104

Spring-Up

Riippunilkan hoitoon tarkoitettu peroneustuki

Käyttöaiheet

Riippunilikka, peroneusjänteen vammat

Ominaisuudet

- Hengittävä ja pehmeä materiaali
- Tarrakiinnitys helpottaa käyttöä
- Nostaa jalkaterää ja normalisoi kävelyä
- Etuosassa pikalukitsin, jolla nilkkamansetin saa kiinnitettyä jalkaterämansettiin tai kenkään
- Mahdollista käyttää ilman kenkää jalkaterämansetin avulla
- Materiaali: polyuretaani 50 %, nylon 38 %, elastaani 10 %, hiilikuitu 2 %

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään nilkan ympärysmittan mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Nilkan ympäryys
TO4104-S	S	< 18 cm
TO4104-M	M	18–23 cm
TO4104-L	L	23–30 cm



ÖSSUR | RFU5000

Rebound Foot-Up®

Dynaaminen peroneustuki

Käyttöaiheet

Jalkaterän dorsifleksion heikkous (riippunilikka)

Ominaisuudet

- Kevyt
- Hengittävää materiaalia
- Parantaa dorsifleksiota vähentäen kompastumisriskiä
- Mahdollista pukea ja riisua yhdellä kädellä
- Erikseen tilattavissa jalkaterämansetti
- Sopii käytettäväksi ilman kenkää jalkaterämansetin avulla
- Kaksi eri kokoa, joista saa leikattua ohjeiden mukaisesti sopivan

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään nilkan ympäryksen mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Nilkan ympäryys
RFU50001	S/M	18–25 cm
RFU50002	L/XL	26–33 cm





SPORLASTIC | 07077

Neurodyn® Classic

Elastinen peroneus-nilkkatuki

Käyttöaiheet

Peroneuspareesi, erityisesti lievänä tai kohtalaisena (vahvuus 2–4)

Ominaisuudet

- Tukee jalkaa ja nilkkaa ylös dorsifleksio suuntaan ja parantaa näin kävelyä
- Parantaa jalan ja nilkan asentotuntoa sekä korjaa jalan supinaatiota ja plantaarifleksiota
- Vakauttaa nilkkaniveltä ja estää nyrjähdykset
- Kiinnitys tarralla
- Yhdellä kädellä puettavissa sormilenkin avulla
- 8-remmit joustavaa materiaalia
- Nilkan lateraalisivulla jäykkä remmi tukee nilkkaa lateraalisilta nyrjähdyksiltä
- Väri musta, saatavana myös beige

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään nilkan kapeimman kohdan ympärysmittan mukaan.

Tuotekoodi	Puoli	Koko	Nilkan ympäryys
07077-1-9000-1	vasen	1	< 19 cm
07077-1-9000-2	vasen	2	19-21 cm
07077-1-9000-3	vasen	3	21-23 cm
07077-1-9000-4	vasen	4	23-25 cm
07077-1-9000-5	vasen	5	25-27 cm
07077-2-9000-1	oikea	1	< 19 cm
07077-2-9000-2	oikea	2	19-21 cm
07077-2-9000-3	oikea	3	21-23 cm
07077-2-9000-4	oikea	4	23-25 cm
07077-2-9000-5	oikea	5	25-27 cm

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset

Nilkka- ja jalkatuet

Jalkaterä ja kantapää



Koko- ja tilaustiedot
Koko määritetään
kengän koon mukaan.

ENOVIS / AIRCAST | 09AX, 09BX

AirHeel / AirHeel with Stabilizers

Tuki kantapää- ja akilleskipuihin

Käyttöaiheet

Plantaarifaskiitti, akillestendiniitti, kantapääkivut

Ominaisuudet

- Kaksi toisiinsa yhdistettyä ilmatyynyä, toinen kantapään etupinnalla ja toinen akillesjänteen ympärillä, tuottavat joka askeleella jaksottaisen kompression. Parantaa verenkiertoa, vähentää turvotusta ja arkuutta.
- Kantapään etupinnalla oleva tukityyny toimii hyvänä iskunvaimentimena ja tukee jalan pitkittäistä holvirakennetta
- Helppo pukea, puriste säädettävissä nilkkaremmillä
- Kevyt ja hengittävä Breath-O-Pren -materiaali
- AirHeel with Stabilizer -mallissa on lisäksi sivuilla nilkan ja jalkaterän sivusuuntaista tukevuutta parantavat vahvikkeet
- Puolieroton

AirHeel Tuotekoodi	AirHeel with Stabilizers Tuotekoodi	Koko	Kengän koko
09AS	09BS	S	< 39
09AM	09BM	M	39–42
09AL	09BL	L	> 42



Tuotekoodi	Koko	Nilkan ympärys
07902-0-9003-1	1	< 21 cm
07902-0-9003-2	2	21–24 cm
07902-0-9003-3	3	> 24 cm

SPORLASTIC | 07902

Plantaarifaskiittinauha

Tuki plantaarifaskiittiin ja akillestulehduksiin

Käyttöaiheet

Plantaarifaskiitti, akillestendiniitti, kantapääkivut, luupiikki

Ominaisuudet

- Jalkapohjan alta, kantaluun edestä kiristettävä tukiremmi tukee kantaluvon kiinnityskohtaa, jossa tulehdustila plantaarifaskiitin yhteydessä on
- Tukiremmi tukee pitkittäistä jalkaholvia ja vähentää kantaluvon venytystä askeleen aikana.
- Nilkan ympärille kiristettävässä nilkkamansetissa on akilleksen sivuilla silikoniset tukityynyt antamassa tukea ja vähentämässä turvotusta
- Parantaa verenkiertoa ja vähentää arkuutta
- Ohjaa jalan linjausta, tukee jalan pitkittäistä holvirakennetta
- Helppo pukea, remmin kireys säädettävissä
- Mahdollistaa nilkan vapaan dorsi- ja plantaarifleksion
- Menee pieneen tilaan

Koko- ja tilaustiedot

Tuote on puolieroton, koko määritetään nilkan ympärysmittan mukaan.



Tuotekoodi	Koko	Kengän koko
82-04S	S	< 36
82-04M	M	35–42
82-04L	L	41–46

ENOVIS / AIRCAST | 82-04

ActyToe

Niveellinen vaivasenluutuki

Käyttöaiheet

Hallux valgus (vaivasenluu), lievä tai kohtalainen isovarpaan virheasento, eikkauksen jälkeen

Ominaisuudet

- Lievittää kipua ja ylläpitää nivelen liikelaajuutta
- Isovarpaan lihakset pystyvät työskentelemään oikean nivelen ollessa oikeassa lähtöasennossa
- Tuessa on kaksi vaihdettavissa olevaa isovarpaan lastaa: 0° ja 10° abduktiokulmalla
- Tuessa on nivel, joka mahdollistaa isovarpaan tyven dorsi- ja plantaarifleksion
- Nivelen liikelaajuus on rajoitettavissa: 30° dorsi- ja plantaarifleksioon tai lukittavissa suoraksi
- Sisäpehmuste lisää käyttömukavuutta ja suojaa vaivasenluuta
- Säädetty remmi jalkapöydän ympäri
- Ohut rakenne mahdollistaa käytön kengän kanssa

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään kengän koon mukaan.



Tuotekoodi	Koko	Kengän koko
82-05S	S	< 36
82-05M	M	35–42
82-05L	L	41–46

ENOVIS / AIRCAST | 82-05

ActyToe-yölasta

Vaivasenluutuki yökäyttöön

Käyttöaiheet

Hallux valgus (vaivasenluu), lievä tai kohtalainen isovarpaan virheasento, leikkauksen jälkeen

Ominaisuudet

- Anatomisesti muotoiltu jäykkä lasta
- Hengittävä ja kevyt materiaali
- Säädetty ja pehmeät remmit
- Lievittää kipua
- Ylläpitää liikelaajuutta nivelessä ja jänteissä
- Sopii vasempaan ja oikeaan jalkaan

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään kengän koon mukaan.

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset

Nilkka- ja jalkatuett

Jalkaterä ja kantapää



ORTHOCARE | 7191

Hallux Valgus Combo

Joustava, kietaistava vaivasenluutuki
päivä- ja yökäyttöön

Käyttöaiheet

Vaivasenluun konservatiivinen tai
postoperatiivinen tuenta

Ominaisuudet

- Tuki ohjaa isovarpaan linjaa suoremmaksi
- Voidaan käyttää niin päivä- kuin yökäytössä
- Tuki on yksinkertainen ja tehokas
- Helppokäyttöinen, kevyt ja miellyttävä
käyttää niin kengässä kuin ilman
- Remmi on elastinen ja kiinnitys tarralla
- Vasen ja oikea erikseen

Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi	Puoli	Koko
7191L	vasen	1 koko
7191R	oikea	1 koko



SCHEIN | 9876200

Novaped Sport

Laadukas valmistukipohjallispari

Käyttöaiheet

Jalan pitkittäisholvin löysyys/madaltuma (lattajalka), jalan
ylipronaatio, poikittaisen jalkaholvin löysyys/madaltuma,
päkiävaivat (mm. mortonin syndrooma), plantaarifaskiitti,
akillesvaivat, polven etuosan kiputilat

Ominaisuudet

- Tukee jalkaa ja jalkaterää (pitkittäis- ja poikittaisholvia)
- Jakaa painetta jalkapohjassa tasaisemmin ja antaa
lisäpehmustetta kantapäälle ja päkiälle
- Mahdollista leikata saksilla sopivan kokoiseksi

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään kengän koon mukaan.

Tuotekoodi	Kengän koko
987620035	35
987620036	36
987620037	37
987620038	38
987620039	39
987620040	40
987620041	41
987620042	42
987620043	43
987620044	44
987620045	45
987620046	46
987620047	47
987620048	48



SCHEIN | 989899000

Skin Hallux

Tukipohjallinen isovarpaan kulumaan ja jäykkyyteen

Käyttöaiheet

Hallux rigidus, Hallux valgus, sovarpaan kipu ja nivelrikko, päkiän alueen kipu, jalan madaltuneet holvirakenteet, lattajalka

Ominaisuudet

- Suunniteltu erityisesti käyttäjälle, jolla on isovarpaan nivelrikko ja sen jäykkyys aiheuttaa ongelmia
- Pohjallisessa on pitkä jousimainen jäykiste, joka tukee isovarpaan tyveä ja toimii jousimaisesti ponnistusvaiheessa
- Pitkittäisen ja poikittaisen jalkaholvin tuennat tukevat ja ohjaavat jalkaa neutraalilinjaan
- Lasikuituinen vahvike pitkittäisholvin tuennalle
- Miellyttävä pehmeä pintamateriaali
- Päällinen kohokuvioitu OnDry-materiaali: hengittävä, nopeasti kuivuva ja hajuja estävä
- Lämpömuovattavissa
- Ohut rakenne, kokonaispaksuus 4 mm, mahtuu hyvin jalkineisiin

Koko- ja tilaustiedot

Koot 36–46. Koko määrittyy kengän koon mukaan.



SCHEIN | 989820000

Skin Calcaneus

Erityisesti kantakipuihin suunniteltu tukipohjallinen

Käyttöaiheet

Plantaarifaskiitti, kantapään kiputilat, päkiän alueen kipu, jalan madaltuneet holvirakenteet (pitkäinen tai poikittainen jalkaholvi), lattajalka

Ominaisuudet

- Erityissuunniteltu rakenne tukee ja keventää kantapään aluetta: pohjallisen kantapääosaan, sen etu- ja sisäsvululle on tehty erillinen kevennys plantaarijäljenteelle
- Pitkittäisen ja -poikittaisen jalkaholvin tuennat tukevat ja ohjaavat jalkaa yli-rasitusoireissa
- Lämpömuovattava (tarvittaessa)
- Miellyttävät materiaalit → pehmeän tuntuinen tuenta
- Lasikuituinen vahvike pitkittäisholvin tuennalle
- Päällinen kohokuvioitua hengittävää OnDry-materiaalia: hengittävä, nopeasti kuivuva, hajuja estävä
- Pohjallisen kokonaispaksuus kantapään alla 7 mm ja päkiällä 4,5 mm

Koko- ja tilaustiedot

Koot 36–47. Koko määrittyy kengän koon mukaan.



Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset



MEDIROYAL | MR1500

MOW®-pronaatiopohjallinen

Ylipronatoivan askeleen korjaukseen

Käyttöaiheet

- Sisäsyrräpainotteinen askel eli ylipronatoiva kantapää ja jalkaterä kävellessä
- Ylipronaation kompensointi ja jalkaterän ja nilkan vakauttaminen
- Ylipronaatioon liittyvä vaivat: plantaarifaskiitti, akillesvaivat, säären penikkavaivat/periostiitti, polven toispuoleinen kuluma – erityisesti polven ulkosivun kuluma (lateraalinen), johon liittyy yleensä jalkaterän ylipronaatio ja pihtipolvisuus, polvilumpion ja polven etuosan kiputilat ja polvilumpion epävakausta, olven eturistisidevamman (ACL) ja -operaation jälkeinen kuntoutus.

Ominaisuudet

- MOW-supinaatiopohjallinen on valmistettu kestävästä EVA-materiaalista
- Pohjallisessa on kahta eri EVA-kovuutta
- Kantapään alla on iskuja vaimentava pehmuste Poron-materiaalista
- Pohjallinen on pinnoitettu erittäin pitävällä ja miellyttävällä polyamid-pinnoitteelle
- Tukipohjallisessa on tukikiilaus jalan etuosassa sisäsivulla. Sisäsivulta pohjallinen on kiilamaisesti 5-7mm (riippuen pohjallisen kokoluokasta) paksumpi kuin ulkosivulta.
- Pohjallinen on varustettu ESD-toiminnolla (sähköstaattinen purkaus), joka mahdollistaa pohjallisen käytön myös teollisuus- ja sairaalaympäristössä yhdessä ESD-sertifioitujen kenkien kanssa.
- Pohjalliseen on hankittavissa lisäksi MR1600 lisätuennan lisäämiseksi jalan etuosalle
- MOW pronaatiopohjallista kannattaa käyttää kengissä, josta irtoaa oma välipohjallinen pois. Näin tila pohjalliselle riittää.
- MOW pronaatiopohjallista voit tarvittaessa muotoilla kenkään sopivaksi pohjallisen kärjestä saksilla lyhentäen ja kaventaen.

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään kengän koon mukaan. Paketti sisältää pohjallisparin molempiin jalkoihin.

Jos olet kahden koon välillä, valitse isompi koko. Pohjallisen kärkeä voi tarvittaessa leikata ja muotoilla kenkään sopivaksi.

Tuotekoodi	Kengän koko
MR1500-34-35	34-35
MR1500-36-37	36-37
MR1500-38-39	38-39
MR1500-40-41	40-41
MR1500-42-43	42-43
MR1500-44-45	44-45
MR1500-46-47	46-47

MEDIROYAL | MR1700



LOW[®]-supinaatiopohjallinen

Ulkosyrjävoittoisen askeleen korjaukseen

Käyttöaiheet

- Ulkosyrjäpainotteinen askel eli supinoiva kantapää ja jalkaterä kävellessä
- Polven sisäsivun kiputila ja kuluma sekä siihen mahdollisesti sopiva länkisäärisyys
- Nilkan nyrjähdysten ja jalkaterän ulkosivun vammojen kuntoutus ja uusien vammojen ennaltaehkäisy
- Etujalan varus-virheasennon korjaaminen
- Jäykän ja korkean jalkaterän iskunvaimennuksen parantaminen

Ominaisuudet

- LOW supinaatiopohjallinen on valmistettu kestävästä EVA-materiaalista
- Kantapään alla on iskuja vaimentava pehmuste Poron-materiaalista
- Tukipohjallinen on vahvistettu kantapäästä ja keskiosasta thermoplast-materiaalilla, jotta pohjallisen tukevuus riittää toimittamaan tarvittava tuki ja ohjaus
- Tukipohjallisessa on tukikiilaus jalan etuosassa päkiän ulkosivulla.
- Ulkosivulta pohjallinen on kiilamaisesti 5–7mm (riippuen pohjallisen kokoluokasta) paksumpi kuin sisäsivulta isovarpaan tyveltä
- Pohjalliseen on tarvittaessa hankittavissa lisäkiilapala (MR1600), mikäli tukea ja ohjausta tarvitaan lisää
- LOW-supinaatiopohjallista kannattaa käyttää kengissä, josta irtoaa oma välipohjallinen pois (näin tila riittää)
- LOW-supinaatiopohjallista voit tarvittaessa muotoilla kenkään sopivaksi pohjallisen kärjestä saksilla l yhentäen ja kaventaen

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään kengän koon mukaan. Paketti sisältää pohjallisparin molempiin jalkoihin.

Jos olet kahden koon välillä, valitse isompi koko. Pohjallisen kärkeä voi tarvittaessa leikata ja muotoilla kenkään sopivaksi.

Tuotekoodi	Kengän koko
MR1700-34-35	34-35
MR1700-36-37	36-37
MR1700-38-39	38-39
MR1700-40-41	40-41
MR1700-42-43	42-43
MR1700-44-45	44-45
MR1700-46-47	46-47

Kaula

Oika • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset

Nilkka- ja jalkatuet

Jalkaterä ja kantapää



Koko- ja tilaustiedot

Koko: S-L, koko määrittyy kengän koon mukaan.

MEDIROYAL | MR1401

Kantakiila, silikoninen

Kantakiila kantapään ja akillesjänteen keventämiseen

Käyttöaiheet

- Kantapään, akillesjänteen ja pohkeen lihasten kiputilat
- Kantapään iskunvaimennuksen lisääminen
- Akillesjänteen ja pohkeen rasituksen keventäminen

Ominaisuudet

- Kiilan korkeus 6 mm, kiila on normaalia hieman pidempi nostaen kantapäää enemmän
- Pakkauksessa 2 kappaletta kantakiiloja
- Materiaali: viskoelastinen polymeeri tarjoaa parhaan yhdistelmän iskunvaimennusta, pehmeyttä ja vakautta
- Kiilan alapinta on tahmea, jolloin paikallaanpysyvyys kengässä on hyvä

Tuotekoodi	Koko	Kengän koko
MR14010004	S	35–39
MR14010005	M	40–42
MR14010006	L	43–46



Koko- ja tilaustiedot

Koko: S-L, koko määrittyy kengän koon mukaan.

MEDIROYAL | 375XX

Kantakiila, kova

Kantakiila alaraajojen pituuspuolieron tasaamiseen ja akilleskuntoutukseen

Käyttöaiheet

- Alaraajojen pituuspuoliero
- Akillesjänteen kiputilat ja jännevamman kuntoutus

Ominaisuudet

- Tasaa alaraajojen pituuseroa
- Keventää akillesjänteen kuormitusta
- Saatavilla 4 mm sekä 10 mm korkuisena
- 2 kpl / paketti
- Materiaali: EVA
- Kiilassa kaksipuoleinen teippi, jolla kiilan saa tarvittaessa kiinnitettyä paikoilleen

Tuotekoodi	Kiilan korkeus	Koko	Kengän koko
37562	4 mm	S	35–39
37563	4 mm	M	40–42
37565	4 mm	L	43–46
37572	10 mm	S	35–39
37573	10 mm	M	40–42
37575	10 mm	L	43–46



ORTHOCARE | 7120

Heel Cup

Käyttöaiheet

Kantapääkivut (plantaarifaskiitti, luupiikki, kantapään rasvapatjan ohentuma), akillesjänteen tulehdus

Ominaisuudet

- Antaa iskunvaimennusta ja pehmeyttä kantapäälle sekä vähentää painetta luupiikissä
- Sininen alue erityisen iskua vaimentavaa materiaalia
- Anatominen muotoilu ja korkealaatuinen materiaali
- Paketissa kaksi kantapehmustetta

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään kengän koon mukaan

Tuotekoodi	Koko	Kengän koko
7120-S	S	36-38
7120-M	M	39-41
7120-L	L	42-44

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset

Nilkka- ja jalkatuet

Jalkaterä ja kantapää



ORTHOCARE | 7110

Silicon Insole

Käyttöaiheet

Kantapääkiput, jalkapohjan paineen tasaus, plantaarifaskiitti, jalkapohjan rasvapatjan ohenemat / vauriot

Ominaisuudet

- Antaa iskunvaimennusta ja jakaa painetta tasaisemmin jalkapohjalle
- Tukipohjallisen siniset osat erityisen iskuavaimentavaa materiaalia
- Anatomisesti muotoiltu
- Ilmanvaihtosysteemi
- Viskoelastinen silikonimateriaali

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään kengän koon mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Kengän koko
7110-S	S	36-38
7110-M	M	39-40
7110-L	L	41-42
7110-XL	XL	43-44
7110-XXL	XXL	45-46



SPORLASTIC | 07905

Metarso®

Jalan poikittaisen holvikaaren ja jalkapöydän tuki

Käyttöaiheet

Päkiäkiput liittyen jalan poikittaisen holvin madaltumiseen ja jalkaterän leviämiseen, Mortonin syndrooma, metatarsaaliluiden II-V distaalipään kiputilat ja kovettumat

Ominaisuudet

- Tuki vahvistaa jalan poikittaista holvikaarta
- Vähentää painetta metatarsaaliluiden II-V distaalipäältä
- Poikittaisen jalkaholvin tukipelotin paikkaa voi vaihtaa, kiinnitys tarralla
- Tuki kiinnitetään ja tuen antama kompressio säädetään tarroilla
- Anatominen muotoilu, isovarpaan tyvi neulottu muotoon
- Paketissa kaksi tukea, vasempaan ja oikeaan jalkaan

Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi	Koko	Päkiän ympäry
07905-0-9000-1	1	< 19 cm
07905-0-9000-2	2	19-21 cm
07905-0-9000-3	3	22-24 cm
07905-0-9000-4	4	25-27 cm



ENOVIS / AIRCAST | 82-06

ActyToe Lift

Poikittaisen jalkaholvin tuki

Käyttöaiheet

Madaltunut poikittainen jalkaholvi, Metarsalgia, Morton neurooma/ Mortonin syndrooma, Hallux valgus

Ominaisuudet

- Nostaa poikittaista jalkaholvia
- Tukee ja kokoaa laskeutunutta ja levinnyttä jalkaterää
- Lievittää kipua
- Säädettävä remmi jalkapöydän ympäri
- Pehmustettu tukityyny poikittaiselle jalkaholville
- Ohut rakenne mahdollistaa käytön kengän kanssa
- Lateksiton

Koko- ja tilaustiedot

Yhden koon tuki. Sopii vasempaan ja oikeaan jalkaan.

Tuotekoodi	Koko
82-06	1 koko



FIOR&GENTS | F01100

Mailand

Hoitojalkine jalan etuosan operaatioiden ja haavaumien jälkeen

Käyttöaiheet

- Postoperatiivisesti varpaiden tai jalkaterän operaatioiden jälkeen: Hallux valgus, osteotomiat, vasaravarpaat
- Trauman jälkeiset jalan etuosan haavat jalkapohjassa ja diabeteksen aiheuttamat haavaumat jalan etuosassa

Ominaisuudet

- Kengän ulkopohja on jäykkä ja siinä on 8° etukevennyskulma
- Kengän pohja on jaettu suhteessa 60 % / 40 % (etukevennys alkaa 60 % kohdalla jalan pituudesta, askeleen tukivaihe päättyy/kevenee 60 %:n kohdalla)
- Pohjan jäykkä rakenne ja muoto vähentävät painetta ja liikettä päkiässä immobilisoiden päkiää ja edistään paranemista
- Helppo pukea ja säätää, tarrakiinnitysten avulla ja kengän pohjalliseen voi tehdä kevennyksiä tai käyttää omaa tukipohjallista
- Varvassuoja saatavissa säänsuojaksi, puolieroton

Koko- ja tilaustiedot

Koko määrittäyty kengän koon mukaan.

* Lisävarusteena saatavan varvassuojan koko määrittäyty hoitokengän koon mukaan.

Tuotekoodi	Lisävaruste	Kengän koko
FO9621	Varvassuoja	XS-XXL*

Tuotekoodi	Koko	Kengän koko	Sisäpohjan päkiäleveys	Sisäpohjan pituus
F01100-XS	XS	31-33	8,7 cm	22 cm
F01100-S	S	34-36	9,2 cm	24 cm
F01100-M	M	37-39	9,6 cm	26 cm
F01100-L	L	40-42	10,0 cm	28 cm
F01100-XL	XL	43-45	10,7 cm	30 cm
F01100-XXL	XXL	46-48	11,8 cm	32 cm

Nilkka- ja jalkatuet

Jalkaterä ja kantapää



Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään kengän koon mukaan.

* Lisävarusteena saatavan varvassuojan koko määritetään hoitokengän koon mukaan.

Tuotekoodi	Lisävaruste	Kengän koko
FO9621	Varvassuoja	XS-XXL*



Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään kengän koon mukaan.

* Lisävarusteena saatavien varvassuojan ja kantasuojan koko määritetään hoitokengän koon mukaan.

Tuotekoodi	Lisävaruste	Kengän koko
FO9121	Varvassuoja	XS-XL*
O9320	Kantasuoja	XS-XL*

FIOR&GENTS | TS6100

Amsterdam

Hoitojalkine jalan etuosan operaatioiden ja haavaumien jälkeen

Käyttöaiheet

Postoperatiivisesti varpaiden tai jalkaterän operaatioiden jälkeen (Hallux valgus, osteotomiat, vasaravarpaat), trauman jälkeiset jalan etuosan haavat jalkapohjassa, diabeteksen aiheuttamat haavaumat jalan etuosassa

Ominaisuudet

- Kengän ulkopohja on jäykkä, paksuus 30 mm
- Pohjan jäykkä rakenne ja keinupohja vähentävät painetta ja liikettä päkiässä immobilisoiden päkiää ja edistään paranemista
- Kenkä on helppo pukea ja säätää tarrakiinnitysten avulla
- Kengän pohjalliseen voi tehdä kevennyksiä tai käyttää omaa tukipohjallista
- Varvassuoja saatavissa säänsuojaksi, puolieroton

Tuotekoodi	Koko	Kengän koko	Sisäpohjan päkiäleveys	Sisäpohjan pituus
TS6100-XS	XS	31-33	86 mm	220 mm
TS6100-S	S	34-36	91 mm	240 mm
TS6100-M	M	37-39	96 mm	260 mm
TS6100-L	L	40-42	101 mm	280 mm
TS6100-XL	XL	43-45	105 mm	300 mm
TS6100-XXL	XXL	46-48	114 mm	320 mm

FIOR&GENTS | FO2120

Marseille

Hoitojalkine jalan takaosan vammojen kuntoukseen

Käyttöaiheet

Trauman jälkeiset haavat jalkapohjan takaosassa/kantapäässä, postoperatiivisesti jalan takaosan vammojen jälkeen, esim. luupiikki

Ominaisuudet

- Kengän ulkopohja on jäykkä, paksuus 30 mm, takaa kevennetty suhteessa 20 % / 80 % ja 5° kallistuskulma eteen
- Pohjan jäykkä rakenne ja muoto vähentävät painetta kantapäässä edistään paranemista
- Mahdollistaa varaamisen jalalle kyynärsauvojen avulla, mikä on tärkeää nopean kuntoutumisen kannalta
- Helppo pukea ja säätää tarrakiinnitysten avulla
- Varvassuoja ja kantasuoja saatavissa säänsuojaksi, puolieroton

Tuotekoodi	Koko	Kengän koko	Sisäpohjan päkiäleveys	Sisäpohjan pituus
FO2120-S	S	35-37	88 mm	245 mm
FO2120-M	M	38-40	92 mm	260 mm
FO2120-L	L	41-42	98 mm	275 mm



ENOVIS | 82-0247

PodaPro

Hoitojalkine jalan etuosan operaatioiden ja haavaumien jälkeen

Käyttöaiheet

- Postoperatiivisesti varpaiden tai jalkaterän operaatioiden jälkeen: Hallux valgus, osteotomiat, vasaravarpaat
- Trauman jälkeiset jalan etuosan haavat jalkapohjassa ja diabeteksen aiheuttamat haavaumat jalan etuosassa

Ominaisuuudet

- Säädettyä tarranauha
- Saumaton, pehmustettu kantakappa
- Kulutusta kestävä pohja

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään kengän koon mukaan.

Tuotekoodi	Kengän koko
82-0247-1	< 37
82-0247-2	37-39
82-0247-3	39-43
82-0247-4	43-45
82-0247-5	> 45



ENOVIS | 82-0042

Podalux II

Hoitojalkine jalan etuosan vammojen kuntoukseen

Käyttöaiheet

- Postoperatiivisesti varpaiden tai jalkaterän operaatioiden jälkeen: Hallux valgus, vasaravarpaat
- Vamman jälkeiseen konservatiiviseen hoitoon, esim. metatarsaalimurtumat

Ominaisuuudet

- Suojaava jalkine, joka pitää jalan, varpaat ja jalkaterän etuosan hyvässä asennossa kuntoutuksen ajan
- Leveä, tukeva ja luistamaton pohja, joka tekee siitä erityisen vakaan
- Irrotettava jäykiste kengän ulkopohjassa, voidaan poistaa kuntoutuksen edetessä
- Vuorattu hengittävällä mikroverkkotekstiilillä, mikä tekee siitä käytössä miellyttävän
- Helppo pukea ja säätää kahden tarrakiinnittimen avulla

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään kengän koon mukaan.

Erillinen varvassuoja tilattavissa kokoluokittain tuotekoodilla 82-0043.

Tuotekoodi	Koko	Kengän koko
82-0042-1	S	35-36
82-0042-2	M	37-38
82-0042-3	L	39-40
82-0042-4	XL	41-42
82-0042-5	XXL	43-45
82-0042-6	XXXL	> 45

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset

Lastentuet

Ylävartalo

- 155** Miami Jr
Cervilastic Kids
- 156** Velpocare Kids
Healthcare Bear Arm Sling
- 157** S.O.T lepo-ortoosi
- 158** Selection lasten peukalotuki
Manu-Hit Kids
- 159** Manex Reuma Soft Pediatric
Manex Reuma Pollus Pediatric
- 160** Manucare Kids

Alavartalo

- 161** Rebound Post-Op
Medi ROM Kidz
- 162** Jet-kovaraamituki
Sivukiskollinen polvituki
- 163** Palumbo-patellatuki
Kevyt polvituki
- 164** MiniTrax-walker
- 165** Air-Stirrup Classic
Kevyt nilkkatuki





ÖSSUR | MJ-PX

Miami Jr®

Lasten tukeva kaulatuki

Käyttöaiheet

Postoperatiivinen ja -traumaattinen hoito, stabiilit kaularangan murtumat, kaularangan spondyliitti tai spondyloosi, kaularangan nivelreuma

Ominaisuudet

- Innovatiivinen kaulatuki 0–12-vuotiaille lapsille
- Markkinoiden ainoa tukeva kaulatuki, joka ottaa huomioon lasten ja aikuisten anatomiset erot
- Ihoystävällinen Sorbatex™-pehmuste suojaa ihoa pitkäaikaisessa käytössä
- Läpinäkyvä röntgen-, MR- ja CT-kuvissa

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään lapsen iän mukaan.

Tuotekoodi	Kaulatuki + vaihtopehmuste	Koko
MJ-P0	MJR-P0	0-6 kk
MJ-P1	MJR-P1	6-24 kk
MJ-P2	MJR-P2	2-6 v
MJ-P3	MJR-P3	6-12 v



SPORLASTIC | 8273X

Cervilastic® Kids

Lasten anatomisesti muotoiltu pehmeä kaulatuki

Käyttöaiheet

Kaularankaoireyhtymä, kaularangan yliliikkuvuus, reumaattiset vaivat, niskalihasten ylijännitys, Whiplash-vammat

Ominaisuudet

- Tukee kaularankaa ja rentouttaa lihaksia
- Anatominen muotoilu
- Miellyttävä, laadukas ja pehmeäkö materiaali
- Tarranauhakiinnitys

Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi	Korkeus	Pituus
82734	4,5 cm	46 cm
82735	6,5 cm	46 cm

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset



ORTHOCARE | 1749

Vellocare Kids

Tukeva lasten kantoside vartaloremmillä

Käyttöaiheet

Olkapään tuenta vamman jälkeen: olkapään sijoiltaanmeno, AC-nivelen sijoiltaanmeno, lapaluummurtumat (konservatiivinen ja postoperatiivinen), olkaluun pään murtumat (konservatiivinen ja postoperatiivinen). Leikkauksen jälkeinen tuenta.

Ominaisuudet

- Tukee olkapään vamman jälkeen
- Leveä vartalohihna lisää tukea
- Vartalonauhan ja molemmin puolin hartioita tulevien hartiaremmien avulla yläraajan paino saadaan tasoitettua laajalle alueelle
- Mukavat, säädettävät olkaimet
- Laadukas, kestävä ja pehmeä materiaali

Koko- ja tilaustiedot

Koot S-M. Koko on määritelty lapsen iän mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Lapsen ikä	Tuen pituus
1749-S	S	3–6 vuotta	13 cm
1749-M	M	6–10 vuotta	14 cm



ENOVIS | 79-9913X

Healthcare Bear Arm Sling

Lasten kantoside

Käyttöaiheet

Lasten olkapään ja olkapään seudun vammojen ja operaatioiden jälkeinen tuenta

Ominaisuudet

- Materiaali puuvilla ja polyesteri
- Pikakiinnitys ja tarrasäätö
- Voidaan käyttää kipsin kanssa

Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi	Syvyys x pituus	Koko
79-99132	11,5 × 28 cm	vauva / XS
79-99133	16,5 × 33 cm	lapsi / S



CAMP | 28710

S.O.T lepo-ortoosi

S.O.T (Smart Orthotic Treatment) lepo-ortoosi on tarkoitettu spastisen tai pareettisen käden liikkuvuuden ylläpitämiseen tai lisäämiseen.

Käyttöaiheet

Halvaus, CP-vamma, reumaattinen artriitti, radiaalinen pareesi, lihasdystrofia, ödeema, Plexus-vaurio

Ominaisuudet

- Modernin näköinen, rakenteeltaan linjakas ja kevyt
- Alumiininen runko, joka muotoiltavissa haluttuun asentoon
- Matalan profiilin ja materiaalin ansiosta se sopii hyvin vaatteiden alle
- Ranteen lisätukemisessa voidaan käyttää joustamatonta lisänauhaa
- Toimitetaan lepoasentoon asennettuna: helpottaa särkyä, rentouttaa kättä sekä antaa hyvän biomekanisen asennon ennaltaehkäisten sormien koukistajalihasten kontraktuuraa
- Voidaan muotoilla nk. kuntoutusasentoon
- Anatominen muotoilu tukee tärkeitä thenar-lihaksia sekä peukalon CMC- ja MCP-niveliä, mitkä ovat erityisen tärkeitä edellä mainituille kohderyhmille, sillä peukalolla on taipumus loitontaa CMC-niveltä ja yliojentaa MCP-niveltä

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään kämmenen leveyden ja pituuden mukaan.

Tuotekoodi Vasen	Tuotekoodi Oikea	Koko	Kämmenen leveys	Kämmenen pituus
287101008	287102008	XXXS	5,5 cm	≤ 12 cm
287101009	287102009	XXS	≤ 6,5 cm	≤ 14 cm
287101010	287102010	XS	≤ 7,5 cm	≤ 16 cm

Lisäosat

Tuotekoodi	Kuvaus	Puoli	Koko	Leveys	Korkeus
287110009	MCP-kiila	puolieroton	XXS	65 mm	10 mm
287110011	MCP-kiila	puolieroton	S	75 mm	15 mm
28712	Sormien erottelija	puolieroton	lapset		
28713	Lisänauha	puolieroton	XXXS-XS		
28714	Lisäsuojus	vas/oik	XXXS-XS		

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset



CAMP | 35300

Selection® lasten peukalotuki

Lasten pehmeä ja mukava peukalotuki

Käyttöaiheet

Plexus brachialis vaurioista johtuvat (Erbin pareesi) käden alueen virheasennot, CP-vammaan liittyvä spastisuus, reumaattiset ongelmat

Ominaisuudet

- Tarkoitettu parantamaan peukalon toiminnallista asentoa sekä helpottamaan tulehduksista ja reumasairauksista aiheutuvaa kipua
- Moderni, ihoa myötäilevä Selection-materiaali, joka antaa ihon hengittää
- Peukalonauhaa voidaan säätää ja sen reunat ovat pehmeät
- Materiaalia voi muotoilla saksilla parhaan istuvuuden saavuttamiseksi

Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi Vasen	Tuotekoodi Oikea	Koko	Ranteen ympäryys	Kämmenen pituus
353001009	353002009	XXS	8,5–11 cm	5–6 cm
353001010	353002010	XS	10–12,5 cm	6–7 cm
353001011	353002011	S	11,5–14 cm	7–8 cm
353001012	353002012	M	12–15,5 cm	8–9 cm
353001013	353002013	L	14–16,5 cm	8–9 cm



SPORLASTIC | 87035

Manu-Hit® Kids

Laadukas tukeva yhden koon rannetuki lapsille

Käyttöaiheet

Akuutit ranteen venähdysvammat, ranteen epävakaus, kipsihoidon jälkeinen ranteen tuenta, reumaattiset kivut, kämmenen karpaaliluiden vammat

Ominaisuudet

- Tuki antaa vahvan tuennan ranteelle ja kämmenelle
- Vain yksi kokoluokka
- Anatomisesti muotoiltu alumiininen tukilasta kämmenpuolella. Lisäksi kevyempi alumiininen tukilasta kämmenselässä. Tukilastat muotoiltavissa ja poistettavissa.
- Tarranauhakiinnitys: leveä rannenuha ranteella luo vakautta, kämmenselkään tulevan tarrakiinnityksen avulla kämmenen tuenta on säädettävissä
- Tuki jättää peukalon ja sormien liikkeen vapaaksi
- Miellyttävän pehmeä, laadukas ja nykyaikainen materiaali

Koko- ja tilaustiedot

Yksi koko, oikea ja vasen.

Koko määritetään ranteen ympärysmittaan mukaan.

Tuotekoodi	Puoli	Ranteen ympäryys	Tuen pituus
87035-2	oikea	12–14 cm	17 cm
87035-1	vasen	12–14 cm	17 cm



Koko- ja tilaustiedot
Koko määritetään
ranteen ympärysmittalla.



Koko- ja tilaustiedot
Koko määritetään
ranteen ympärysmittalla.

MEDIROYAL | MR2920

Manex Reuma Soft Pediatric

Lasten laadukas rannetuki

Käyttöaiheet

Ennaltaehkäistä virheasentoja, kompensoida toimintakyvyn puutteita, keventää jänneiden rasitusta, vähentää kipua, keventää nivelrasitusta reumassa

Ominaisuuudet

- Pehmeä ja hengittävä Soft-Tex -materiaali
- Anatominen muotoilu tukee rannetta ja kämmentä
- Alumiininen muotoiltu volaarilasta
- Säädettävä peukalotarra

Tuotekoodi Vasen	Tuotekoodi Oikea	Koko	Ranteen ympäryys
MR02920100309	MR02920200309	XS	10–11 cm
MR02920100409	MR02920200409	S	11–13 cm
MR02920100509	MR02920200509	M	13–14 cm
MR02920100609	MR02920200609	L	14–15 cm
MR02920100709	MR02920200709	XL	15–17 cm

MEDIROYAL | MR2921

Manex Reuma Pollus Pediatric

Lasten laadukas peukalo-rannetuki

Käyttöaiheet

Tukee peukaloa toiminnalliseen asentoon, mahdollistaa peukalo-otteen, ennaltaehkäisee virheasentoja, kompensoi toimintakyvyn puutteita, keventää jänneiden rasitusta, vähentää kipua, keventää nivelrasitusta reumassa

Ominaisuuudet

- Pehmeä ja hengittävä Softtex-materiaali
- Anatominen muotoilu tukee rannetta ja kämmentä
- Alumiininen muotoiltu volaarilasta ja ohut peukalolasta lämpömuovista
- Säädettävä peukalotarra

Tuotekoodi Vasen	Tuotekoodi Oikea	Koko	Ranteen ympäryys
MR02921100309	MR02921200309	XS	10–11 cm
MR02921100409	MR02921200409	S	11–13 cm
MR02921100509	MR02921200509	M	13–14 cm
MR02921100609	MR02921200609	L	14–15 cm
MR02921100709	MR02921200709	XL	15–17 cm

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilikka • Jalka

Lapset



ORTHOCARE | 4519

Manucare Kids

Lasten muotoiltava rannetuki lisäremmillä

Käyttöaiheet

Akuutit ranteen venähdysvammat, ranteen epävakaus, kipsihoidon jälkeinen ranteen tuenta, reumaattiset kivut, ranteen pehmytkudosvammat

Ominaisuudet

- Laadukas ja miellyttävä materiaali
- Helppokäyttöinen, käytännöllinen tarranauhajärjestelmä
- Ranteella irroitettava lisärempi, jolla tuennan tasoa säädeltävissä
- Anatomisesti muotoiltu, muotoiltavissa olevaalumiinilasta
- Kiinteä peukaloaukko, peukalolla vapaa liikkuvuus

Koko- ja tilaustiedot

Koko: S-L, oikea ja vasen.

Koko määritetään ranteen ympärysmitan mukaan.

Tuotekoodi	Koko	Ranteen ympäryys	Tuen pituus
4519-S	S	10–11,5 cm	13 cm
4519-M	M	11,5–13 cm	14 cm
4519-L	L	13–14,5 cm	15 cm



ÖSSUR | B-8381470

Rebound Post-Op

Laadukas postoperatiivinen ja trauman jälkeinen polvituki lapsille

Käyttöaiheet

Postoperatiivinen hoito seuraavien vammojen yhteydessä (polven nivelsidevammat, meniskivammat, patellajänteen vammat, osteokondroosi), sääriluun yläpinnan murtumat, sääriluun osteotomia, kondyylimurtumat, nivelsidevammojen konservatiivinen hoito

Ominaisuudet

- Teleskooppikiskojen pituus säädettävissä 39,5–54 cm
- Säädot mahdollista tehdä ilman työkaluja
- Värikoodit ja numerointi helpottavat tuen käyttöä
- Helppo- ja nopeakäyttöiset soljet
- Saatavilla myös puolierottomana mallina

Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi	Koko	Tuen pituus
PD-77POP	1 koko	33 cm



MEDI | G1800KX

Medi® ROM Kidz

Lasten postoperatiivinen polvituki

Käyttöaiheet

Postoperatiivinen immobilisointi, polvivammojen jälkeinen immobilisointi ja kuntoutusvaiheen kontrolloitu mobilisaatio, sivu- ja ristisidevammojen tuenta ja hoito

Ominaisuudet

- Mahdollista rajoittaa polvinivelen liikettä f leks.–ekst.suunnassa 0°–105° välillä, 15° välein
- Immobilisointi 0°–60° fleksioon, 15° välein
- Kulmasäädöt ruuvilukittavan kiekon alla (lapsi ei pääse muuttamaan asetuksia)

Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi	Koko	Tuen pituus
G1800K1	lyhyt	25 cm
G1800K2	pitkä	35 cm

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset



EMBREIS | KZ114X0X

Jet-kovaraamituki

Lasten kovaraaminen polvituki

Käyttöaiheet

Nivelsidevammat (ACL, PCL, CL),
kierukkavammat, rustovammat, osteokondriitti

Ominaisuudet

- Alumiinirunko, muotoiltavissa yksilöllisesti
- Ekstensio- ja fleksiorajoitukset säädettävissä
- Väri musta, tilattavissa vihreä ja punainen

Koko- ja tilaustiedot

Koko määritetään reiden ympärysmittalla
13 cm polven keskikohdan yläpuolelta.

Tuotekoodi vasen	Tuotekoodi oikea	Koko	Reiden ympäryys
KZ114103-B	KZ114203-B	S	28–32 cm
KZ114105-B	KZ114205-B	M	32–37 cm
KZ114107-B	KZ114207-B	L	37–41 cm
KZ114109-B	KZ114209-B	XL	41–44 cm



ORLIMAN | OP1182

Sivukiskollinen polvituki

Käyttöaiheet

Polven venähdykset, polven sivusuuntainen instabiliteetti,
postoperatiivinen ja konservatiivinen kuntoutus, uusien
vammojen ennaltaehkäisy, polven linjauksen ongelmat

Ominaisuudet

- Hengittävä elastinen materiaali
- Nivelelliset sivukiskot
- Polvilumpioaukko antaa kevyttä tukea lumpiolle
- Avattava malli, kiinnitys takaa kahdella tarralla
- Puolieroton
- Tuen pituus 19 cm

Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi	Koko	Ikä	Polven ympäryys
OP1182-1	1	2–6 v.	20–26 cm
OP1182-2	2	6–12 v.	26–32 cm



ORLIMAN | OP118

Palumbo-patellatuki

Polvilumpion sijoiltaanmenoon

Käyttöaiheet

Polvilumpion sijoiltaanmeno, polvilumpion lateralisaatio, polven kevyt tuenta

Ominaisuudet

- Hengittävä elastinen materiaali
- Joustavat sivuvahvikkeet
- Polvilumpioaukko ja polvilumpion tukityyny lateraalisivulla, kiristys ja kiinnitys tarroilla polven mediaalisivulle
- Avattava malli, kiinnitys takaa kahdella tarralla
- Puolieroton
- Tuen pituus 19 cm

Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi	Koko	Ikä	Polven ympärys
OP1184-1	1	2-6 v.	20-26 cm
OP1184-2	2	6-12 v.	26-32 cm



ORLIMAN | OP1181

Kevyt polvituki

Hyvä lastenmalli liikuntaan

Käyttöaiheet

Polven lievä instabiliteetti, postoperatiivinen ja konservatiivinen kuntoutus, uusien vammojen ennaltaehkäisy, polvilumpion kevyt ohjaus/tuenta

Ominaisuudet

- Hengittävä elastinen materiaali
- Joustavat sivuvahvikkeet
- Polvilumpioaukko antaa kevyttä tukea lumpiolle
- Avattava malli, kiinnitys takaa kahdella tarralla
- Puolieroton
- Tuen pituus 19 cm

Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi	Koko	Ikä	Polven ympärys
OP1181-1	1	2-6 vuotta	20-26 cm
OP1181-2	2	6-12 vuotta	26-32 cm

Kaula

Olkä • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset



ENOVIS / PROCARE | 79-955X0

MiniTrax-walker

Lasten walker

Käyttöaiheet

Jalkaterän ja varpaiden vammat, postoperatiivinen hoito, nilkan nivelsidevammat, hyväasentoiset tai sisäisesti fiksoidut nilkan tai jalkaterän alueen murtumat

Ominaisuudet

- Immobilisoi nilkan 90° kulmaan
- Walker keinupohjineen mahdollistaa aikaisen kävelyn, aktiivinen nopea kuntoutus
- Tarranauhakiinnitys, helpottaa myös hygieniasta ja mahdollisista haavoista huolehtimisen

Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi	Koko	Ikä	Kengän koko
79-95510	S	1–2,5 vuotta	< 25
79-95520	M	2,5–5 vuotta	25–29
79-95530	L	5–8 vuotta	> 29



ENOVIS / AIRCAST | 02J

Air-Strirrup® Classic

Lasten nilkkatuki akuuttiin nilkkavammaan

Käyttöaiheet

Akuutit nilkkavammat, nilkan nyrjähdykset (asteet I-III),
ostoperatiivinen tuenta

Ominaisuudet

- Puolikova, anatomisesti muotoiltu kuori antaa suojaa ja käyttömukavuutta sekä estää nilkan inversiota ja eversiota
- Patentoitu Duplex™-ilmatyynyjärjestelmä parantaa verenkiertoa ja vähentää turvotusta
- Helppo asettaa paikalleen ilmatyynyjen ja säädettävän kantalapun avulla
- Sopii hyvin jalkineeseen: mahdollistaa kevyen alkuvaiheen kuormituksen

Koko- ja tilaustiedot

Pediatric (saatavilla myös kolme aikuisten kokoa), oikea ja vasen.

Tuotekoodi	Puoli	Koko	Tuen korkeus
02JL	vasen	lapset	15 cm
02JR	oikea	lapset	15 cm



ORLIMAN | OP1190

Kevyt nilkkatuki

Käyttöaiheet

Lievät nilkan nyrjähdykset, toistuvat
nyrjähdykset, uusien nyrjähdysten
ennaltaehkäisy, aktiivinen kuntoutus

Ominaisuudet

- Hengittävä elastinen materiaali
- Avattava malli, kiinnitys edestä kahdella tarralla
- Elastinen lycra-lisäremmi antamaan lisätukea ja ohjausta tarpeen mukaan
- Puolieroton
- Tuen pituus 19 cm

Koko- ja tilaustiedot

Tuotekoodi	Koko	Ikä	Nilkan ympärys
OP1190-1	1	2–6 vuotta	< 20 cm
OP1190-2	2	6–12 vuotta	< 24 cm

Kaula

Oika • Kyynär

Ranne • Käsi

Selkä

Lonkka

Polvi

Nilkka • Jalka

Lapset

Yksilölliset tuet ja ortoosit

Räätälöidyt tukiratkaisut

Yksilölliset jalkineet, tukipohjalliset, lääkinnälliset tukisukat sekä sääri- ja nilkkaortoosit ovat vahvaa erityisosaamistamme. Suunnittelemme ja valmistamme juuri sinulle sopivat ratkaisut apuvälineteknikon ja fysioterapeutin ammattitaitoa hyödyntäen. Toteutamme myös vaativimmat tukiratkaisut, kuten pitkät tukisidokset, jalkateräproteesit, serratuslastat sekä erilaiset yläraajaortoosit ja korvasilikonit.



Askelanalyysit

Jalkatutkimus
3D-askelanalyysilaitteen tutkimus
Alaraajojen pituuseromittaus



Yksilölliset jalkineet

Ortopediset jalkineet
Mittajalkineet
Muut erityisjalkineet



Yksilölliset tuet ja ortoosit

Sääri- ja nilkkaortoosit
Tukipohjalliset
Kengän korotukset
Lääkinnälliset tukisukat
Pitkät tukisidokset
Yläraajaortoosit
Selkä- ja polvituet
Serratuslastat
Korvakeloidisilikonit

Valmistamme yksilölliset apuvälineet
käsityönä omassa pajassamme vankalla
kokemuksella ja ammattitaidolla.





Turun Tukikohta

Puutarhakatu 17, 20100 Turku
tilaus@turuntukikohta.fi
020 761 9030

Tukikohta Kupittaa

Joukahaisenkatu 6, NEO-talo
20520 Turku
kupittaa@turuntukikohta.fi
020 761 9031

Porin Tukikohta

Itsenäisyydenkatu 35, 28130 Pori
pori@turuntukikohta.fi
020 761 9036

Oulun Tukikohta

Kansankatu 57, 90120 Oulu
oulu@turuntukikohta.fi
020 761 9032